

SmartVision by KAPSYS SmartVision Lite



Schnellstart-Anleitung

Einleitung

SmartVision ist das erste Android Smartphone, welches speziell für Menschen mit Sehbehinderung entwickelt wurde. SmartVision ist das erste, wirklich zugängliche Smartphone, reich an Hilfstechnologien und multifunktional, mit physischer Tastatur, Berührungsbildschirm und einer voll sprachgesteuerten Benutzerschnittstelle.

Die Benutzerschnittstelle und die Funktionen wurden vollständig angepasst, um sicher zu stellen, dass Smartvision einfach zu handhaben und zu bedienen ist. Die Anwendungen sind so organisiert, dass sie einfach bedienbar sind, mittels großformatigen Schriftsätzen.

Die Benutzerschnittstelle von Smartview beinhaltet auch Sprachbefehle, sowie einen Zusätzlich sprachgesteuerten Diktiermodus, um Textnachrichten zu erstellen. Zudem gibt es in Smartvision Anwendungen für zielgenaue Fußgängernavigation⁽¹⁾, eine digitale Vergrößerungs-App mit Kontrastfiltern, eine OCR⁽¹⁾ mit automatischem Seitenerkennungsmodus sowie einen Manager für NFC⁽¹⁾ Technologie.

Smartvision bietet die besten Eigenschaften, welche Smartphones verfügbar haben, einfach zu nutzen und mit hervorragender Zugänglichkeit.

Diese Schnellstart-Anleitung beinhaltet lediglich die am Häufigsten benutzten Funktionen. Um detailliertere Informationen über Smartview zu erhalten, bitten wir Sie, im Handbuch nachzusehen, welches auf www.kapsys.com im Supportbereich verfügbar ist.

-1-

Smartvision von Kapsys - Übersicht

Vorderseite



Rechte Seite




- 1 Taste für Ein/Ausschalten (langer Druck), Standby-Modus ein/auschalten (kurzer Druck)
- 2 Lautstärketasten + / -
- 3 Mini USB Buchse (zum Laden und Anschließen an den PC)
- 4 Anschlussbuchse für Kopfhörer (3.5mm)
- 5 Menü des aktuellen Bildschirms anzeigen
Startbildschirm anzeigen (Home)
Zurück (Vorheriges Menü)
- 6 OK Einen Anruf beantworten oder Eingabe bestätigen
Durch ein Menü oder einen angezeigten Bildschirm navigieren
Einen Anruf beenden oder eine Eingabe löschen
- 7 SOS-Taste: Nach unten drücken, um den SOS-Vorgang auszulösen.
- 8 Kameralinse
- 9 Blitz
- 10 Kontakte für Docking Station


Wenn Ihr SmartVision in den Standby-Modus geschaltet hat, so reaktiviert ein kurzer Druck auf die ein/aus-Taste den Bildschirm.

-3-

Einsetzen der Sim-Karte und der Batterie

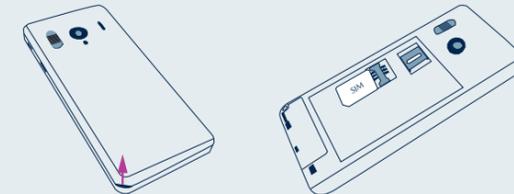

- 1 Drehen Sie das Telefon um, suchen Sie die Aussparung im unteren, linken Eck und öffnen Sie den Deckel
- 2 Setzen Sie die Sim-Karte so ein, dass sie mit dem «Gesicht» nach unten und der abgeschnittenen Ecke unten rechts zu liegen kommt. Schieben Sie die Sim-Karte in Aufwärtsrichtung in das Gehäuse.

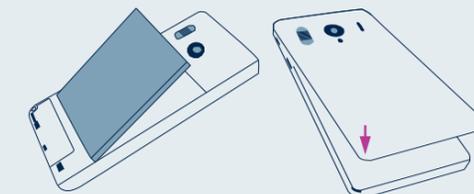


- 3 Setzen Sie die Batterie ein, indem sie den unteren Bereich zuerst platzieren, so, dass die Verbindungskontakte unten rechts liegen; klicken Sie dann die Batterie in ihre Halterung.
- 4 Schließen Sie nun das Telefon wieder, indem Sie den oberen Teil des Deckels zuerst einsetzen und ihn dann mit einem festen Druck einklicken.

-4-

Aufladen der Batterie

Wenn Sie SmartVision das erste Mal benutzen, empfehlen wir, die Batterie mindestens 4 Stunden lang aufzuladen. Laden Sie die Batterie auf, indem Sie entweder die Docking Station benutzen, oder das mitgelieferte Kabel direkt mit einem USB-Ladegerät verbinden.

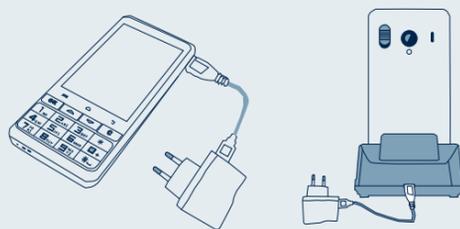

Smartvision kann nicht in die Docking Station gestellt werden, wenn es sich in der mitgelieferten Schutzhülle befindet.

Ein- und Ausschalten Ihres Smartvision

Schalten Sie das Smartvision durch langes Drücken auf die ein/aus-Taste ein, welche sich auf der Oberseite des Gerätes befindet.



Wenn das Telefon zum ersten Mal eingeschaltet wird, so folgen Sie bitte den Installationsanweisungen.

Smartvision ist betriebsbereit, wenn der Startbildschirm erscheint.

Um SmartVision auszuschalten, drücken Sie lange auf die ein/aus-Taste und folgen Sie den Anweisungen.

Wenn der Bildschirm leer ist, wiederholen Sie den Akku Installation.

-6-

Der Startbildschirm

Der Startbildschirm zeigt die Hauptanwendungen und -Funktionen von Smartvision



- Die Telefonanwendung erlaubt das Telefonieren, das Prüfen verpasster Anrufe, sowie den Zugang zu Ihrer Voicemail Box.
- Die Mitteilungs-Anwendung gestattet es Ihnen, SMS- und MMS-Nachrichten zu versenden und zu empfangen.
- Die E-Mail Anwendung ermöglicht es Ihnen, elektronische Post zu versenden und zu empfangen, vorausgesetzt, Sie haben Ihr E-Mail Konto eingerichtet.
- Das Anwendungssymbol bringt eine Liste mit allen Anwendungen Ihres SmartVision.
- Das Einstellungen-Symbol ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon zu konfigurieren.
- Das Einstellungen-Symbol ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon zu konfigurieren.

Um jeder Zeit zum Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Taste Pfeil runter lange.

-7-

Tastatur, Berührungsbildschirm oder Sprachbefehle

SmartVision bietet drei verschiedene Benutzerschnittstellen oder Betriebsarten, nämlich die Tastatur, den Berührungsbildschirm oder Sprachbefehle:

- Der Tastatur-Modus gestattet es Ihnen, Daten wie Ziffern oder Text über die Multifunktionstastatur einzugeben. Um mit der Tastatur vertraut zu werden, sehen Sie bitte in der Einleitung weiter oben nach, wo die Funktionen jeder Taste und jedes Knopfes im Einzelnen beschrieben werden.
- Der Berührungsbildschirm-Modus ist die Standard-Betriebsart eines jeden Smartphones. Sie erlaubt es dem Benutzer, durch die verschiedenen Menüs mit den Fingerspitzen zu navigieren. Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Objekt auszuwählen oder eine Aktion zu bestätigen. Im Zugänglichkeitsmodus unterstützt SmartVision zusätzliche Befehls- und Kontrollgesten für einfache Navigation durch die Bildschirminhalte und zur Interaktion mit Ihrem Smartphone.
- Die Betriebsart Sprachbefehle ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartvision mit Sprachbefehlen oder Daten mittels Spracherkennung einzugeben. Um die Sprachbefehle zu aktivieren, drücken Sie die Sprachbefehls-Taste an der rechten Seite des Telefons.



Die Spracherkennungsfunktion ist das Ergebnis neuester Technologien. Alle Objekte am Bildschirm sind vokalisierbar. So können Sie Ihr Telefon vollumfänglich per Sprache kontrollieren.

Ein **kurzer Druck**, gefolgt von einem Signalton gestattet es Ihnen, ein Objekt am Bildschirm zu aktivieren, indem Sie es sprechen (z.B. um eine Anwendung zu starten oder eine Einstellung zu aktivieren etc.), oder ein Schlüsselwort⁽¹⁾ zu benutzen, um Statusinformationen über Ihr SmartVision zu erhalten (z.B. „Batteriestatus“ oder „Wie spät ist es?“).

Drücken und gedrückt halten der Sprachbefehlstaste aktiviert die Texteingabe per Sprache (wie z.B. („Hallo, wie geht es Ihnen?“) in ein Eingabefeld jeder Art. Lassen Sie die Taste los, um das Diktat zu beenden. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion einen Internet-Zugang über 3G oder Wi-Fi.

Sie können verschiedene Eingabe-Modi kombinieren. So können Sie beispielsweise beginnen, einen Text per Sprache einzugeben und dann den Berührungsbildschirm oder die Tastatur benutzen, um Text oder Ziffern hinzu zu fügen oder um Daten mit der Löschen-Taste zu korrigieren.

⁽¹⁾ Die vollständige Liste der Schlüsselwörter ist im Benutzerhandbuch von Smartvision zu finden.

-9-


Zubehör

SmartVision von KAPSYS wird ausgeliefert mit:

- ✓ Einer Batterie
- ✓ Einem 220/110 Volt / 5 Volt USB Netzadapter
- ✓ Einer Docking Station zum Aufladen⁽¹⁾
- ✓ Einem Kabel USB / Micro-USB
- ✓ Einem Umhängeband
- ✓ Einem Stereo Ohrhörer mit einem Mikrofon und einer Taste
- ✓ Einer Schutzhülle⁽¹⁾

-5-

☎ Telefonieren Im Tastatur-Modus

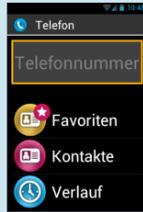

- Vom Startbildschirm aus, benutzen Sie bitte die physischen Tasten für rauf und runter bis zur Anwendung Telefon; drücken Sie auf **OK**, und die Telefon-Anwendung startet.
- Geben Sie die Nummer, welche Sie anrufen möchten, über die Tastatur ein und drücken Sie die **OK**-Taste, um zu bestätigen und den Anruf zu tätigen.

Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie die Löschen-Taste, um das jeweils letzte Zeichen zu löschen.

Im Berührungsbildschirm-Modus



- Tippen Sie auf das Symbol Telefon und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm

-10-

- Wählen Sie das Kontakte-Symbol , um Zugang zu allen Ihren Kontakten zu erhalten, welche in Ihrer Kontaktliste gespeichert sind.



- Wählen Sie das Favoriten-Symbol , um Zugang zu einem Ihrer als Favorit gesetzten Kontakt zu erhalten oder diesen anzurufen.

- Wählen Sie das Verlauf-Symbol , um Ihr gesamtes Telefonprotokoll anzuzeigen..

Im Sprachmodus



Drücken Sie vom Startbildschirm aus kurz die Sprachbefehle-Taste. Nach dem Signalton sprechen sie das Schlüsselwort „**anrufen**“, gefolgt vom Namen der Person, die sie anrufen möchten. Bitte beachten Sie, dass der Kontakname Teil Ihrer Kontaktliste sein sollte. Folgen Sie den Anweisungen, um den Anruf zu bestätigen.

Beispiel von Sprachbefehlen:

- „**Anrufen Klaus Schulze**“
- „**Anrufen Klaus Schulze mobil**“ (Wenn Sie mehr als eine Nummer für diesen Kontakt gespeichert haben)

-11-

Sie können ebenfalls direkt aus Ihrer Kontaktliste, Ihren Favoriten oder Ihrem Verlaufsprotokoll einen Anruf auslösen, indem Sie einfach den Kontakname sprechen..

Einen Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, so zeigt der Bildschirm die Nummer oder den Namen des Anrufers an, wie er in Ihrer Kontaktliste gespeichert ist.




Im Tastatur-Modus, drücken Sie die Taste **OK**, um einen Anruf anzunehmen, oder die Taste **C**, um einen Anruf abzuweisen.

Sie Können einen Anruf auch beantworten, indem Sie den grünen **Annehmen-Knopf** drücken, oder sich entscheiden, den Anruf abzuweisen, indem Sie den roten **Ablehnen-Knopf** am Berührungsbildschirm drücken.

-12-

✉ Eine Nachricht versenden Im Tastaturmodus

- Vom Startbildschirm aus, navigieren Sie mit den Tasten Rauf und Runter $\Delta \nabla$ bis zur Anwendung „**Messaging**“  und drücken Sie **OK**. Die Messaging-Anwendung startet.

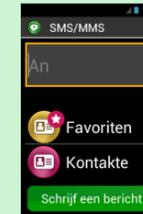

- Benutzen Sie die Tasten Rauf und Runter $\Delta \nabla$, um den Schalter „**Neue Nachricht**“ zu erreichen, und drücken Sie **OK**.



- Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, wählen Sie dann eine „**Nachricht schreiben**“, und drücken Sie auf **OK**, um zu bestätigen.

- Geben Sie die Nachricht ein, indem Sie die alphanumerische Tastatur verwenden. Wenn die Nachricht geschrieben ist, wählen Sie senden, und bestätigen Sie dann durch Drücken von **OK**.

Um Ziffern einzugeben, tippen sie die **123-Tasten**, um Buchstaben einzugeben, tippen sie die **ABC-Tasten**.

Im Sprachmodus



Vom Startbildschirm aus, drücken Sie kurz auf die Sprachbefehl-Taste. Nach dem Signalton, sprechen Sie „**Nachricht senden an**“, gefolgt vom Namen der Person, an die Sie eine SMS senden möchten. Bitte beachten Sie, dass der Kontakname Teil Ihrer Kontaktliste sein sollte.

Folgen Sie den Anweisungen, um die Nachricht zu schreiben, und versenden Sie sie. Beispiel eines Sprachbefehles: „**Nachricht senden an Klaus Schulze**“.

-13-

Im Berührungsbildschirm-Modus

Vom Startbildschirm aus, wählen Sie das Messaging-Symbol . Die Messaging Anwendung startet .



- Wählen Sie das Feld „**neue Nachricht**“, um eine neue SMS oder MMS zu erstellen.


-14-

👤 Einen Kontakt erstellen

- Vom Startbildschirm aus, wählen Sie zuerst das „**Apps**“ Symbol  und dann das „**Kontakte**“ Symbol , um die Kontakte Anwendung zu starten.



- Wählen Sie „**Kontakt hinzufügen**“. Der Bildschirm für neue Kontakt erscheint.

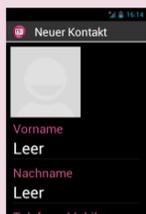

- Füllen Sie die Felder nacheinander aus (Vorname, Nachname, Telefonnummer etc...). Drücken Sie **OK** am unteren Bildschirmrand, um den Kontakt zu erstellen und zu speichern.

- Sie können diesem Kontakt auch ein Bild anhängen. SmartVision schlägt Ihnen vor, entweder ein Foto zu schießen oder eines aus der Galerie  auszuwählen.

Sie können Kontakte erstellen unter Verwendung einer der 3 Eingabemethoden (Tastatur, Berührungsbildschirm, Sprache).

-15-

🚨 Die SOS Funktion

Für Ihre Sicherheit enthält SmartVision eine SOS Funktion. Sie erlaubt es Ihnen, automatisch Anrufe auszulösen oder Notfallnachrichten mit Angaben zu Ihrem Standort an vordefinierte Kontakte (Maximal 10) zu versenden, wenn die SOS Taste aktiviert ist.

Aktivieren Sie diese Funktion bei einem Notfall, indem Sie den SOS Knopf an der Rückseite des Telefons drücken und nach unten schieben.



Vor der Benutzung der SOS  Funktion müssen Sie diese konfigurieren.

Konfigurieren der SOS Anwendung

Wählen Sie vom Startbildschirm aus das „**Apps**“ Symbol , dann das „**SOS**“ Symbol  und stellen Sie dann folgende Optionen ein.



-16-

SOS Taste: erlaubt es, den entsprechenden Knopf am Smartvision zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Einen Alarm abspielen: Spielt einen Klang ab über den Gerätelautsprecher.

Telefonnummern festlegen: Erlaubt es Ihnen, die Zielnummern einzurichten, die Sie anrufen oder mit einer SMS beschicken möchten, wenn der SOS Knopf aktiviert ist.

Anrufe: Erlaubt es Ihnen, vordefinierte Nummern anzurufen, wenn der SOS Knopf aktiviert wird.

Nachricht senden: Erlaubt es, SMS-Nachrichten an Zielnummern zu senden, wenn der SOS Knopf aktiviert wird.

Koordinaten senden: Ermöglicht es Smartvision, Informationen über Ihren geografischen Standort zu versenden. Bitte beachten Sie, dass diese Information nicht garantiert werden kann.

Nachrichtentext: Erlaubt es, den Nachrichtentext zu personalisieren, welche im Notfall versandt werden soll.



-17-



☰ Andere Anwendungen

 **Kalender:** Plant Ihre Termine.

 **Alarm:** Setzt Ihren Wecker.

 **Kamera:** Zum Aufnehmen von Bildern oder Videos.

 **Hilfe:** Erlaubt es einer Drittperson, die Kontrolle über Ihr Telefon zu übernehmen.

 **Rechner.**

 **Galerie:** Zum Sortieren und Ansehen Ihrer Bilder, Fotos und Videos.

 **Browser:** Im Internet surfen.

 **Kapten^(*):** Bewegen Sie sich frei mit dieser integrierten GPS Anwendung.

 **Videospieler:** Zum Abspielen Ihrer aufgezeichneten Videos auf Ihrem Telefon.

 **Lupe:** Vergrößert ein Bild oder einen Text.

 **Soundrecorder:** Zum Aufnehmen und Abspielen von Sprachnachrichten.

 **Musik:** Zum Hören von Musik, die auf Ihrem Telefon gespeichert ist.

 **NFC^(*):** NFC: Zum Programmieren und lesen Ihrer NFC-Etiketten.

-18-

 **OCR^(*):** Zum Scannen und Vorlesen Ihrer Dokumente.

 **Suchen:** Zum Auffinden von etwas auf Ihrem Telefon.

 **FM Radio:** Zum Radiohören.

Für eine detaillierte Beschreibung der anderen Anwendungen und Funktionen, wollen Sie bitte im Benutzerhandbuch des SmartVision nachsehen.

(*) = nicht verfügbar auf Smartvision Lite

**SmartVision
Lite**

Über dieses Handbuch

Die Informationen, welche in diesem Handbuch veröffentlicht wurden, können ohne Vorankündigung geändert werden. Kapsys behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes zu ergänzen, ohne Verpflichtung, Personen oder Gesellschaften darüber zu informieren. Kapsys haftet nicht im Falle von Fehlern technischer oder verlegerischer Art oder Weglassungen, was diesen Inhalt angeht. Kapsys unternimmt alles, um Qualität und Funktionen seiner Produkte kontinuierlich zu verbessern, und Kapsys rät dementsprechend dazu, dass Sie deren Webseite (www.kapsys.com) besuchen, um die letzten Aktualisierungen von Dokumentationen zu erhalten, welche den Gebrauch und die Funktionen der Produkte betreffen.

-19-