



Korte handleiding

Inleiding

De SmartVision is een Android Smartphone die speciaal ontwikkeld is voor mensen met een visuele beperking. De SmartVision biedt u een all-in-one toestel dat zowel met een aanraakscherm als met een fysiek toetsenbord en met stem commando's kan bediend worden.

De gebruikers interface is aangepast zodat de SmartVision gemakkelijk te hanteren is en de mogelijkheden biedt van een moderne smartphone. Applicaties kunnen eenvoudig worden aangepast zodat het lettertype in een groot formaat kan worden ingesteld.

De SmartVision omvat spraakcommando's en een dicteer modus om berichten aan te maken. Daarbij kan men de navigatie met uw eigen stem bedienen, maar ook documenten inscannen en laten voorlezen, een kleine tekst vergroten met de loep, in nood bellen met een SOS functie enz.

De SmartVision biedt u het beste van een Smartphone. Het is eenvoudig te gebruiken en heeft een uitzonderlijke toegankelijkheid.

De korte handleiding beschrijft de meest frequente functies. Voor meer details over de SmartVision, kan u de volledige handleiding raadplegen op «www.kapsys.com» onder 'SmartVision'.

-1-

SmartVision by KAPSYS Overzicht



-2-

- 1 AAN/UIT (lang drukken)
Stand-by modus (kort drukken)
- 2 Volume knoppen +/-
- 3 Mini USB ingang (voor opladen en verbinding met de computer)
- 4 Hoofdtelefoon aansluiting 3,5 mm
- 5 Menu gekoppeld aan het huidige scherm
- Startscherm
- Terug (vorige scherm)
- 6 OK Een oproep beantwoorden of keuze/commando bevestigen.
- Δ∇ Navigeren in het menu of in het weergegeven scherm.
- C Een oproep beëindigen of keuze wissen.
- 7 SOS knop, De knop indrukken en naar beneden duwen om de hulpdiensten te verwittigen.
- 8 Camera lens
- 9 Flash
- 10 contacten voor het laadstation

Als uw SmartVision zichzelf op stand-by zet, druk kort op de AAN/UIT knop om het scherm te reactiveren.

-3-

Starten

De SIM kaart en de batterij plaatsen



1 Draai de telefoon om, zoek de gleuf aan de linker onder hoek en til de achterkant op.

2 Plaats de SIM kaart met de chip naar onder en richt de SIM kaart zodanig dat de afgesneden hoek zich rechtsonder bevindt. Schuif de SIM kaart in de opening.


3 Plaats de batterij door het onderste gedeelte eerst te plaatsen. Klik daarna de batterij in de opening.

4 Tenslotte, sluit het apparaat door eerst het bovenste gedeelte van de achterkant te plaatsen en druk overal op de achterkant tot er een klik te horen is.

-4-

De Batterij opladen

Bij een eerste gebruik van de SmartVision, is het aangeraden om de batterij minstens vier uur op te laden. U kan de batterij opladen via de micro-USB connectie of in de houder, die met de stroomadapter is verbonden.

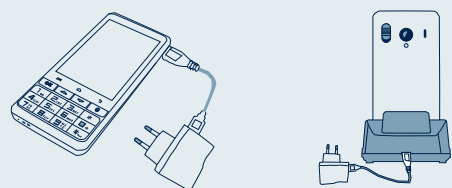

De SmartVision kan niet in de houder worden geplaatst om op te laden als de beschermingshoes aanwezig is.

Accessoires

SmartVision by KAPSYS wordt geleverd met :

- ✓ De Batterij
- ✓ Stroom adapter 220V - 5V USB
- ✓ Een houder om de batterij op te laden
- ✓ USB micro-kabel
- ✓ Hanger
- ✓ Oortjes met microfoon en onderbreektoets
- ✓ Rubberen beschermhoes
- ✓ Documentatie

-5-

De SmartVision aan-/uitzetten

Zet de SmartVision aan door lang op de AAN/UIT knop de duwen aan de bovenkant van de telefoon.



Wanneer de telefoon voor de eerste keer wordt aangezet, volg de instellingsinstructies.

De SmartVision is klaar voor gebruik wanneer het startscherm verschijnt.

Om de SmartVision uit te zetten, druk lang op de AAN/UIT knop en volg de instructies.

Als het scherm zwart blijft, herstart dan de procedure om de batterij te installeren.

-6-

Het Startscherm

Het Startscherm toont de belangrijkste functies en applicaties van de SmartVision.



- Via de telefoonapplicatie kan u een oproep doen, uw gemiste oproepen controleren en toegang verkrijgen tot uw voicemail.
- Via de berichtenapplicatie kan u een SMS en MMS ontvangen of versturen. and MMS.
- Via de E-mail applicatie kan u e-mails ontvangen of versturen, uitgaande dat u uw e-mail account hebt ingesteld.
- Via het applicatie pictogram worden alle applicaties aangekondigd die beschikbaar zijn in uw SmartVision.
- Via het favorieten pictogram kan u de meest gebruikte applicaties terugvinden.

De statusbalk bovenaan in het Startscherm geeft informatie zoals de sterkte van de netwerkverbinding, het batterijniveau, enz.

Om terug te keren naar het Startscherm, kan u op elk moment drukken op .

-7-

Toetsenbord, aanraakscherm of spraakcommando's

De SmartVision biedt u drie mogelijke bedieningsmethodes, aanraakscherm, toetsenbord en spraak.

- **Toetsenbord modus:** Via de toetsenbord modus kan u een telefoonnummer ingeven of een bericht maken in ABC-modus. Om u zelf vertrouwd te maken met het toetsenbord, gelieve te verwijzen naar de inleiding hierboven. Hier worden de functies van elke toets en knop beschreven in detail.
- **Aanraakscherm:** Zoals bij elke smartphone kan u navigeren door verschillende menu's met een vingertip. Ga over het scherm om de gewenste applicatie te vinden en te starten. Om toegang te verkrijgen tot de applicatie, vraagt SmartVision een extra bevestiging zodat u eenvoudig kan navigeren op het scherm van uw smartphone.
- **Spraakcommando:** Via spraakcommando kan u uw SmartVision controleren met de stem of gegevens invoeren door gewoon te spreken. Het spraakcommando wordt gestart door kort te drukken op de ASR toets aan de rechterkant van de telefoon.



De stemherkenning is het resultaat van de laatste technologie. Alle items die op het scherm verschijnen kunnen ingesproken worden. Op die manier kan u uw telefoon volledig met spraak bedienen.

Na kort te drukken, gevolgd door een biepton, kan u een stemcommando geven om een bepaald item te activeren (Vb. om een applicatie te starten of een instelling te wijzigen), of om een trefwoord (1) te gebruiken voor informatie te verkrijgen over de SmartVision status. (Vb. «Batterij niveau ?» or «Hoe laat is het?»).

Door de spraakcommando knop **ingedrukt te houden**, kan u via spraak een tekst opmaken (zoals «Hallo, hoe gaat het?»). Laat de knop los om het dicteren te beëindigen. Let hierbij op dat voor deze functie een 3G verbinding of Wi-Fi datanetwerk nodig is.


U kan verschillende manieren combineren om gegevens in te voeren. Bijvoorbeeld: U start met een tekst in te voeren via de stem invoer modus en daarna gebruikt u het aanraakscherm of toetsenbord om tekst of nummers toe te voegen of om gegevens te corrigeren met de toets C.

(1) De volledige lijst met trefwoorden is beschikbaar in de SmartVision gebruikersgids.

-9-

Een telefoongesprek starten

Met het toetsenbord

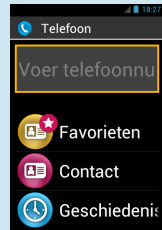

1. Vertrekkende van het startscherm, gebruik de pijltjes Δ ∇ u de telefoon applicatie selecteert en druk op **OK**. De telefoon applicatie start op.
2. Kies het nummer dat u wilt bellen met de cijfertoetsen en druk op **OK** om te bevestigen en start het gesprek.


Als u een fout nummer hebt ingevoerd, kan u een correctie uitvoeren met toets **C**. Het laatste cijfer wordt verwijderd.

Met het aanraakscherm



1. Druk op het telefoon pictogram op het startscherm en volg de instructies

-10-

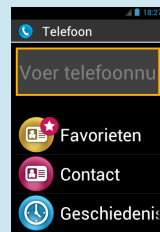

2. Open uw contacten lijst en kies een van uw contacten.
3. U hebt ook de mogelijkheid om een van uw meest gebruikte contacten te selecteren bij «Favorieten» .

4. Selecteer geschiedenis om eerder gebelde contacten op te roepen.

Met spraak



Vertrekkende van het Startscherm, druk kort op de spraakcommando toets. Zeg na de bieptoon «Bellen» gevolgd door een naam van de persoon die u wilt contacteren. Let hierbij op dat de persoon die u wilt contacteren in uw contactenlijst staat. Volg de instructies om de oproep te bevestigen.

Voorbeelden van spraakcommando's:


1. «Bellen Paul Johnson»
2. «Bellen Paul Johnson Mobiel» (Als u meer dan een nummer bewaard hebt voor deze persoon)

-11-

U kan ook rechtstreeks een telefoongesprek starten via uw contactenlijst, Favoriete contacten of Bel geschiedenis door eenvoudig de naam van de contactpersoon te zeggen.

Een oproep beantwoorden

Wanneer u een oproep ontvangt, verschijnt op het scherm de nummer of de naam van de beller die bewaard werd in uw contactenlijst.

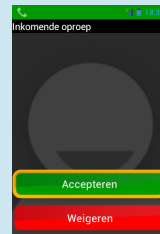

Via het toetsenbord, gebruik de toetsen **OK** of **C** om respectievelijk een oproep te beantwoorden of af te wijzen.

U kan ook een oproep beantwoorden door de groen gekleurde knop **Accepteren** te gebruiken of een oproep afwijzen door de rood gekleurde knop **Weigeren** te gebruiken.

-12-

Een bericht versturen

Met het toetsenbord


Vertrekkende van het Startscherm, gebruik de pijltjes Δ ∇ tot u de SMS applicatie , en druk op **OK**.

1. Gebruik de pijltjes tot u **Nieuw bericht** selecteert en druk **OK**.
2. Voer het nummer in van de geadresseerde. Selecteer met de pijltjes **Bericht schrijven**, en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Gebruik het toetsenbord in ABC-modus om uw bericht in te voeren. Gebruik de pijltjes om **Verzenden** te selecteren en bevestig met **OK**.

Met het aanrakingscherm


Vertrekkende van het Startscherm, selecteer de SMS applicatie .

De applicatie start op.

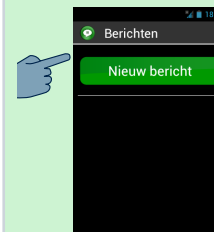

1. Selecteer **Nieuw bericht** om een nieuwe SMS of MMS op te stellen.

-13-

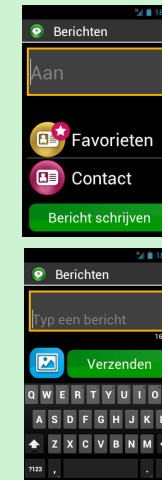

2. Voer het nummer in van de geadresseerde of selecteer een geadresseerde van **Contact** of **Favorieten**.
3. Selecteer **Bericht schrijven**. Schrijf een nieuw bericht met het toetsenbord op het scherm en kies **Verzenden**.

Om cijfers in te voeren, activeer de toets **?123** en om letters in te voeren activeer de toets **ABC**.

Met spraak




Vertrekkende van het Startscherm, druk kort op de spraakcommando knop. Na de bieptoon, zeg «**stuur bericht naar**» gevolgd door een naam van een persoon die je een bericht wilt sturen. Let hierbij op dat de persoon die u wilt contacteren in uw contactenlijst staat. Volg de instructies om het bericht op te stellen en verzend.


Voorbeeld van een spraakcommando: «**stuur bericht naar Paul Johnson**»

-14-

Een contactpersoon toevoegen

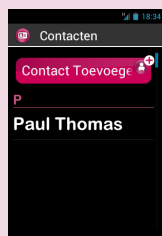

1. Vertrekkende van het Startscherm, selecteer eerst **Applicaties** en daarna **Personen** .

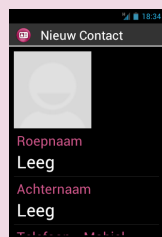

2. Selecteer **contact toevoegen**. Het **nieuwe contact** scherm verschijnt.
3. Vul de velden een voor een in (Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, enz.). Druk **OK** onderaan op het scherm om een contactpersoon aan te maken en op te slaan.

4. U kan ook een foto koppelen aan uw contactpersoon. SmartVision beveelt u aan om zelf een foto te nemen of om er een te kiezen uit de Galerij .

U kan steeds contactpersonen toevoegen op drie manieren, o.a. met het toetsenbord, het aanraakscherm en spraak.

-15-

De SOS functie

Voor uw veiligheid bevat SmartVision een SOS functie. Deze zorgt ervoor dat u automatisch noodoproepen en/of noodberichten kunt uitzenden naar vooraf ingestelde contactpersonen (met een limiet van 10 contacten) wanneer de SOS knop wordt geactiveerd.

Tijdens een noodgeval, activeer deze functie door de SOS knop te gebruiken die zich aan de achterkant van de telefoon bevindt. Druk de knop naar beneden voor activatie.



Vooraleer u de SOS functie gebruikt, moet u de applicatie instellen

De Application instellen

1. Vertrekkende van het Startscherm, selecteer **Applicaties** , en daarna **SOS** . Volg de instructies om het scherm :



SOS knop : Staat toe om de knop aan de achterkant van de SmartVision aan- en uitschakelen.

Speel een alarm af : Zendt een luid hoorbaar alarm



Telefoonnummers instellen : Configureer noodnummers die u wilt bellen of een bericht versturen wanneer de SOS knop is geactiveerd.

Vertraging antwoord : Staat oproepen toe naar noodnummers wanneer de SOS knop is geactiveerd.

Bericht versturen : Staat verzenden van berichten toe naar noodnummers wanneer de SOS knop is geactiveerd.

Locatie versturen : Staat SmartVision toe om uw geografische locatie te rapporteren in noodberichten. Let hierbij op dat deze informatie niet honderd procent wordt gegarandeerd.

Tekstbericht : Staat toe om uw noodbericht te bewerken.

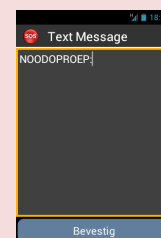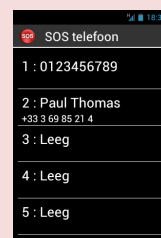

-17-

Andere applicaties

- Klok : Stel uw alarm in
- Hulp : Laat u toe om een derde persoon op afstand uw telefoon te controleren
- Browser : Surfen op het internet
- Calculator: rekenmachine
- Agenda : Schema van uw afspraken.
- Camera : Maak foto's of neem video's op.
- FM Radio: Luister naar de radio
- Galerij : organizeer en bekijk uw afbeeldingen, foto's en video's.
- Kapten : Beweeg in alle vrijheid met de GPS navigatie.
- Vergrootglas : Vergroot een afbeelding of een tekst.
- Muziek : Luister naar muziek die in uw telefoon is opgeslagen.
- NFC : programmeer en lees uw NFC tags⁽²⁾
- OCR : scan en vocaliseer uw documenten

- Geluidsrecorder : Neemt uw spraak op en speelt uw spraakbestanden af
- Scannen : Zoek iets op uw telefoon
- Videospeler : Bekijk uw opgenomen video's op uw telefoon.

Gelieve te verwijzen naar de SmartVision gebruiksaanwijzing voor een beschrijving van andere applicaties en functies.

⁽²⁾ NFC (Near Field Communication) Technologie om elektronische tags of labels te lezen.

Over deze gids

De informatie uitgegeven in dit document kan wijzigen zonder dat u het merkt. Kapsys heeft het recht om de inhoud van dit document te wijzigen zonder enige verplichting aan bepaalde personen of een andere eenheid. Kapsys kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische en gepubliceerde fouten of weglatingen. Kapsys doet er alles aan om de kwaliteit en functies continue te verbeteren. Kapsys raadt u aan de website (www.kapsys.com) te bezoeken voor de laatste updates van documenten met het gebruik en werking van zijn producten.

-18-

-19-