

Manualul Utilizatorului SmartVision2

Index

Introducere	3
Conținutul cutiei	5
SmartVision2 Overview	6
Pregătirea SmartVision2	8
Moduri de Control	11
Accesibilitate	18
Ecranul de Start	28
Aplicații	30
Bara de Notificare	32
Agendă	34
Book reader	38
Calculator	42
Calendar	43
Camera foto/video	44
Ceas	45
Chrome	46
Detectarea Culorilor	47
Detectare Lumină	48
Google Foto	49
Gmail	50
Înregistrare Sunet	51
Kapten	53
Lupă	62
Magazin Play	63
Mesagerie	64
Muzică Play	67
NFC	68
Notă	70
OCR	72
Radio FM	75
Setări	77
SOS	82
Telefon	84
Web Radio	87
FAQ – Răspunsuri la întrebări frecvente	88
Soluții pentru rezolvarea problemelor	104
Specificații tehnice	108
Dispoziții legale și garanție	110
Despre acest manual	116

Introducere

Citiți înainte de prima utilizare

- Va rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni pentru o utilizare mai sigură și mai bună a SmartVision2.
- Descrierile din acest document se bazează pe setările din fabrica ale dispozitivului.
- În funcție de locația dvs., de operatorul de rețea sau de caracteristicile de software ale dispozitivului, unele informații pot fi diferite față de ce o să găsiți în dispozitivul dvs.
- Datele de înaltă calitate care necesită utilizarea intensă a unităților de procesare și memoriei pot afecta performanțele generale ale dispozitivului. Este posibil ca aplicațiile care intră în categoria celor menționate mai sus să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile dispozitivului și de condițiile de utilizare.
- KAPSYS nu își asumă responsabilități legate de performanțele aplicațiilor terțe descărcate din Magazinul Google Play.
- Serviciile de date cum ar fi trimiterea sau primirea mesajelor, încărcarea sau descărcarea de date, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare pot genera costuri suplimentare, în funcție de abonamentul dvs. de operare în rețea. Pentru transferuri mari de date, se recomandă utilizarea Wi-Fi.
- Este posibil ca aplicațiile furnizate din fabrică împreună cu acest dispozitiv să fie modificate sau să devină indisponibile fără notificare prealabilă.
- Informațiile publicate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă. KAPSYS își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual fără a avea obligația de a notifica în mod prealabil persoane sau entități de orice fel. KAPSYS nu își asumă nicio responsabilitate pentru erorile (tehnice și editoriale) sau omisiunile prezente în acest manual și nici pentru eventualele accidente sau daune cauzate de folosirea acestui document sau de calitatea lui.
- KAPSYS se străduiește să îmbunătățească în continuu calitatea și funcționalitatea acestui produs. În consecință, KAPSYS vă încurajează să vizitați website-ul (www.kapsys.com) pentru a obține ultimele actualizări documentare referitoare la utilizarea și operarea acestui produs.
- Produsul îndeplinește toate cerințele legale ale mărcii CE pentru uz rezidențial sau comercial.

Cum să citiți acest document

Acest ghid de utilizare descrie principalele funcții ale SmartVision2 și modalitățile lui de funcționare. Descrierea funcțiilor este generică și nu ține cont de particularitățile legate de caracteristicile avansate de accesibilitate.

Aceste caracteristici avansate de accesibilitate (activate în mod implicit pe produs) sunt descrise în detaliu în secțiunea "[Accesibilitate](#)".

Sfârșitul capitoului.

Conținutul cutiei

Prezentare pachet

Cutia SmartVision2 conține:

- Baterie
- Încărcător de perete 220/110 Volți - USB de 5 Volți
- Un cablu USB (tip C)
- Căști stereo cu microfon
- husă de protecție
- un snur pentru gât
- 5 etichete NFC
- un Ghid Rapid de Utilizare

Lista de accesorii poate varia în funcție de țară, configurație sau versiunea produsului

Accesoriile furnizate au fost concepute special pentru dispozitivul dvs. și pot să nu funcționeze cu alte dispozitive.

Aspectul și caracteristicile produsului, precum și accesoriiile, pot fi modificate fără notificare.

Utilizați numai accesorii autorizate de KAPSYS. Utilizarea accesoriiilor neautorizate poate duce la probleme de performanță sau la defecțiuni care nu vor fi acoperite de garanția KAPSYS.

Sfârșitul capitolului

SmartVision2 Overview

SmartVision2 este un smartphone creat special pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe ale aparatului vizual. Acesta încorporează mai multe caracteristici de accesibilitate și ergonomice care facilitează manipularea și accesul global la universul smartphone-urilor.

Este singurul smartphone care poate fi controlat prin trei metode diferite, acestea fiind ecranul tactil, tastatura fizică și sistemul de comandă vocal (prin sinteză și recunoaștere vocală).

Mai jos găsiți o descriere detaliată a hardware-ului SmartVision2.

Partea frontală

Partea frontală a SmartVision2 este separată în două părți diferite: un ecran tactil și o tastatură fizică.

Ecranul tactil de 10 centimetri se află în partea superioară a feței smartphone-ului. Difuzorul și camera frontală de 2 megapixeli pentru apeluri video sunt situate în partea superioară a ecranului tactil.

În partea inferioară, veți găsi o tastatură fizică compusă din două părți separate.

Prima parte a tastaturii, aflată chiar sub ecran, este tasta de navigare, ușor identificabilă datorită panoului multidirecțional care permite efectuarea acțiunilor de mișcare și validarea acțiunilor cu butonul "OK" în centru.

În partea stângă a panoului multidirecțional, veți găsi tastele Android "acasă" și "meniu", care sunt situate una deasupra celeilalte și sunt separate de o bară orizontală. În partea dreaptă a panoului multidirecțional, veți găsi tastele Android "return" și "delete", care sunt poziționate una deasupra celeilalte și sunt de asemenea separate de o bară orizontală.

Pe fiecare parte a tastei de navigare veți găsi o tastă de preluare a apelului și o tastă de respingere a apelului. Tasta de preluare a apelului este în partea stângă și are trei puncte verticale în relief. Tasta de respingere a apelului este în partea dreaptă și are, în schimb, trei puncte orizontale în relief.

A doua parte a tastaturii este tastatura alfanumeric compusă din 12 taste (4 linii cu 3 taste)

- rândul 1: tastele 1, 2, 3
- rândul 2: tastele 4, 5, 6
- rândul 3: tastele 7, 8, 9

- rândul 3: tastele asterisc, 0, diez.

Pentru a u ura localizarea tastelor, pe tasta 5 se afl un punct în relief.

Descrierea detaliat a func iunilor pentru fiecare tast este disponibil în sec iunea "Modul tastatur " din capitolul "Moduri de control".

Partea superioar

Butonul On / Off este situat în partea dreapt a bordurii superioare a SmartVision2.

Partea din dreapt

În partea dreapt a SmartVision2, primul buton este butonul de comand vocal .

Mai jos g si i tastele pentru reglarea volumului.

Partea inferioar

De la stânga la dreapta g si i:

- Mufa (jack) audio 3.5 pentru a conecta c tile
- Difuzorul principal
- Locul snurului pentru gât (furnizat în cutie)
- Locul mufei USB pentru a conecta cablul USB de tip C i pentru a înc rca SmartVision2 (furnizat în cutie)

Partea din spate

În zona superioar a p r ii din spate a telefonului se afl camera de 8 mega pixeli i dou LED-uri amplasate pe fiecare parte a camerei.

Chiar sub obiectivul camerei este butonul SOS al SmartVision2.

Capacul din spate al SmartVision2 este complet deta abil i ofer acces la baterie, cartela SIM i cardul microSD.

Sfâr itul capitolului

Pregătirea a SmartVision2

Introducerea cartelei SIM

SmartVision2 este compatibil doar cu cartele Nano SIM (format 4FF).

Pentru a introduce cartela SIM, restornați telefonul, localizați creștătura în colțul din stânga jos și ridicați capacul din spate. Conectorul cartelei SIM se află în partea dreaptă a butonului SOS. Pentru a instala cartela SIM, cipul ei trebuie să fie orientat în jos, iar colțul tăiat trebuie plasat în partea din stânga sus. Glisați cartela SIM înspre sus până va ajunge în locul ei prestabilit.

Bine de știut: slotul de memorie extern Micro-SD este chiar deasupra conectorului cartelei SIM.

Introducerea bateriei

Odată ce a fost scos capacul din spate, introduceți bateria în compartimentul ei procedând mai întâi cu plasarea marginii unde sunt placi de încercare. Apoi fixați partea inferioară.

La urmă puneți la loc capacul din spatele telefonului, începând cu partea lui superioară. Apăsăți pe margini și în mod hotărât pentru a-l închide bine.

Încarcarea bateriei

Pentru prima utilizare, vă recomandăm să încărcați bateria timp de cel puțin 4 ore. După aceea, veți putea reîncărca bateria în funcție de cât va fi utilizată și a nivelului ei de autonomie.

Pentru a încărca bateria, veți avea nevoie de cablul USB și de adaptorul de curent electric livrate împreună cu SmartVision2. Mai întâi, utilizați cablul USB pentru a conecta telefonul SmartVision2 la adaptor, apoi conectați adaptorul la o priză de curent electric. De asemenea, puteți încărca produsul conectând cablul USB direct la calculatorul dvs.

Atenție: utilizați numai bateria, cablul USB, adaptorul și încărcătorul de perete furnizate de KAPSYS. Utilizarea unor accesorii neautorizate poate provoca daune și va anula garanția KAPSYS.

Pornirea/Oprirea telefonului

Pentru a porni SmartVision2, apăsați și țineți apăsat butonul On / Off situat pe marginea superioară. Atunci când SmartVision2 vibrează, ridicați degetul de pe buton.

În cazul în care nu pornește, verificați dacă bateria a fost instalată corect. Dacă este necesar, repetați procedura de instalare a bateriei.

Pentru a dezactiva dispozitivul, apăsați în meniu apăsat butonul On / Off pentru a afișa "Meniu Principal", apoi selectați "Opriți alimentarea" și confirmați acțiunea. SmartVision2 o scurtă vibrație în timp ce se va închide.

Ecranul "Meniu Principal" oferă, de asemenea, comenzi rapide pentru activarea serviciului "Serviciu de Accesibilitate KAPSYS", "Ecran On / Off" pentru a economisi energia bateriei, "Inversiunea culorilor" pentru a schimba contrastul colorat pentru anumite afecțiuni ale ochilor. Pentru informații suplimentare despre aceste modalități speciale, consultați capitolele "Accesibilitate".

Modul de așteptare (Standby)

Atunci când SmartVision2 este pornit, apăsați puștin tasta On / Off pentru a comuta dispozitivul în modul de așteptare sau pentru a-l trezi (adică să revină în modul de funcționare).

În modul de așteptare, ecranul este oprit, dar funcțiile rămân active. Puteți să primiți în continuare apeluri, mesaje, e-mailuri sau instrucțiuni de navigare utilizând aplicația Kaptan.

Bine de știut: dispozitivul este setat altfel încât, după un minut de inactivitate, să treacă automat în modul de așteptare pentru a economisi din energia bateriei.

Setări rapide la pornire

La prima pornire a SmartVision2, o secvență de ecrane vă permite să configurați în mod rapid smartphone-ul.

Pasul 1: Selectarea limbii

Utilizați săgețile de navigare pentru a selecta limba dvs. și apăsați tasta "OK".

Apoi o să auziți un mesaj de confirmare în limba selectată. Confirmați alegerea dvs. selectând "OK" sau selectați "Anulare" pentru a reveni la ecranul precedent.

Pasul 2: Activarea accesibilității

Selectați "OK" pentru a activa serviciul de accesibilitate KAPSYS și toate caracteristicile de vocalizare ale ecranelor.

Selectați "Anulare" pentru a porni telefonul fără accesibilitatea explicată puțin mai sus.

Pasul 3: Selectarea profilului

Utilizați săgețile pentru a selecta profilul dvs.

Blind: Setările de accesibilitate vor fi configurate astfel încât să răspundă nevoilor persoanelor oarbe.

Low Vision: setările de accesibilitate KAPSYS vor fi configurate pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu deficiențe de vedere.

După terminarea pasului 3, SmartVision2 pornește normal și apare ecranul pentru introducerea codului PIN al cartelei SIM.

Deblocarea cartelei SIM

Cartela SIM este furnizată de operatorul dvs. cu un cod de identificare format din 4 cifre numit cod PIN. Acest cod vă permite să vă protejați cartela SIM împotriva utilizării frauduloase. Pentru a debloca cartela SIM și a accesa toate funcțiile SmartVision2, introduceți codul PIN și apăsați "OK".

Din motive de confidențialitate, vocalizarea SmartVision2 atunci când introduceți codul PIN al cartelei SIM va funcționa numai cu ajutorul câștilor dvs.

Sfârșitul capitolului

Moduri de control

SmartVision2 v ofer 3 moduri de a-l controla: modul tastatur , modul tactil i modul de recunoa tere vocal .

Modul tastatur

Modul tastatur este modul principal de control al SmartVision2. V permite s naviga i prin telefon i s lansa i aplica ii utilizând ap sarea scurt i lung pe tastatur .

Pentru a v obi nui cu pozi ionarea tastelor, v rug m s consulta i capitolul "[SmartVision2 Overview](#)".

Mai jos g si i lista ac iunilor pe care le pute i face cu tastatura:

Porni i / opri i telefonul

Ac iune	Tastatur
Porni i SmartVision2	Ap sa i i ine i ap sat tasta ON/ OFF
Închide i SmartVision2	Ap sa i i ine i ap sat tasta ON/ OFF, apoi selecta i "Power off" din "Meniu Principal"

Bine de tiut: Ecranul "Meniu Principal" v ofer , de asemenea, acces direct la alte op iuni:

- Serviciul de accesibilitate Kapsys: v permite s activa i sau s dezactiva i serviciul de accesibilitate Kapsys (sintez vocal , navigare prin atingere, comenzile rapide ale tastaturii etc.)
- Screen On/Off: v permite s bloca i ecranul SmartVision2 în timpul utiliz rii pentru a economisi baterie i pentru a v proteja datele de confiden ialitate
- Color Inversion: permite inversarea culorilor ecranului. De exemplu, textul negru pe un ecran alb va deveni text alb pe un ecran negru

Modul de a teptare (standby)

Pentru a economisi bateria, SmartVision2 trece automat în modalitatea standby dup 1 minut de inactivitate. În modul de a teptare, ecranul este oprit, dar func iunile r mân active. În acest mod ve i primi în continuare apeluri, mesaje, e-mailuri etc.

Ac iune	Tastatur
Comutarea mod standby / mod de func ionare	Ap sa i scurt pe tasta ON/OFF

Bine de tiut: pute i schimba set rile referitoare la perioada de inactivitate dup care ecranul va intra automat în modul de a teptare. Aceast op iune poate fi g sit în set rile telefonului din sec iunea "Afi aj" i apoi în "Inactivitate".

Reglarea volumului

SmartVision2 face diferență între trei tipuri de volum cu posibilitatea de a defini nivelul sunetului pentru fiecare dintre ele în parte. Aceste trei categorii sunt "Tonuri de apel și notificări", "Multimedia" și "Alarmeri":

- Tonuri de apel și notificări:

Implicit, tastele de volum "plus" și "minus" din partea dreaptă a telefonului modifică direct volumul soneriei "Tonuri de apel și notificări". De asemenea, puteți modifica volumul tonurilor de apel și cel al notificărilor din "Setări", "Sunete și notificări", "Butonul setărilor dispozitivului" din profilul "General", apoi "Volumul soneriei".

- Multimedia:

Prin multimedia se înțelege totalitatea setărilor sunetelor de sintetizare a vocii, a fiierelor MP3 și a videoclipurilor. Pentru a schimba volumul profilului multimedia, utilizați tastele de volum "plus" și "minus", atunci când sintetizatorul vocal este în funcțiune sau se redă un fiier MP3.

De asemenea, puteți utiliza următoarele comenzi rapide direct din tastatură:

- Tasta diez și Creșterea volumului ("plus"): Crește volumul a traducerii din limba scrisă în limba vorbită
- Tasta diez și Scăderea volumului ("minus"): Micșorează volumul a traducerii din limba scrisă în limba vorbită

- Alarmeri:

Pentru a modifica volumul alarmelor SmartVision2, selectați "Setări", apoi "Sunete și notificări" și la urmă "Tasta setărilor dispozitivului" din profilul "General", și în final "Volumul alarmei".

Bine de știut: tastele de volum "plus" și "minus" mută de asemenea cursorul de la stânga la dreapta când este necesară ajustarea unui anumit nivel pe bara orizontală. Acesta este cazul, de exemplu, cu bara de nivel de luminozitate, bara de redare a fiierelor MP3 sau bara de reglare a volumului sonor.

Preluare / Respingere a unui apel

Acțiune	Tastatură
Respundeți la un apel primit	Apăsare scurtă tasta de preluare
Închideți un apel	Apăsare scurtă tasta de închidere

Bine de știut: o scurtă apăsare pe tasta "Preluare" permite lansarea rapidă a aplicației Telefon.

Navigați prin telefon

Utilizați pad-ul de navigare pentru a umbla prin meniurile și ecranele SmartVision2.

Acțiune	Tastatură
Întoarce i-v la elementul anterior	Apăsă scurt tasta (sgeată) Sus
Deplasa i-v spre următorul element	Apăsă scurt sgeată Jos
Trageți pagina de pe ecran înspre sus	Apăsă lung sgeată Sus
Trageți pagina de pe ecran înspre jos	Apăsă lung sgeată Jos
Deplasa i-v la primul element vizibil al ecranului	Apăsă scurt tasta Stânga
Deplasa i-v la ultimul element vizibil al ecranului	Apăsă scurt tasta Dreapta
Trecerea la o pagină în partea stângă (dacă este disponibil)	Apăsă lung tasta Stânga
Trecerea la o pagină în partea dreaptă (dacă este disponibil)	Apăsă lung tasta Dreapta
Activează / Validați un element selectat	Apăsă scurt tasta OK
Reveniți la ecranul anterior	Apăsă scurt tasta Return
Înapoi la ecranul Acasă	Apăsă scurt tasta Home
Întoarce i-v la elementul anterior	Apăsă scurt tasta (sgeată) Sus

scrieți text

Când SmartVision2 anunță "caseta de editare", înseamnă că puteți introduce un text (adică telefonul este într-un "câmp de introducere").

Tastatura alfanumeric (adică tastele de la 1 până la #) va fi utilizată pentru a introduce un număr ori un text ori unele caractere în funcție de aplicație și de fereastra de introducere a textului care a fost deschis de aceasta.

Fiecare tastă vă permite să scrieți mai multe caractere: tasta cu numărul "2" dă acces la a, b, c, 2, A (majuscul), B (majuscul), C (majuscul).

Pentru a selecta caracterul pe care vreți să îl scrieți, apăsați în mod repetat pe tasta cu numărul oportun pentru a accesa diferitele caractere asociate acestei taste.

Tasta "1" este utilizată pentru a introduce semne de punctuație și caractere speciale (@, &, +, paranteze etc.)

Tasta "0" este folosită pentru a introduce un spațiu sau pentru a trece la rândul următor.

Tasta "asterisc" este utilizată pentru a comuta tastatura între modurile "normal", "majuscule" sau "numeric".

Bine de știut: pentru a introduce un text în caseta de editare, puteți utiliza tastatura fizică și / sau tastatura virtuală.

Aspectul tastaturii virtuale se schimbă de la numeric la alfabet, pentru a se potrivi cu conținutul casetei de editare.

Pentru a deschide tastatura virtuală, apăsați lung tasta OK când este deschisă caseta de editare. Tastatura virtuală va fi afișată în jumătatea inferioară a ecranului (ca tastatură pentru calculator).

Înșirați degetul pe ecran pentru a naviga prin diferite caractere. Eliberați degetul pe caracterul pe care doriți să îl confirmați. Butonul "Simboluri" din stânga jos a tastaturii virtuale oferă acces la caractere speciale. Apăsați tasta "Înapoi" pentru a închide tastatura virtuală.

Ștergere text

Apăsați tasta "Delete" ("Ștergere") pentru a șterge ultimul caracter dintr-o casetă de editare.

Puteți apăsa și menține apăsată tasta "Delete" ("Ștergere") pentru a șterge rapid mai multe caractere.

Modificare (Editare) text

Puteți utiliza tastele de volum pentru a muta cursorul și a șterge sau a adăuga un caracter, un cuvânt sau o propoziție într-o casetă de editare.

Acțiune	Tastatură
Miscăți cursorul spre dreapta	Apăsați scurt tasta Volum +
Miscăți cursorul spre stânga	Apăsați scurt tasta Volum -

Bine de știut: SmartVision2 acceptă comenzi rapide suplimentare de la tastatură cu tasta "asterisc". Aceste comenzi rapide sunt descrise în capitolul "[Accesibilitate](#)".

Meniu

Meniul vă permite să afișați opțiuni suplimentare legate de aplicație sau de pagina afișată. De obicei, vă permite și accesul la setările aplicației sau la cele de ajutor.

Acțiune	Tastatură
Deschideți Meniul	Apăsați scurt tasta Meniu

De exemplu: apăsați tasta "Meniu" din aplicația de contact afișată următoarele opțiuni generale: alegerea contactelor de afișat, importat / exportat, alegerea conturilor, setări, șterge toate contactele, ajutor.

Meniul contextual

Meniul contextual oferă opțiuni specifice suplimentare legate de elementul selectat. De obicei, vă permite să ștergeți, să editați, să salvați un element selectat.

Acțiune	Tastatură
Deschideți meniul contextual al elementului selectat	Apăsați lung tasta "OK"

De exemplu: dacă selectați un contact și apăsați și mențineți apăsat pe OK pentru a deschide meniul contextual, acesta va afișa următoarele opțiuni specifice: adăugați contactul la favorite, eliminați contactul, editați contactul, partajați contactul, adăugați contactul pe

Ecranul de start.

Meniu context global

Meniul context global oferă acces rapid la câteva setări de accesibilitate.

Acțiune	Tastatur
Deschideți meniul context global	Apăsăți lung tasta "Meniu"

Pentru mai multe informații despre acest meniu, consultați capitolul "[Accesibilitate](#)".

Task Manager (Managerul de activități)

Task Manager-ul vă permite să vizualizați toate aplicațiile deschise în fundal pe SmartVision2. Din acest ecran, puteți reveni la o aplicație deschisă, puteți obține informații despre o aplicație deschisă sau puteți închide o aplicație deschisă.

Acțiune	Tastatur
Deschideți task manager	Apăsăți lung tasta "Acasă" (Home)

Bine de știut: pentru a economisi energia bateriei, puteți închide toate aplicațiile deschise în fundal. Pentru a face această operațiune, apăsați tasta "Meniu" atunci când managerul de activități este deschis și apoi selectați "Închideți toate aplicațiile" din listă.

Bara de notificare

Notificările sunt folosite pentru a informa utilizatorul despre un eveniment, un mesaj nou, un apel pierdut, o întâlnire în calendar etc.

Toate notificările de pe telefon sunt disponibile în bara de notificare.

Acțiune	Tastatur
Deschideți bara de notificare	Apăsăți lung tasta "return"

Pentru mai multe informații, consultați capitolul "[Bara de notificare](#)".

Bine de știut: SmartVision2 acceptă comenzi rapide suplimentare de la tastatură cu tasta "diez". Aceste comenzi rapide sunt descrise în capitolul "[Accesibilitate](#)".

Modul touchscreen (ecran tactil)

Modul touchscreen este modul secundar de control al SmartVision2. Acesta vă permite să navigați prin diferite meniuri atingând direct ecranul cu vârful degetelor.

Serviciul de accesibilitate Kapsys, care este activat automat cu SmartVision2, modifică comportamentul ecranului tactil pentru a-l adapta mai bine la nevoile persoanelor cu deficiențe de vedere.

Mai jos găsiți lista diferitelor acțiuni pe care le puteți face de pe ecranul tactil, când serviciul de accesibilitate Kapsys este activat:

Acțiune	Tastatur
Mișcați-vă pe ecran și selectați un element	Atingeți ecranul cu un singur deget

Întoarce i-v la elementul anterior	Glisa i spre stânga cu un deget
Deplasa i-v la elementul următor	Glisa i spre dreapta cu un deget
Trage i o pagină înspre sus, deplasa i cursorul spre dreapta	Glisa i spre dreapta, apoi la stânga cu un deget
Trage i o pagină în jos, deplasa i cursorul spre stânga	Glisa i spre stânga, apoi spre dreapta cu un singur deget
Deplasa i-v la primul element vizibil al ecranului	Glisa i în sus și în jos cu un deget
Deplasa i-v la ultimul element vizibil al ecranului	Glisa i în jos și în sus cu un deget
Trecerea la o pagină din partea stângă (dacă este disponibil)	Glisa i spre stânga cu două degete
Deplasa i-v la o pagină din partea dreaptă (dacă este disponibil)	Glisa i spre dreapta cu două degete
Activează / Validați elementul selectat	Apăsăți rapid de două ori cu un singur deget
Deschideți meniul contextual al elementului selectat	Apăsăți rapid de două ori cu un singur deget iar după a doua oară rămâneți cu degetul pe ecran
Întoarce i-v la ecranul de pornire	Glisa i în sus, apoi spre stânga cu un deget
Deschideți task manager-ul	Glisa i spre stânga, apoi în sus cu un singur deget
Reveniți la ecranul anterior	Glisa i în jos, apoi la stânga cu un deget
Deschideți bara de notificare	Glisa i de sus în jos cu două degete
Deschideți meniul Accesibilitate global	Glisa i în jos, apoi spre dreapta cu un deget
Deschideți meniul Accesibilitate local	Glisa i în sus, apoi spre dreapta cu un deget
Mi căre vertical progresiv a ecranului	Atingeți sus sau jos cu două degete

Bine de știut: Ecranul tactil poate fi dezactivat în setările de accesibilitate.

Modul prin recunoaștere vocală

Ultimul mod de control al SmartVision2 folosește recunoașterea vocii. Vă permite să dictați un text, să efectuați căutări pe Internet sau să lansați anumite funcții.

SmartVision2 utilizează Recunoașterea Vocii de la Google, prin urmare este necesară o conexiune la internet pentru a putea folosi această funcție. De asemenea, este recomandat să utilizați o adresă Gmail pentru a profita de toate funcțiile disponibile legate de comanda vocală. Pentru a utiliza acest serviciu, apăsați scurt pe butonul de recunoaștere a vocii situat în partea dreaptă a dispozitivului SmartVision2 și dictați în mod clar comanda pe care doriți să o execute telefonul.

Iată câteva exemple de acțiuni pe care le puteți face datorită modului de control prin recunoașterea vocii:

- Calendar, alarme, mementouri și informații
 - Setați o alarmă: "Setați o alarmă pentru 7 AM" sau "Setați o alarmă pentru fiecare vineri dimineața la ora 7 AM".
 - Setați un memento: "Aminte-te-mi să-l sun pe Ion la 6 dimineața" sau "Aminte-te-mi să cumpăr ciocolată belgiană la Piața Unirii".

- Vedeți mesajele SMS (în formă de text): "Arată-mi mesajele de la Petre despre cin".
- Creați un eveniment Google Calendar: "Creați un eveniment calendaristic pentru cin în Brașov, sâmbătă la ora 19:00."
- Comunicați cu prietenii și familia
 - Suna-i-v un prieten: "Sună George Popescu" sau "Sună Mama".
 - Trimiteți mesaje unui prieten: "Trimiteți mesaj la Jason că mergem la besc dar o să întârzi 5 minute."
 - Trimiteți un e-mail: "Trimiteți un e-mail Cristinei, subiect pantofi noi, mesaj, abia aștept să îmi arăt pantofii mei noi, punct."
- Faptele și răspunsuri rapide
 - Aflați cât e ceasul: "Cât este ceasul la Londra?"
 - Verificați vremea: "Am nevoie de un sacou azi?" sau "Cum o să fie vremea mâine dimineață?"
 - Traduceți cuvinte sau expresii: "Cum le zice la castraveți în spaniol?"
 - Căutați definiția unui cuvânt: "Ce înseamnă comia?"
 - Converteți între unități de măsură diferite: "Cât sunt 16 euro în lire sterline?"
 - Rezolvați o problemă de matematică: "Care este valoarea lui radical din 2209?"

Lista completă a acțiunilor pe care le puteți face datorită recunoașterii vocale este disponibilă în rubrica [Google support](#) sau prin dictarea cuvintelor cheie "OK Google".

Bine de știut: dacă trebuie să introduceți un text, butonul de recunoaștere a vocii vă permite să dictați cu vocea textul care va fi scris pe ecran. Apăsăți scurt pe butonul de recunoaștere a vocii, situat în partea dreaptă a SmartVision2, așteptați bip-ul și dictați. Odată ce ați terminat dictarea, textul dvs. va fi transcris automat acolo unde doriți să-l scrieți.

Sfârșitul capitolului

Accesibilitate

Setări

SmartVision2 este dotat cu multe setări de accesibilitate care sunt activate în mod implicit pe produs, cum ar fi modificările la viteza vocii, dimensiunile caracterelor sau comenzile rapide de la tastatură.

Pentru a modifica setările de accesibilitate, selectați mai întâi "Setări" apoi "Accesibilitate".

Setările de accesibilitate sunt:

- **Serviciul de accesibilitate Kapsys:** vă ajută să oferiți feedback sonor persoanelor cu deficiențe de vedere și celor nevăzători. Urmărirea secțiune descrie diferiții parametri ai serviciului de accesibilitate Kapsys.

Bine de știut: Puteți suspenda oricând serviciul de accesibilitate Kapsys prin apăsarea lungă a tastelor "Volum +" și "Volum -". Pentru a reactiva serviciul repetați încă o dată aceeași comandă (adică apăsarea tastelor "Volum +" și "Volum -" pentru o perioadă îndelungată).

- **BrailleBack:** vă permite să conectați un ecran braille la SmartVision2 prin Bluetooth.
- **Acces prin Comutare:** vă permite să controlați dispozitivul utilizând combinații de taste pe care le puteți configura în mod personalizat. Această setare este folosită în special pentru persoanele cu dizabilități motorii, care doresc să asocieze anumite acțiuni anumitor butoane sau să utilizeze o tastatură externă.
- **Subtitriri:** permite activarea subtitrurilor pe dispozitiv și setarea opțiunilor de limbă, text și stil.
- **Gesturi de mînire:** permite mînirea, micșorarea sau lărgirea ecranului SmartVision2 apăsând rapid de trei ori oriunde pe ecran. Puteți să reglați nivelul de zoom și urmăriți aceste comenzi:

- Pentru a vă mișca pe ecran, trageți-l în direcția dorită cu două sau mai multe degete
- Pentru a ajusta nivelul de mînire, îndepărtați două degete pornind cu ele apropiate pe ecran pentru a mari nivelul de zoom sau procedați invers pentru a-l micșora

Pentru a mîni temporar ecranul:

- Apăsăți rapid de trei ori oriunde pe ecran (cu excepția tastaturii sau a barei de navigare) și țineți apăsat după a treia oară

- Pentru a muta zona marit , muta i degetul pe ecran în direc ia dorit
- Pentru a mic ora ecranul la loc, ridica i degetul
- **M rimea caracterelor (Font Size)** : permite ajustarea dimensiunii fontului (adic caracterelor) la nivelul potrivit ochilor dvs. Sunt disponibile 7 dimensiuni diferite.
- **Text cu contrast ridicat:** cu m rimea contrastului textul devine mai u or de citit pe dispozitiv. Aceast op iune stabile te culoarea textului, alegând între negru sau alb, în func ie de culoarea original a textului.
- **Butonul de pornire închide:** când aceast setare este activat , pute i ap sa pur i simplu tasta de alimentare a dispozitivului pentru a termina un apel. Aceast setare poate u ura închiderea apelurilor.
- **R spunde i la apeluri cu tastele 0-9:** v permite s r spunde i la un apel primit ap sând orice tast numeric de pe tastatur .
- **Rotire automat a ecranului:** când aceast op iune este activat , ecranul se rote te automat atunci când mi ca i telefonul din vertical în orizontal (sau invers).
- **Dicteaz parola:** aceast setare controleaz feedbackul vocal pe m sur ce introduce i parole.
 - Dacă op iunea este activat : caracterele parolelor sunt pronun ate de către telefon la fel ca orice alt tip de caractere.
 - Dacă este dezactivat : caracterele parolelor pot fi auzite numai dac prin intermediul unei perechi de c sti. Pentru a proteja parolele dvs., aceast setare nu este activ în mod implicit.
- **Comand rapid pentru accesibilitate:** permite activarea sau dezactivarea accesibilit ii în mod rapid.
- **Traducere din limba scris în limba vocal :** v permite s alege i sinteza vocii a SmartVision2:
 - Kapsys Voices: v permite s selecta i un pachet de sintez sau s desc rca i alt pachet premium prin intermediul unei conexiuni la Internet.
 - Multilingv: permite asocierea a maximum 3 limbi cu comenzi rapide de la tastatur pentru a schimba limbajul sintezei vocale în timp real.

De asemenea, pute i activa i seta un alt sintetizator de voce desc rcat din Magazin Play.
- **Diferen a dintre atingerea scurt i lung :** aceast setare ajusteaz timpul dup care ap sarea scurt (pe ecran) este considerat lung . Dacă seta i un timp mai lung înseamn c va trebui s îne i degetul ap sat pe ecan mai mult timp pentru a activa comenzile care necesit o ap sare lung . Dacă observa i c vi se întâmpl s îne i prea mult timp degetul pe ecran în mod accidental când

intentionați doar să tastați doar pentru o perioadă mai scurtă, luați în considerare mărirea diferenței pe care o setați.

- **Iluminarea tastaturii:** vă permite să activați sau să dezactivați iluminarea tastaturii.
- **Inversarea culorilor:** această opțiune inversează culorile de pe ecran. De exemplu, textul negru pe un ecran alb devine text alb pe un ecran negru.
- **Corectarea culorilor:** setarea de corectare a culorilor permite dispozitivului să compenseze posibile probleme cauzate de daltonism.

Kapsys Accessibility Service – Serviciul de Accesibilitate KAPSYS

Când serviciul de accesibilitate Kapsys este activat, SmartVision2 vă oferă feedback vocal astfel încât o persoană cu deficiențe de vedere să poată utiliza dispozitivul fără să privească ecranul.

Pentru a activa sau dezactiva serviciul de accesibilitate Kapsys, apăsați butonul "ON / OFF", apoi selectați "Serviciul de accesibilitate Kapsys".

Pentru a suspenda sau pentru a relua temporar serviciul de accesibilitate Kapsys, apăsați simultan butoanele Volum + și Volum - .

Pentru a modifica parametrii serviciului de accesibilitate Kapsys, selectați "Setări" apoi "Accesibilitate" apoi "Serviciul de Accesibilitate KAPSYS" și la urmă apăsați tasta "Meniu" Android.

Următoarea listă oferă o panoramă asupra setărilor Serviciului de Accesibilitate Kapsys:

- **Cititor de ecran:** activează sau dezactivează traducerea din limba scrisă în limba vocală .
- **Volumul dictării:** vă permite să setați volumul cu care o să vă răspundă telefonul astfel încât să fie ori același ori mai mic față de volumul media. Media celor două opțiuni este volumul celorlalte sunete de pe dispozitiv.
- **Utilizați schimbarea tonului de voce:** schimbă tonul de voce pentru feedback-ul tastaturii. Dacă bifați această opțiune, feedback-ul vocal al tastaturii va fi setat la un ton mai jos.
- **Modificatorul ecoului:** definește dacă traducerea din limba scrisă în limba vocală va anunța caractere, cuvinte sau propoziții.
- **Vibrație după introducerea caracterelor:** telefonul va vibra de fiecare dată când o să introducă un caracter.
- **Bip după introducerea caracterelor:** telefonul va emite un bip (adică un semnal sonor) de fiecare dată când o să introducă un caracter.
- **Întârziere a timpului de validare la introducerea unui caracter:** definește după

cât timp un caracter introdus într-un câmp de introducere va fi validat (adică cât timp va apărea teșta telefonului după ce vorbiți pentru a transcrie ce auziți).

- **Vorbirea când ecranul este închis:** dacă această opțiune este bifată, telefonul va vocaliza notificările chiar și sunt atunci când ecranul este oprit.
- **Utilizarea senzorului de proximitate:** când este bifată, permite să se oprească temporar traducerea din limba vocală în limba scrisă în funcție de informațiile senzorului de proximitate.
- **Anunțarea elementelor vizibile afișate pe ecran:** anunțarea care sunt elementele vizibile afișate pe ecran (ex: afișează elementele de la 1 la 6 din 12).
- **Agitarea pentru a începe citirea fără întrerupere:** când este activată, dacă agitați dispozitivul, acesta va citi fără întrerupere ce este afișat.
- **Vorbirea prin alfabetul fonetic:** folosirea acestei opțiuni vă permite să auziți dictarea normală a literelor, imediat după, echivalentul lor în alfabetul fonetic (cum ar fi "F, Florea" sau "S, Sandu") atunci când apăsați și apăsați o teșta de pe tastatura virtuală a ecranului tactil.
- **Vocalizarea sugestiilor de utilizare:** când este bifată, puteți auzi sugestiile de utilizare atunci când navigați printre elementele ecranului, după o scurtă întârziere.
- **Vocalizarea identității apelantului:** când primiți un apel, telefonul citește identitatea apelantului.
- **Feedback prin vibrații:** vă permite să obțineți feedback prin vibrații (adică telefonul va vibra) la acțiunile dvs., cum ar fi atunci când selectați un obiect sau navigați pe dispozitiv.
- **Feedback sonor:** când este bifată, această opțiune vă permite să obțineți un feedback sonor, pe lângă citirea acțiunilor, pe măsură ce navigați prin telefon.
- **Focalizare pe sunetul vorbelor:** vă permite să micșorați volumul celorlalte surse audio atunci când vorbiți (adică dictați) cu telefonul.
- **Volum sonor:** această opțiune controlează volumul sonor al transcrierii vocale și al altor sunete create de Kapsys Accessibility Service. Această opțiune este disponibilă atunci când este activat feedback-ul sonor.
- **Urarea navigației prin atingere:** această opțiune vă permite să auziți ce este sub degetul dvs. atunci când atingeți ecranul și activează gesturile de scurtă durată (echivalentul tastelor rapide, dar pentru modalitatea ecran tactil).

- **Dezactiva i ecranul tactil:** când este bifat , ecranul tactil este dezactivat.
- **Derularea automat a listelor:** când sunt bifate, listele defilează în timpul navigării normale pe telefon.
- **Selectare printr-o singură atingere:** atingeți elementul selectat o singură dată pentru a valida acțiunea pe care doriți să o faceți cu elementul respectiv.
- **Afișarea meniurilor contextuale în formă de liste:** folosiți această setare pentru a afișa meniurile de context globale și locale în formă de liste.
- **Lansați tutorial-ul de navigare prin touch (atingere):** vă oferă oportunitatea de a vedea un tutorial privind navigarea prin atingere.
- **Comenzi rapide de la tastatură :** permite gestionarea comenzilor rapide ale tastaturii SmartVision2.
- **Comenzi rapide de la tastaturi externe:** permite gestionarea comenzilor rapide de la o tastatură externă .
- **Gestionați etichetele personalizate:** utilizați această setare pentru a gestiona etichetele personalizate pe care le-ați creat folosind meniul contextual local.
- **MagniText:** când este activat , această caracteristică afișează în mare textul focalizat într-un banner (pancard) derulant pe ecran. Dimensiunea, culoarea, viteza și poziția bannerului sunt personalizabile.
- **Black screen (Ecran negru):** această opțiune vă permite să comutați telefonul în modul ecran negru pentru a economisi bateria și a proteja datele personale.
- **Oprirea suspendării:** această opțiune vă permite să alegeți modul în care serviciul de accesibilitate Kapsys va reporni după ce l-ați suspendat prin meniul contextual global.
- **Discursul de trezire:** puteți configura ce informații doriți să auziți atunci când telefonul se trezește din modul de așteptare (vocalizarea orei, datei, nivelul bateriei, starea rețelei, notificările apelurilor pierdute, mesajele noi și e-mailurile noi).
- **Gestionați setările de accesibilitate:** această opțiune vă permite să salvați, să importați sau să distribuiți profilurile de accesibilitate.

Meniurile contextelor de accesibilitate

În timp ce navigați prin SmartVision2, două meniuri de context vor fi disponibile pentru a v

ajuta să găsească și să seteze controale. Meniul de context global conține comenzi care funcționează independent de unde vă aflați prin telefon, iar meniul contextual local variază în funcție de elementul focalizat.

Meniul contextual global

Pentru a vizualiza meniul contextual global, apăsați tasta "Meniu".

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când activați meniul contextual global:

- Citire pornind de sus: auziți o citire a tuturor elementelor de pe ecran, începând cu cele din partea de sus.
- Repetă ultimul cuvânt: auziți încă o dată ultima verbalizare.
- Dictarea literă cu literă (spelling) ultimului cuvânt: auziți spelling-ul ultimului cuvânt pe care l-ați introdus cu metoda vocală.
- Citire pornind de la elementul următor: auziți vocalizarea tuturor elementelor de pe ecran, începând cu ultimul element pe care l-ați selectat.
- Întrerupeți feedback-ul: selectarea acestei opțiuni suspendă serviciul de accesibilitate Kapsys, inclusiv notificările "Explorarea prin atingere".

Notă: serviciul de accesibilitate Kapsys se reia fie atunci când ecranul se aprinde, atunci când se află blocarea lui, fie din bara de notificări, în funcție de setarea dvs. A opțiunii "Reluați din suspendare". Puteți modifica această preferință în setările Serviciului de Accesibilitate Kapsys.

- Setările Serviciului de Accesibilitate Kapsys: selectarea acestei opțiuni deschide ecranul setărilor pentru serviciul de accesibilitate Kapsys.
- Setări pentru traducerea text-to-speech (din limba scrisă în limba vorbită): selectați această opțiune pentru a modifica setările de text-to-speech.

Meniul contextual local

Pentru a vizualiza meniul contextual (sau "de context") local, utilizați combinația tastei diez (apăsați și apăsați tasta diez) și "9".

Meniul de context local conține comenzi care se referă la elementul selectat. Dacă nu există opțiuni relevante relative acelui element, serviciul de accesibilitate Kapsys anunță "Nu există elemente de meniu".

Când deschideți meniul contextual local, acesta vă oferă opțiuni relevante pentru contextul folosirii telefonului în care vă aflați. Opțiunile pot include următoarele:

- Opțiuni de navigare: implicit, caractere, cuvinte, paragrafe, rânduri și pagini.

- Meniu de control al cursorului: când editați text, această opțiune deschide un nou meniu contextual local cu opțiuni precum "Mut cursorul la început", "Mut cursorul la sfârșit", "Selectează toate" și "Pornește modul de selectare". Dacă este selectat o porțiune de text, opțiunile pot include și modurile de decupare, copiere, lipire (cut, copy, paste) și terminare. Pentru a deplasa cursorul în timp ce vă aflați într-o fereastră de introducere a textului, puteți și să vă folosiți de tastele de volum.
- Controlul etichetelor: acest meniu vă permite să adăugați, să eliminați și să modificați etichete personalizate pentru ce este încă netichetat. Uneori, aplicațiile nu conțin etichete pe icoanele lor de prezentare. Puteți utiliza Serviciul de Accesibilitate Kapsys pentru a vă crea propriile etichete pentru imagini, pentru a facilita identificarea acestora în viitor. Puteți gestiona etichetele personalizate din setarea "Gestionați etichetele personalizate" în setările Serviciului de Accesibilitate Kapsys.

Comenzi rapide din tastatură

Prin opțiunile Serviciului de Accesibilitate Kapsys, aveți posibilitatea să atribuiți până la 32 de comenzi rapide de la tastatură pentru anumite acțiuni predefinite.

Comenzile rapide de la tastatură sunt toate activate prin combinații ale tastelor "asterisc" sau "diez" (inându-le apăsat) și "0" - "9", săgeată în sus, săgeată în jos, săgeată la stânga, săgeată la dreapta, volum +, volum -.

Lista acțiunilor care pot fi asociate unei comenzi rapide de la tastatură sunt:

- Afliți statusul lui SmartVision2
- Deschideți bara de notificare
- Deschideți pagina "Setări rapide" din bara de notificare
- Modificați viteza traducerii din limba scrisă în limba vorbită
- Reduceți viteza traducerii din limba scrisă în limba vorbită
- Modificați limba traducerii din limba scrisă în limba vorbită
- Citire de la începutul ecranului
- Citire de la elementul următor
- Schimbarea nivelului de precizie
- Creați nivelul de precizie
- Repetarea ultimului element al traducerii din limba scrisă în limba vorbită
- Vocalizarea (repetarea) literă cu literă al ultimului element al traducerii din limba scrisă în limba vorbită
- Întrerupeți / Reluați traducerea din limba scrisă în limba vorbită
- Setările de accesibilitate Kapsys
- Setările traducerii din limba scrisă în limba vorbită
- Selectează toate

- Cut (Decupare)
- Copy (Copiere)
- Paste (Lipire)
- Mutați cursorul în partea stângă a ferestrei de introducere a textului
- Mutați cursorul în partea dreaptă a ferestrei de introducere a textului
- Mutați cursorul la începutul ferestrei de introducere a textului
- Mutați cursorul la sfârșitul ferestrei de introducere a textului
- Selectați un caracter din stânga cursorului
- Selectați un caracter din dreapta cursorului
- Măriți volumul de traducere din limba scrisă în limba vorbită
- Reduceți volumul de traducere din limba scrisă în limba vorbită
- Activați / dezactivați modul MagniText
- Activați / dezactivați modul “Gesturi pentru mărire”
- Meniu de accesibilitate global Kapsys
- Meniu de accesibilitate local Kapsys
- Comutați ieșirea audio între modulele receptor și difuzor
- Activați / dezactivați vocalizarea
- Activați / dezactivați iluminarea de fundal a ecranului
- Activați / dezactivați panoul tactil
- Activare / dezactivare Bluetooth
- Activare / dezactivare Wi-Fi
- Activare / dezactivare localizare GPS
- Activare / dezactivare modul avion
- Activare / dezactivare lanterna telefonului
- Deschideți lista comenzilor rapide
- Setați ecoul (vocalizarea) Editorului în modul: Niciuna
- Setați ecoul Editorului în modul: Caractere
- Setați ecoul Editorului în modul: Cuvinte
- Setați ecoul Editorului în modul: Propoziții
- Setați ecoul Editorului în modul: Caractere și Cuvinte
- Setați ecoul Editorului în modul: Caractere, Cuvinte și Propoziții
- Comutați profilul audio la modul: Normal
- Comutați profilul audio la modul: Silențios
- Comutați profilul audio la modul: Întâlnire

- Comuta i profilul audio la modul: Afar
- Activare/dezactivare modul de inversare a culorilor
- Schimba i vocea cu care este rostit textul introdus in c su a de editare
- Activare/dezactivare utilizarea datelor mobile

Set rile din fabric prev d ca unele comenzi rapide s fie deja predefinite pe SmartVision2. Aceste comenzi rapide sunt organizate în dou categorii:

- Comenzile rapide legate de Accesibilitate sunt asociate tastei "diez"
- Comenzile rapide legate de Editare (de exemplu Editarea textului) sunt asociate tastei "stea".

Aceste comenzi rapide pot fi modificate prin intermediul elementului "Comenzi rapide din tastatur " din Serviciul de Accesibilitate Kapsys.

Comenzile rapide legate de Accesibilitate asociate tastei "diez (#)"

- Diez i tasta 0: Set rile serviciului de accesibilitate Kapsys
- Diez i tasta 1: Ob ine i statutul lui SmartVision2
- Diez i tasta 2: Citire de la începutul ecranului
- Diez i tasta 3: Deschide i pagina "Set ri rapide" din bara de notificare
- Diez i tasta 4: Reduce i viteza traducerii din limba scris în limba vorbit
- Diez i tasta 5: M ri i viteza traducerii din limba scris în limba vorbit
- Diez i tasta 6: Activare / Dezactivare mod MagniText
- Diez i tasta 7: Repetarea ultimului element al traducerii din limba scris în limba vorbit
- Diez i tasta 8: Vocalizarea (repetarea) liter cu liter al ultimului element al traducerii din limba scris în limba vorbit
- Diez i tasta 9: Meniu de accesibilitate local Kapsys
- Diez i tasta s ge ii in Sus: Nealocat
- Diez i s geata Jos: Nealocat
- Diez i s geata la Stânga: Nealocat
- Diez i s geata la Dreapta: Nealocat
- Diez i Volum +: M re te volumul de traducere din limba scris în limba vorbit
- Diez i Volum -: Reduce volumul de traducere din limba scris în limba vorbit

Comenzile rapide egate de Editare asociate tastei "asterisc (*)"

- Asterisc i 0: Selectează toate

- Asterisc i 1: Scade nivelul de precizie
- Asterisc i 2: M re te nivelul de precizie
- Asterisc i 3: Decupare (Cut)
- Asterisc i 4: Nealocat
- Asterisc i 5: Nealocat
- Asterisc i 6: Copiere (Copy)
- Asterisc i 7: Nealocat
- Asterisc i 8: Nealocat
- Asterisc i 9: Lipire (Paste)
- Tasta s ge ii in Sus: Muta i cursorul la începutul ferestrei de introducere
- S geata Jos: Muta i cursorul la sfâr itul ferestrei de introducere
- S geata la Stânga: Muta i cursorul în partea stâng a ferestrei de introducere
- S geata la Dreapta: Muta i cursorul în partea dreapt a ferestrei de introducere
- Volum +: Selecta i un caracter din stânga cursorului
- Volum -: Selecta i un caracter din dreapta cursorului

Bine de tiut: tastele de volum + i - v permit s muta i cursorul de la stânga la dreapta când v afla i într-o zona de editare sau inserare a textului, în func ie de nivelul de precizie pe care l-a i predefinit cu comenzile rapide asterisc-1 i asterisc-2.

Nivelurile de precizie disponibile sunt: implicite, caractere, cuvinte, rând, paragraf, pagin .

Sfâr itul capitolului

Ecranul de Start

Ecranul de Start este ecranul principal al SmartVision2. Acest ecran funcționează la fel ca un meniu de pornire de la care puteți activa funcțiile și aplicațiile telefonului smartphone.

Pentru a reveni la ecranul inițial în orice moment, apăsați butonul "Acasă" al SmartVision2.

În mod implicit, pe ecranul dvs. de pornire SmartVision2 sunt disponibile 4 aplicații:

- **Aplicații** : pentru a accesa lista în ordine alfabetică a tuturor aplicațiilor disponibile în SmartVision2.
- **Telefon** : pentru a efectua un apel, a verifica apelurile pierdute și a accesa mesageria vocală.
- **Mesaje** : pentru a trimite și a citi SMS-uri sau MMS-uri (MMS-urile sunt mesaje care conțin cu un atașament, de exemplu o imagine, un video, ...).
- **Contacte** : pentru a gestiona și a crea contacte

Opțiuni suplimentare sunt disponibile pe ecranul Acasă prin butonul "Meniu"

- **Setări** : pentru a accesa setările smartphone-ului.
- **Adăuga o aplicație** : pentru a adăuga în mod rapid o aplicație pe ecranul de Start.
- **Adăuga un widget** : pentru a adăuga un widget în ecranul Acasă. Widget-urile sunt mici aplicații care oferă informații și acces rapid de la ecranul de start la funcțiuni specifice a unor aplicații. Widgeturile pot fi descărcate din magazinul online numit "[Magazin Play](#)".
- **Imagini de fundal** : pentru a personaliza imaginea de fundal a ecranului principal
- **Ajutor** : pentru a accesa manualul de utilizare a SmartVision2

Personalizați ecranul inițial

Ecranul de start SmartVision2 este personalizabil în întregime. Puteți să adăugați aplicații sau widget-uri, să rearanjați ordinea în care elementele sunt poziționate sau chiar să le eliminați din ecranul de start.

Adăugați o aplicație la ecranul de Start

Apăsați pe tasta "Meniu" din ecranul inițial și selectați "Adăuga o aplicație" din lista care o să vă apară. Apoi selectați aplicația pe care doriți să o adăugați la ecranul de pornire.

De asemenea, puteți adăuga o aplicație pe ecranul Acasă din "Aplicații". În acest caz, selectați aplicația pe care doriți să o adăugați la ecranul de Start din lista aplicațiilor și apăsați lung tasta "OK". Selectați "Adăuga la ecranul inițial" din meniul contextual. Aplicația este disponibilă acum la ultima poziție a ecranului inițial setat pentru acces rapid.

Eliminați o aplicație din ecranul de Start

Selectați aplicația pe care doriți să o eliminați din ecranul de întâmpinare, apăsați lung

"OK".

Selectați "Eliminare din ecranul inițial" din meniul contextual. Aplicația este eliminată acum din ecranul de pornire, dar este încă disponibilă din "Aplicații".

Mutați o aplicație pe ecranul inițial

Din ecranul de start, selectați aplicația pe care doriți să o mutați, apăsați și mențineți apăsată tasta "OK".

Apoi selectați acțiunea pe care doriți să o faceți din meniul contextual: mutați în sus, mutați în jos, mutați în sus de tot, mutați în jos de tot.

Bine de știut: dacă o aplicație este plasată pe ecranul de Start pentru a putea accesa rapid la ea, în partea stângă sus a pictogramei aplicației va apărea o stea galbenă.

Sfârșitul capitoului

Aplica ii

Toate aplica iile instalate pe SmartVision2 sunt disponibile din ecranul de Start prin intermediul pictogramei "Aplica ii". Aplica iile sunt prezentate în form de list în ordine alfabetic .

Pentru a deschide o aplica ie

Selecta i din list aplica ia pe care dori i s o deschide i i ap sa i tasta "OK".

Pentru a închide o aplica ie

Ap sa i butonul "Înapoi" atunci când v afla i pe prima pagin a aplica iei.

Dac p r si i aplica ia prin intermediul butonului "Acas " sau sunte i redirec ionat c tre o alt func ie a telefonului, aplica ia va continua s ruleze în fundal.

Bine de tiut: pute i vizualiza aplica iile care ruleaz în fundal prin ap sarea lung a butonului "Acas ".

Din acest ecran, pute i:

- Închide o aplica ie
- S reveni i la o aplica ie deja deschis
- S accesa i rapid bara de c utare Google

Pentru a optimiza func ionarea a SmartVision2 atunci când acesta este in modul de a teptare (standby), v sf tuim s închide i periodic aplica iile care ruleaz în fundal pe care nu le utiliza i.

Repornirea telefonului permite, de asemenea, închiderea tuturor aplica iilor care ruleaz în fundal.

Pentru a c uta o aplica ie

Utiliza i tastatura fizic pentru a tasta scrie primele litere a numelui aplica iei. Lista de aplica ii este apoi filtrat în func ie de fiecare liter pe care o s-o introduce i. Pute i c uta aplica ia dorit în orice moment deruland lista de rezultate care v apare utilizând s ge ile de navigare.

Pentru a terge un caracter dintre cele introduse, ap sa i " tergere"

Pentru a desc rca o aplica ie

SmartFusion2 vine cu un set de aplica ii preinstalate. Pe lâng aceste aplica ii, ve i putea desc rca aplica ii noi prin intermediul aplica iei "[Magazin Play](#)".

Pentru a terge o aplica ie

Selecta i aplica ia dorit din list i ap sa i lung pe tasta "OK".

Selecta i "Dezinstalare" din meniul contextual.

Bine de tiut: Aplica iile preinstalate SmartVision2 nu pot fi eliminate.

Sfârșitul capitolului

Notificări

Notificările sunt folosite pentru a informa utilizatorul despre un eveniment, cum ar fi sosirea unui mesaj nou, a unui apel pierdut sau ora unei întâlniri.

Toate notificările de pe telefon sunt grupate în bara (panoul) de notificări. Pentru a deschide panoul de notificări, apăsați tasta "Înapoi".

Gestionați notificările

Cum să vedeți notificările:

Când ecranul de notificări este deschis, utilizați pad-ul de navigare pentru a selecta un eveniment. Apăsați apoi tasta "OK" pentru a deschide notificarea și pentru a fi redirecționat către aplicația care vă transmite aceeași notificare.

De exemplu: dacă vedeți o notificare a unui apel pierdut, veți fi redirecționat automat la aplicația Istoric Apeluri.

Odată deschisă aplicația, notificarea dispare din bara de notificare.

Bine de știut: notificările legate de erori vor putea fi terse numai după rezolvarea problemei.

Tergeți o notificare:

Deschideți bara de notificare și selectați notificarea pe care doriți să o tergeți. Apăsați tasta "tergere" pentru a elimina notificarea selectată.

De asemenea, puteți terge simultan toate notificările selectând "tergeți toate notificările" din partea de jos a listei.

Bine de știut: Bara de notificare afișează numai un număr limitat de evenimente. Uneori este necesar să utilizați ecranul tactil pentru a vedea toate notificările de pe listă.

În acest caz, apăsați cu două degete pe ecran și glisați în sus în timp ce apăsați tasta "Înapoi". Utilizați din nou joystick-ul de navigare pentru a vă mișca prin noile notificări.

Setări rapide

Pentru a accesa ecranul "Setări rapide" din SmartVision2, selectați primul element din bara de notificare, care oferă informații despre starea telefonului (ora, data, nivelul de recepție Wi-Fi, nivelul bateriei) și apăsați butonul "OK".

De altfel, puteți deschide ecranul de Setări rapide folosindu-vă de comanda rapidă din tastatură (apăsând deodată tastele "#" și "3").

Acest ecran permite accesul rapid la următorii parametri:

- Baterie: permite accesarea setărilor de gestionare a bateriei
- Setări: permite accesul la setările generale SmartVision2
- Afișarea profilului: permite accesul la profilul utilizatorului
- Luminozitatea ecranului: reglează luminozitatea ecranului
- Wi-Fi: Activează, dezactivează recepția semnalului Wi-Fi și permite conectarea telefonului la o rețea Wi-Fi
- Bluetooth: Activează, dezactivează și se conectează la un dispozitiv Bluetooth
- Modul "Nu deranja-i": permite activarea sau dezactivarea modului "Nu deranja-i"
- Consumul de date: permite accesul la setările pentru consumul de date
- Conexiune de date: permite sau dezactivează conexiunea datelor
- Modul avion: v permite să activezi sau să dezactivezi modul avion
- Rotire automată a ecranului: v permite să blocați ecranul în poziția lui normal (vertical)
- Lanterna: activează LED-urile din spate
- Localizare: permite activarea sau dezactivează serviciilor de localizare Google
- Streaming: v permite să proiectați imaginea de pe ecranul SmartVision2 pe un televizor
- Profilul audio: v permite să alegeți profilul audio al SmartVision2 (mod normal, silențios, întâlnire, în aer liber)

Sfârșitul capitoului

Agend (Contacte)

Aplicația funcționează ca o agendă telefonică în care sunt grupate toate contactele dvs.

Creați un contact

Selectați "Creați o intrare nouă în Agendă" din ecranul principal al aplicației. Apare ecranul intitulat "Adăugați contact nou". Completați informațiile relative contactului, cum ar fi Numele, Telefonul, Emailul, Adresa etc. și confirmați prin apăsarea tastei "Salvați" din partea de jos a paginii.

Bine de știut: câmpurile suplimentare sunt disponibile apăsând "More" (pozele contactului, note, website etc.)

Modificați un contact

Din lista de contacte, selectați contactul pe care doriți să-l modificați. Apăsând pe el, apăsați tasta "OK" și selectați "Editare" din meniul contextual.

Fișă contactului este acum în modul de editare. Validați modificările apăsând tasta "Salvați" din partea de jos a paginii.

În modul editare, sunt disponibile opțiuni suplimentare din "Meniu":

- **Salvează** : v permite să salvați modificările.
- **Renunță la modificări** : v permite să tergeți modificările efectuate.
- **terge** : terge contactul.
- **Separă** : v permite să separați două contacte îmbinate.
- **Unește** : v permite să îmbinați două contacte.
- **Setare ton de apel** : V permite să setați un ton de apel pentru contact.
- **Toate apelurile către mesageria vocală** : Redirecționează toate apelurile primite de la acest contact la mesageria vocală.

tergeți un contact

Din lista de contacte, selectați contactul pe care doriți să-l tergeți. Apăsând pe el, apăsați tasta "OK" și selectați "tergere" din meniul contextual.

Confirmați faptul că doriți să-l tergeți selectând "Da".

Contacte preferate

Adăugarea unui contact la Preferate:

Din lista de contacte, selectați contactul pe care doriți să-l adăugați la lista de Preferate. Apoi apăsați tasta "OK", bifați caseta "Preferate" din meniul contextual și apăsați tasta "OK".

tergerea unui contact de la Preferate:

Selectați contactul pe care doriți să-l eliminați din lista de contacte. Apoi apăsați tasta "OK", debifați caseta "Preferate" din meniul contextual și apăsați tasta "OK".

Bine de știut: Puteți, de asemenea, să tergeți un contact din lista de Preferate dvs. direct din aplicațiile Telefon sau Mesaje.

Căutați un contact

Contactele sunt afișate și sortate în ordine alfabetică pe ecranul principal al aplicației Contacte. Utilizați pad-ul de navigare pentru a derula lista și a vizualiza contactele.

De asemenea, puteți efectua o căutare rapidă în listă. Utilizați tastele alfanumerice de pe tastatura fizică și introduceți numele contactului pe care îl căutați. Lista de contacte este apoi filtrată în funcție de caracterele introduse de dvs. Puteți oricând să parcurgeți lista contactelor filtrate utilizând pad-ul de navigare.

Pentru a terge un caracter dintre cele introduse pentru căutarea rapidă, apăsați tasta "tergere".

După ce ați găsit contactul, apăsați tasta "OK" pentru a vizualiza detaliile cardului de contact.

Din acest ecran, puteți apela contactul selectat selectând numărul de telefon și apăsând tasta "OK".

Atunci când sunt afișate detaliile unui contact, tasta "Meniu" vă permite să folosiți unele opțiuni suplimentare:

- Adăugare la favorite: vă permite adăugarea unui contact la Preferate
- Editează : Permite modificarea detaliilor contactului
- terge: vă permite să eliminați un contact

- Distribuie: V permite s trimiteti informa iile de contact prin SMS, Email, Bluetooth...
- Adaug la ecranul de Start: v permite s ad uga i contactul la ecranul ini ial (cum este explicat mai jos)

Ad uga i un contact la Ecranul de Start

Pute i ad uga pictograma unui contact direct la ecranul ini ial pentru a avea acces rapid la ea.

Din lista de contacte, selecta i contactul pe care dori i s -l ad uga i la ecranul de Start, apoi ap sa i lung tasta "OK" i selecta i "Ad ug la Ecranul de Start" din meniul contextual.

Importa i / Exporta i contacte

Din ecranul principal al aplica iei ap sa i tasta "Meniu" apoi selecta i "Import / Export". Sunt disponibile urm toarele op iuni:

- Importare dintr-un fi ier VCF: v permite s importa i un fi ier VCF în memoria intern a SmartVision2.
- Importare de pe cartela SIM: v permite s importa i contacte din memoria cartelei SIM în memoria intern a SmartVision2.
- Exportare într-un fi ier VCF: v permite s exporta i toate contactele într-un fi ier VCF i s le plasa i în memoria intern a SmartVision2.
- Partaja i contactele vizibile: v permite s distribui i contactele vizibile ale SmartVision2 prin SMS, e-mail, Bluetooth, etc.

Parametri

Mai multe op iuni sunt disponibile din ecranul principal al aplica iei prin intermediul tastei "Meniu":

- Afi area contactelor: V permite s gestiona i afi area contactelor.
- Import/export: V permite s importa i i s exporta i contactele
- Conturi: v permite s gestiona i conturile de e-mail asociate cu contactele dvs.
- Set ri: v permite s modifica i op iunile de afi are ale contactelor.

- **tergeți contactele:** terge toate contactele prezente în memoria internă a telefonului.
- **Ajutor: V** permite să vizualizați capitolul "Contacte" din Ghidul utilizatorului (acest capitol).

Sfârșitul capitolului

Book Reader (Cititor de cărți)

Book Reader este o aplicație de citire vocală a documentelor în formatele Daisy 2.02, Daisy 3.0, Epub, Epub3, Doc, Docx PDF, Txt și HTML.

Import documente

Pentru a importa documente în SmartVision2, conectați-l la computer printr-un cablu USB. După conectare, transferați fișierele în folderul "cărți" din memoria internă. De asemenea, puteți introduce o cartelă de memorie microSD în SmartVision2 pentru a mări memoria disponibilă pentru conținutul multimedia. În acest caz, creați un folder "Cărți" în memoria internă de pe cardul SD pentru a adăuga fișierele.

Bine de știut: folderul "Descărcare" poate fi, de asemenea, utilizat pentru a memoriza fișierele dvs.

Ecranul principal

Când porniți aplicația, opțiunile disponibile sunt:

- **Reluare:** vă permite să reluați redarea ultimului document de unde a rămas ultima oară
- **Cărțile mele:** vă permite să căutați și să citiți o carte deja memorizată în SmartVision2
- **Preferate:** vă permite să citiți rapid o carte pe care ați setat-o printre Preferate.
- **Citite recent:** vă permite să citiți ultimele documente pe care le-ați citit
- **Înregistrează o carte Daisy:** transformă o înregistrare audio într-o carte în format Daisy.

Mai multe opțiuni sunt disponibile pe ecranul principal prin intermediul Meniului

- **Oprește după citire:** citirea unui document se va opri automat atunci când ieșiți din aplicație apăsând butonul "Acasă".
- **Culori:** vă permite să modificați culoarea textului și culoarea de fundal atunci când citiți un document.
- **Viteză:** vă permite să modificați viteza de redare a unui document
- **Ton:** vă permite să modificați tonul citirii unui document (funcționează

numai pe formate MP3).

- **Time Step:** setați un interval de timp cu care veți putea să avansați citirea textului.
- **Citare continuă :** permite citirea unui document în continuu (adică după ce documentul se termină, citirea lui va începe de la capăt).

Citirea unui document

Din ecranul principal al aplicației, selectați "Cărțile mele"

Sunt disponibile următoarele opțiuni de căutare:

- **Căutare după titlu:** permite căutarea unui document după titlul acestuia
- **Căutare după autor:** selectați un document după autorul acestuia
- **Selectați după format:** permite căutarea unui document după formatul acestuia
- **Explor :** permite navigarea în tot folderul "cărți" pentru a căuta un document.

Bine de știut: pentru a citi fișierele într-un format ZIP (fișiere comprimate) cu aplicația Book Reader, trebuie mai întâi să le dezarhivați și să le extrageți conținutul utilizând funcția "Explor". Pentru a executa această operațiune, selectați fișierul comprimat din folderul unde acesta este stocat și confirmați cu tasta "OK". Va apărea o fereastră unde va trebui să confirmați că doriți să dezarhivați fișierul selectat. Selectați "OK" folosind tastele de navigare și confirmați cu "OK". Fișierul va fi dezarhivat și pus în folderul "Cărți" din memoria internă (această operațiune poate să dureze câteva minute). Odată ce procesul a fost finalizat va apărea fereastra care vă propune să tergeți fișierul ZIP. Dacă doriți să îl tergeți: cartea a fost deja dezarhivată și salvată pe telefon și nu mai depinde de fișierul ZIP. Documentul dvs. este acum disponibil în "Cărțile mele".

Odată ce ați selectat documentul, redarea începe automat.

În timpul redării, sunt disponibile următoarele comenzi rapide de la tastatură :

- **Tasta 0:** Continuați / Întrerupeți citirea
- **Tasta 1:** paragraful/capitolul anterior
- **Tasta 2:** paragraful/capitolul următor

- **Tasta 4:** scade nivelul de navigare (pagina, titlu, capitol, rând, cuvânt, caracter, time step)
- **Tasta 5:** crește nivelul de navigare (pagina, titlu, capitol, linie, cuvânt, caracter, time step)
- **Tasta 7:** derulare rapidă înapoi (numai pentru MP3)
- **Tasta 8:** derulare rapidă în față (numai pentru MP3)

Sunt disponibile opțiuni suplimentare în timpul redării prin "Meniu"

- **Modul de navigare:** vă permite să modificați nivelul de navigare (titlul paginii, capitolul, rândul, cuvântul, caracterul, timestep-ul). Opțiunile din acest meniu depind de tipul documentului în curs de redare.
- **Creați un marcaj:** vă permite să creați un marcaj în poziția actuală a lecturii dvs.
- **Mergi la...:** vă permite să navigați prin document (începutul, titlul, marcajul, procentajul)
- **Unde sunt?:** vă permite să aveți informații despre cartea și despre unde s-a ajuns cu citirea
- **Modul Audio:** vă permite să citiți un fișier MP3 folosind sinteza vocală a SmartVision2
- **Setări:** vă duce înapoi la opțiunile generale ale aplicației

Gestionați lista Preferate

Adăugați un document în lista Preferate:

Selectați fișierul din "Căerile mele" și apăsați lung tasta "OK". Se afișează un meniu contextual referitor la elementul selectat, selectați "Preferate" pentru a adăuga acest document în listă.

Eliminarea unui document din lista Preferate:

Selectați fișierul din "Preferate" și apăsați lung tasta "OK". Se afișează un meniu contextual asociat elementului selectat. Selectați "Preferate" pentru a elimina acest fișier din listă.

Creați o carte Daisy

Creați o nouă carte Daisy

Din ecranul principal al aplicației, selectați "Înregistrați o carte Daisy", apoi "Carte nouă".
Selectați locația unde va fi stocată cartea audio (telefon sau card SD).

Apoi inserați titlul și autorul cărții.

Selectați "Creați o înregistrare nouă" și apoi "Înregistrare" pentru a începe înregistrarea audio.

Selectați "Pauză" pentru a întrerupe înregistrarea.

După ce înregistrarea este finalizată, selectați opțiunea "Stop" pentru a salva noua carte audio și a reveni la ecranul principal al aplicației.

Bine de știut: dacă doriți să adăugați un fișier audio la o carte înregistrată mai de mult în SmartVision2, selectați "adăugați la o înregistrare existentă".

Adăugați o înregistrare audio la o carte audio deja existentă

Din ecranul principal al aplicației, selectați "Înregistrați o carte Daisy", apoi "Adăugați la o carte". Selectați cartea audio în care doriți să înregistrați.

Selectați "Creați o înregistrare nouă" și apoi "Înregistrare" pentru a începe înregistrarea audio.

Selectați "pauză" pentru a întrerupe înregistrarea.

După ce înregistrarea este finalizată, selectați opțiunea "Oprire" pentru a salva noua carte audio și a reveni la ecranul principal al aplicației.

Sfârșitul capitoului

Calculator

Această aplicație efectuează operații de bază, cum ar fi adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri.

Efectuarea calculelor de bază

Când utilizați aplicația "Calculator", tastele au următoarele funcții:

- tastele de la 0 la 9 vă permit să introduceți cifrele
- tasta « * » permite selectarea operației (înmulțire, împărțire, plus, minus, virgulă și punct)
- tasta « # » validează operația selectată și vocalizează rezultatul
- tasta « tergere » permite tergerea ultimei cifre sau operației introduse
- Pad-ul de navigare prin tastele sus, jos, stânga, dreapta vă permite să navigați pe cifre și pe operatorii afișați pe ecran.

Bine de știut: Pentru operații complexe, cum ar fi calcule care prezintă operațiile de sinus, cosinus, logaritme, etc, apăsați "Meniu", apoi selectați "Panou avansat". După aceea, utilizați tastele de navigare pentru a selecta operatorul (sinus, cosinus, tangent, rădăcină pătrată, ridicare la putere ...) și introduceți cifrele. În cele din urmă, apăsați tasta «OK» pentru a valida operațiunea.

Sfârșitul capitolului

Calendar

Aplicația Calendar este o aplicație standard Google care vă permite să creați evenimente și mementouri.

Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează această aplicație.

[Link către pagina web Google Calendar](#)

Sfârșitul capitolului

Camera Foto/Video

Această aplicație vă permite să fotografiați sau să realizați videoclipuri utilizând camerele video încorporate din spatele a SmartVision2.

Faceți o poză

Apăsăți pe butonul "declanșator" situat în partea de jos a ecranului și apăsați tasta «OK». În momentul în care se realizează poza, se va auzi un sunet care caracterizează obturatoarele aparatelor de fotografiat.

Pentru a vizualiza ultima fotografie realizată, folosiți-vă de tasta "Cea mai recentă fotografie". Utilizați aplicația Google pentru fotografii ([Google Foto](#)) pentru a vizualiza toate fotografiile.

Înregistrați un videoclip

Apăsăți pe butonul "Declanșator video" situat în partea de jos a ecranului și apăsați tasta «OK». Apăsăți din nou pe butonul «OK» pentru a opri înregistrarea.

Pentru a reda ultimul videoclip, folosiți-vă de tasta "Cea mai recentă fotografie". Utilizați [Google Foto](#) pentru a vedea toate videoclipurile înregistrate.

Modificați setările camerei

Puteți modifica setările aparatului foto prin intermediul tastei "Meniu". Astfel de setări include, printre altele, expunere, balans de alb, anti-pâlpâire.

De asemenea, puteți adăuga un filtru utilizând tasta de control "Mai multe setări" de pe ecran.

Sfârșitul capitolului

Ceas

Aplicația Ceas este o aplicație standard de la Google care vă permite să creați alarme și să verificați ora. Această aplicație include, de asemenea, un cronometru și un timer pentru numărare inversă.

Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează.

[Link Google Ceas.](#)

Sfârșitul capitolului

Chrome

Aplicația Chrome este o aplicație standard de la Google care vă permite să navigați pe internet.

Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează .

[Link Google Chrome.](#)

Sfârșitul capitolului

Colors Detection

Aplicația de detectare a culorii utilizează camera încorporată și două LED-uri amplasate în spatele SmartVision2. Acest sistem este special conceput pentru a îmbunătăți și a mări precizia detectării culorilor.

Anunțarea culorilor

Selectați din pagina principală a aplicației «Announce Colors» și poziționați dispozitivul SmartVision2 la aproximativ 5 cm distanță de întindeași apăsați tasta «OK». Culoarea detectată este apoi rostită și rezultatul este repetat periodic.

Aflați culoarea

Selectați din pagina principală a aplicației «Find Color» apoi selectați o culoare pe care doriți să o detectați și poziționați SmartVision2 la aproximativ 5 centimetri distanță de întindeași.

Se va auzi un semnal sonor atunci când culoarea selectată va fi detectată.

Prin intermediul tastei «Meniu» sunt disponibile mai multe opțiuni, precum:

- Asistență la distanță: anunță când întindeași este prea aproape sau prea departe de cameră.
- Alerta pentru aflarea unei culori: vă permite să alegeți modul notificării (sunet, vibrații, sunet și vibrații).
- Ajutor: vă permite să consultați capitolul "Detectarea culorilor" din Ghidul utilizatorului.

Sfârșitul capitolului

Detector de lumin

Această aplicație notifică nivelul luminozității detectat de senzorul de lumină aflat în partea superioară a SmartVision2.

Cum se detectează nivelul luminozității?

Îndreptați partea din spate a telefonului spre direcția dorită. În cazul în care mediul înconjurător este luminos, SmartVision2 generează sunete de înaltă frecvență. Dacă este întunecat, SmartVision2 generează sunete de frecvență mai joasă.

Mai multe opțiuni sunt disponibile utilizând tasta «Meniu»:

- Anunarea detectării luminii: vă permite să schimbați modalitatea implicită de notificare a nivelului de luminozitate (adică prin semnale sonore de diferite frecvențe) cu rostirea unui procentaj de luminozitate.
- Ajutor: permite consultarea capitolului "Detector de lumină" din Ghidul utilizatorului.

Sfârșitul capitolului

Google Foto

Aplicația Google Foto este o aplicație standard de la Google care vă permite să vizualizați fotografiile în SmartVision2.

Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează această aplicație.

[Link către Google Foto](#)

Sfârșitul capitolului

Gmail

Aplicația Gmail este o aplicație standard de la Google care vă permite să trimiteți și să primiți e-mailuri.

Vă rugăm să consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează această aplicație.

[Link către Google Gmail](#)

Sfârșitul capitolului

Reportofon

Aplicația Reportofon vă permite să înregistrați note vocale și să le redați mai târziu.

Înregistrați o notă vocală

Pentru a începe înregistrarea, selectați "Înregistrați" din ecranul principal al aplicației.

Apăsând "Pauză" pentru a întrerupe înregistrarea și "Înregistrați" pentru a o relua.

Pentru a termina înregistrarea, selectați "Stop".

După ce înregistrarea este finalizată, selectați una dintre aceste trei opțiuni:

- Redare: vă permite să redați nota vocală înregistrată
- Tergere: elimină nota vocală înregistrată
- Salvează: salvează nota vocală înregistrată

Redați o notă vocală

Din ecranul principal al aplicației, selectați opțiunea "Listă". Odată ce ați selectat-o va fi afișată lista tuturor notelor vocale înregistrate.

Selectați nota vocală pe care doriți să o redați din listă și apăsați butonul «OK».

În timpul redării, puteți:

- Pauză / redare: vă permite să întrerupeți sau să redați nota vocală
- Oprire: încheie redarea notei vocale

La sfârșitul redării, puteți alege una dintre următoarele opțiuni:

- Redare: redă nota vocală
- Listă: afișează toate notele vocale înregistrate
- Tergere: vă permite să tergeți nota vocală curentă

Redenumiți o notă vocală

Selectați "List " din ecranul principal al aplicației. Va apărea lista tuturor notelor vocale.

Selectați nota vocală pe care doriți să o editați din listă și apăsați lung tasta "OK".

Selectați "Redenumiți o înregistrare". Ștergeți titlul vechi, apoi introduceți noua denumire a notei vocale și utilizați pad-ul de navigare pentru a selecta tasta "OK".

tergeți o notă vocală

Selectați "List " din ecranul principal al aplicației. Va apărea lista tuturor notelor vocale.

Selectați memoria vocală pe care doriți să o ștergeți din listă și apăsați lung tasta "OK".

Selectați "Ștergeți o înregistrare" și confirmați apăsați "OK" folosind săgețile de navigare.

Sfârșitul capitolului

Kapten

Aplicația Kapten este un sistem de navigație conceput special pentru persoane cu deficiențe de vedere. Pentru a utiliza aplicația dvs. operează prin Sistemul global de poziționare (GPS) și folosește dotări bogate în conținut precum navigarea, localizarea geografică și explorarea hărților. Mai mult, Kapten vă permite să salvați punctele de interes preferate pentru a vă ghida spre ele ori de câte ori doriți. Aceste puncte de interes sunt numite K-Tags. În sfârșit, la descărcarea hărților, datele Kapten sunt stocate pe SmartVision2, astfel încât să puteți utiliza această aplicație fără o conexiune la internet.

Declinare a responsabilității

Aplicația Kapten este un sistem de asistență la navigație bazat pe sistemul de poziționare SmartVision2 destinat în principal pietonilor, dar poate fi folosit și într-o măsură mică.

În timpul unei navigații, respectați avertismentele descrise aici. Indiferent de modul dvs. de conducere, instrucțiunile de navigație oferite de aplicația Kapten nu ar trebui să vă scutească de respectarea regulilor de circulație rutieră și de menținerea unui comportament responsabil. Atenția dvs. ar trebui să se concentreze în primul rând asupra mediului înconjurător. Rămâneți atenți și grijulii în timpul conducerii dvs. și respectați ceilalți utilizatori ai drumului, fie ei pietoni, bicicliști, motocicliști, fie autovehicule. Vă mai sfătuim să respectați regulile bunului simț înainte de a respecta instrucțiunile de navigație din aplicația Kapten. Observați cu atenție semnele și geometria trotuarelor și străzilor. Dacă nu reușiți să luați direcția indicată de aplicația Kapten, aceasta vă va recalcula automat traseul din noua poziție. Rețineți că acest produs se bazează pe sistemul de poziționare al telefonului dvs. smartphone. Determinarea exactă a poziției depinde de puterea semnalului GPS, care depinde în mare măsură de mediul în care vă aflați, de locul în care vă regiștriți, de felul în care purtați receptorul și de datele digitale de cartografiere. Astfel, KAPSYS nu poate garanta că instrucțiunile date de sistemul de navigație să fie corecte.

Aplicația Kapten nu funcționează până când nu este activată funcția GPS. Dacă GPS-ul nu este activ, vi se va solicita să îl activați la pornirea aplicației.

Descărcarea hărților

Pe SmartVision2 nu este preinstalat niciun hartă : pentru a folosi aplicația Kapten, trebuie mai întâi să descărcați hărțile care vă interesează prin intermediul unei conexiuni la Internet. Selectați ara pe care doriți să o instalați din listă și apăsați butonul "OK" pentru a începe descărcarea. După terminarea descărcării, aplicația trebuie repornită pentru a încărca noua cartografiere.

Bine de știut: hărțile descărcate sunt salvate în mod implicit în memoria internă a SmartVision2. Dacă doriți, puteți modifica locația hărților salvate utilizând opțiunea "Gestionare hărți" din setările aplicației.

Moduri de navigare

Ecranul principal al aplicației Kapten oferă diferite moduri de navigare:

- Mers pe jos: vă oferă cel mai eficient traseu pe jos către destinația dvs.
- Navigarea cu mașina: vă oferă cel mai bun traseu pe care să conduceți spre destinația dvs.
- Orientare directă: vă oferă indicațiile de orientare și distanțarea măsurată până la destinație care vor fi urmate de indicarea timpului rămas. Toate acestea vor fi calculate fără a ține cont de traseul efectiv și de posibilitatea fizică de a-l parcurge.
- Hartă îndrumătoare: citește harta și analizează intersecțiile pe rând, oferindu-vă o descriere a fiecărei intersecții.
- Gestionarea K-tag-urilor: vă permite să creați, să modificați și să ștergiți K-tag-urile dvs.
- Rută pietonală: vă permite să înregistrați un traseu și să îl folosiți mai târziu.
- Navigare liberă: vă oferă accesul la navigare liberă (fără să specificați destinația), oferind o descriere în timp real a mediului înconjurător.

Mersul pe jos și navigarea cu mașina

Indiferent de modul de navigare pe care l-ați ales, trebuie să selectați acum o destinație printre modulurile de alegere a destinației propuse mai jos:

- Navigați către o "Adresă Nouă": această setare este utilizată pentru a solicita instrucțiuni asupra traseului către duce la o anumită adresă. Sunt disponibile două opțiuni pentru introducerea datelor:
 - Introducere vocală: vă permite să introduceți adresa utilizând funcția de recunoaștere vocală. Pentru a activa acest mod, când sunteți în ecranul de introducere a adresei, apăsați tasta de comandă vocală pentru a introduce adresa. Kapten va propune diferite sugestii care se potrivesc cu cererea dvs. Alegeți-o pe una dintre ele și va începe automat o sesiune de navigare către destinația introdusă. (Pentru a putea folosi această funcțiune este nevoie de o conexiune la Internet)
 - Introducere prin tastatură: vă permite să specificați adresa utilizând tastatura SmartVision2, prin introducerea următoarei secvențe de informații: ora, strada și apoi numărul străzii. Când ați introdus toate datele adresei de destinație, apăsați tasta "OK" pentru a valida. Puteți utiliza pad-ul de navigare central SmartVision2 pentru a derula lista de sugestii generată după solicitarea dvs. Selectați-o pe una dintre ele și sesiunea de navigare va porni automat.
- Navigați către "Noua adresă prin cod poștal": selectați orașul de destinație și introduceți codul poștal, numele și numărul străzii.
- Navigați la "Destinații recente": selectați adresa dvs. de destinație din lista ultimelor destinații. Dacă doriți, puteți ștergi lista cu ultimele destinații. Pentru a face acest lucru, consultați secțiunea "Parametri".
- Navigați către un "K-Tag": selectați categoria, apoi K-Tag-ul spre care doriți să

mergeți. Pentru mai multe detalii despre K-TAG, despre cum să le creați și să le gestionați, vă rugăm să consultați capitolul "K-Tag".

- Navigați spre un "Punct de interes": În loc să introduceți adresa, această opțiune vă permite să alegeți un punct de interes (POI):
 - din lista generată în funcție de poziția mea actuală
 - din lista generată în funcție de o nouă adresă
 - după nume
- Pregătiți "Itinerariul": selectați o adresă de plecare și o adresă de destinație, Kaptan va calcula cea mai bună rută în funcție de metoda de navigare aleasă, iar ruta calculată va fi descrisă într-un ghid rutier. Miscați-vă pe hartă folosind pad-ul de navigare al SmartVision2 și ascultați instrucțiunile pentru ruta dvs.

În timpul navigării

Instrucțiunile către destinația dvs sunt afișate și anunțate pe toată durata călătoriei. În timpul navigării sunt disponibile mai multe detalii legate de călătoria dvs. care sunt accesibile apăsând următoarele taste:

- Tasta 1: Unde sunt?
- Tasta 2: Ultima instrucțiune
- Tasta 3: Următoarea instrucțiune
- Tasta 4: Viteza curentă
- Tasta 5: Limita de viteză
- Tasta 6: Distanța rămasă
- Tasta 7: Punct de interes
- Tasta 8: Activare / Dezactivare navigarea liberă
- Tasta 9: Semnal GPS

Sunt disponibile opțiuni suplimentare prin apăsarea tastei «Meniu»:

- Următoarea instrucțiune: oferă următoarea instrucțiune de navigare
- Ultima instrucțiune: repetă ultima instrucțiune de navigare
- Destinația curentă: rostește destinația curentă
- Ora sosirii: vă informează despre ora sosirii.
- Modul curent de navigare: vă informează despre modul de navigare utilizat în momentul respectiv
- Treceți la modul Mers pe Jos: treceți în modul pentru pietoni fără să puneți introducerea destinației încă o dată
- Treceți la modul Mășină: treceți în modul pentru mașini fără să puneți introducerea destinației încă o dată

- Roadbook: în timpul navigării activează modul cu informații detaliate despre drum
- Opriți navigarea: opriți sesiunea de navigare în curs de desfășurare
- Setări: activează meniul de setări
- K-tag: activează meniul K-Tag
- Semnal GPS : vă informează despre puterea semnalului GPS
- Unde sunt: vă zice unde vă aflați
- Poziția actuală : oferă informații despre latitudine și longitudine în grade, minute și secunde și informații despre altitudinea în metri
- Activare Navigare liber : activează modul de navigare liber
- Oprire Navigare liber : dezactivează modul de navigare liber
- Limita de viteză : rostește limita de viteză aplicată drumului pe care vă aflați
- Viteza curentă : viteza cu care mergeți
- POI prin împrejurimi: vă indică informații despre toate felurile de puncte de interes din jurul poziției dvs. curente
- K-tag prin împrejurimi: indică K-tag-urile din jurul poziției dvs. curente

Orientare direct

Modul de orientare direct vă oferă informații în timp real cu privire la distanță și la direcția destinației. Aceste informații se calculează ca și cea mai scurtă distanță dintre cele două puncte și nu iau în considerare nicio drumurile efective care pot fi parcurse. Acest mod de navigare este util în special pentru a ajunge la un punct precis ales pe hartă, fie destinația în sau în afara drumului (adică în off-road).

Atenție: informațiile sunt furnizate doar pentru comoditatea dvs. și nu iau în considerare topografia și nici pericolele pe care le puteți întâlni, cum ar fi râuri, poduri, bariere sau obstacole similare. Kapsys declină orice răspundere pentru pagubele cauzate direct sau indirect de utilizarea acestui mod.

Modul de orientare direct vă oferă următoarele informații:

- Orientare cardinală a punctului de sosire față de poziția dvs. Actuală (Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest și Nord-Vest)
- Distanța de la poziția actuală la punctul de sosire, în metri sau kilometri
- Direcția pe care trebuie să o luați pentru a ajunge la destinație. Această informație este exprimată în ore (de la 1 la 12), folosind un ceas analog, în funcție de ultima direcție cunoscută și captată de telefon

Când este activat modul "Orientare direct", direcția destinației, distanța și informațiile despre poziția dvs. sunt anunțate la intervale fixe de timp.

Atenție: aplicația Kaptan va calcula direcția dvs. numai dacă vă deplasați. Dacă vă aflați în staționare, Kaptan vă oferă direcția dvs. anterioară corect. Aplicația va trimite în plus mesajul "Nici o informație despre direcție" atunci când nu vă puteți furniza informații valide cu privire la direcția pe care trebuie să o urmați. Exemplu de mesaje directe de orientare: "Destinația dvs., la nord-vest la 250 de metri, vă rugăm să luați dreapta: destinația dvs. Se află la 250 de metri în direcția nord-vest, trebuie să vă virați la dreapta.

Rețineți că "Orientarea Directă" nu se oprește automat după ce ați ajuns la destinație; trebuie să apăsați butonul "Înapoi" pentru a o opri.

Bine de știut: Setările Orientării directe (vezi paragraful Setări) pot fi utilizate pentru a defini frecvența repetițiilor automate a mesajelor sau pentru a activa sau a dezactiva modul "Orientare directă" la sfârșitul navigării.

Descoperirea hărții

Această funcție vă permite să citiți o hartă și să mergeți virtual de la o intersecție la alta, oferindu-vă o descriere detaliată a fiecărei intersecții.

Selectați adresa de plecare din opțiunile de mai jos:

- Poziția curentă : începe să citească harta din poziția curentă
- Adresa nouă : începe să citească harta de la o nouă adresă
- Adresa nouă după codul poștal: începe citirea hărții de pe o nouă adresă introdusă prin codul poștal asociat
- Ultima destinație: începe să citească harta dintr-una dintre ultimele destinații introduse
- K-tag: începe să citească harta dintr-un K-tag selectat
- Puncte de interes: începe să citească harta dintr-un punct de interes selectat

După alegerea adresei, selectați direcția în care doriți să mergeți prin pad-ul de navigare al tastaturii și apăsați "OK".

Aplicația Kaptan va anunța numele străzilor următoarei intersecții. Selectați intersecția în care doriți să mergeți prin pad-ul de navigare de pe tastatură și apăsați «OK» pentru a confirma direcția.

Prin urmare, veți putea explora harta plimbându-vă de la o intersecție la alta.

Rut pe jos

Această funcție vă permite să înregistrați un drum sau un traseu pentru o navigare succesivă.

Din acest ecran puteți să :

- Înregistrați (memorizați) traseul
- Folosiți un traseu precedent
- Editați traseul
- Ștergeți traseul

Înregistrați un traseu

Selectați "Înregistrați un traseu" și apăsați tasta "OK" pentru a începe înregistrarea traseului.

Poziția GPS este apoi înregistrată la intervale fixe pentru a crea un traseu.

Apăsați butonul "Înapoi" pentru a opri înregistrarea.

Odată ce înregistrarea va fi completă, puteți schimba numele traseului pentru a-l găsi mai ușor. Altfel, numele traseului va fi ales implicit cu acest format: traseu + dată + oră

Bine de știut: nu este posibil înregistrarea unui traseu în afara hărții. Dacă mergeți pe un drum în afara hărții, aplicația Kaptenvă va poziționa pe strada cea mai apropiată de locația dvs. curente.

Atenție: Înregistrarea unui traseu este considerată ca o navigație: nu este posibil efectuarea unei alte navigații în timpul ei.

Folosiți un traseu precedent

Selectați "Redați un traseu" și selectați din nou ruta pe care doriți să o parcurgeți.

Traseele sunt sortate în ordine cronologică. Odată ce traseul a fost selectat, puteți să-l parcurgeți în direcția în care l-ați înregistrat sau în direcția inversă pentru a vă relua pașii.

Editați un traseu

Selectați "Editați un traseu" și selectați traseul pe care doriți să-l redenumiți.

Introduceți noul nume al rutei și confirmați cu tasta "OK".

Ștergeți un traseu

Selectați "Ștergeți un traseu" și selectați traseul pe care doriți să-l ștergeți.

Gestionați K-tag-urile

Aplicația Kaptenvă are funcția K-TAG, care vă permite să etichetați un loc de pe hartă, adică să memorizați o poziție împreună cu informațiile asociate ei.

K-TAG-urile sunt utilizate în principal ca destinații. În plus, apropierea unui K-TAG poate fi anunțată în "Navigația Liberă".

Un K-Tag este, prin urmare, un marcaj geografic care include următoarele elemente:

- poziția geografică sau adresa
- numele
- categoria

Din acest ecran, puteți să :

- Crea i un K-Tag.
- Edita i un K-Tag.
- terge i un K-Tag.

Crea i un K-Tag

Din ecranul "Gestiona i K-Tag-urile", selecta i "Creare K-Tag", apoi selecta i un element din list :

- Pozi ia curent : v permite s crea i un nou K-tag de la pozi ia dvs. curent
- Adres nou : v permite s crea i un nou K-tag introduc nd o adres .
- Coordonate: v permite s crea i un nou K-Tag de la anumite coordonate geografice (latitudine i longitudine)

Dup ce a i definit pozi ia geografic a K-Tag-ului, îi pute i da un nume. Implicit, adresa K-tag-ului este utilizat ca nume. Dup ce a i setat numele K-tagului, ap sa i tasta "OK" pentru a confirma înregistrarea i a continua cu pasul urm tor.

Pentru a asocia eticheta K cu o categorie, iat lista diferitelor categorii de K-Tag-uri:

- Preferate
- Contacte
- Hoteluri i restaurante
- Mijloace de transport
- S n tate
- Servicii
- Shopping
- Timp liber
- Turism
- Sport
- Motoare
- Diverse

Edita i un K-Tag

Din ecranul "Gestiona i K-Tag-urile", selecta i "Edita i un K-Tag", apoi selecta i categoria K-Tag pe care dori i s o modifica i.

Dup selectarea K-tag-ului, pute i modifica "Categoria" sau s "Redenumi i K-tag-ul"

Selecta i o op iune i efectua i modific rile necesare urmând insctruc iunile.

terge un K-Tag

Din ecranul "Gestiona i K-Tag-urile", selecta i " terge i un K-Tag", apoi selecta i categoria i K-Tag-ul pe care dori i s -l terge i.

Navigare liber

Acest mod vă permite să obțineți o descriere a mediului înconjurător în timp real. Odată ce această funcție este activată, aplicația Kapten va anunța strada pe care vă aflați și descrierea următoarei intersecții.

Când ajungeți aproape de o intersecție, aplicația Kapten vă descrie intersecția, oferindu-vă numele străzilor care o compun. După ce prăsiți intersecția, va fi anunțată următoarea stradă spre care vă îndreptați.

Navigarea liberă este activată în mod automat de fiecare dată când începeți o navigare. Cu toate acestea, puteți să o activați sau să o dezactivați, după cum doriți, fie din ecranul inițial al aplicației Kapten fie apăsând tasta "Meniu".

Puteți să modificați setările navigației libere, de exemplu:

- Să configurați rostirea adreselor utile și K-tag-urilor din apropiere
- Să configurați repetarea automată a indicațiilor

Consultați secțiunea "Setări" a aplicației Kapten pentru mai multe informații.

Setări

Această secțiune descrie procesul de configurare a aplicației Kapten. Pentru a accesa opțiunile, apăsați tasta "Meniu" și selectați elementul "Setări".

Diferenții parametri ai aplicației Kapten sunt grupați în categorii:

- Sistem: vă permite să modificați un parametru al sistemului
- Hărți: vă permite să descărcați și să actualizați hărțile
- Mers pe jos: vă permite să modificați parametrii legați de modul de navigare pentru pietoni
- Navigare în mașină: vă permite să modificați setările legate de modul de navigare în mașină
- Navigare liberă: vă permite să modificați setările legate de navigarea liberă

Setările de "Sistem"

- Unitatea de măsură: specifică unitățile de măsură prin care vor fi rostite distanța și viteza utilizate în instrucțiunile de navigație (sistemele metrice sau imperiale).
- Ștergeți ultimele destinații: șterge adresele pe care le selectați din lista traseurilor anterioare
- Reveniți la setările din fabrică: revine la setările din fabrică ale aplicației Kapten.

Setările de "Hărți"

- Descărcați hărți: vă permite să descărcați hărți noi pentru aplicația dvs. Kapten
- Actualizarea hărților: vă permite să actualizați hărțile deja instalate
- Locația de stocare: vă permite să modificați locația de stocare a hărților dvs. (memorie internă sau card SD)

Set rile de "Navigare pietonal "

- Repetarea automat a instruc iunilor: define te intervalul de timp între instruc iunile de naviga ie (Niciunul, 1, 3, 5 sau 10 minute)
- Indicare or : activeaz sau dezactiveaz indica ia orei curente (care va fi rostit împreuna cu instruc iunile de deplasare)

Set ri de "Navigare în ma in "

- Parametrul pentru calcularea rutei: specific criteriile utilizate pentru calcularea rutei (cel mai rapid drum, cel mai scurt drum)
- Activi autostr zile: include sau exclude autostr zile din calcularea rutei
- Permite i drumurile cu tax : include sau exclude drumurile cu tax din calcularea rutei
- Repetarea automat a instruc iunilor: specific intervalul de timp dintre repet rile instruc iunilor de naviga ie (Niciunul, 1, 3, 5 sau 10 minute)

Set rile pentru "Navigare liber "

- Anun area Punctelor de Interes: alege i afi eaz categoria de Puncte de Interes care vor fi anun ate atunci când v apropii de ele.
- Anun area K-Tag-urilor: alege i afi eaz diferitele categorii de K-Tag-uri care vor fi anun ate atunci când v apropii de ele.
- Tipul de anun : define te modul de anun are a Puctelor de Interes sau a K-Tag-urilor atunci când v apropii de unul dintre ele (nicio notificare, semnal sonor sau anun vocal)
- Informa ii cardinale de direc ie: activeaz sau dezactiveaz indica iile cardinale spre destina ia rutei curente
- Repetarea automat a instruc iunilor: specific intervalul de timp dintre repetarea mesajelor atunci când aplica ia este în modul Mers pe Jos (Niciunul, 1, 3, 5 sau 10 minute)

Set ri de "Orientare direct "

- Repetarea automat a instruc iunilor: specific intervalul de timp dintre repetarea mesajelor atunci când aplica ia este în modul de Orientare direct (Niciunul, 1, 3, 5 sau 10 minute)
- Orientare direct spre destina ie: activeaz sau dezactiveaz comutarea automat a aplica iei în modul de Orientare direct la sfâr itul unei sesiuni de navigare tradi ionale pentru pietoni sau ma ini

Sfâr itul capitolului

Lup

Aplicația Lup vă permite să măriți text sau documente și să adaptați mărirea la nevoile dvs. Oferă diferite niveluri de zoom și contraste de culoare folosindu-se de camera din spate.

Mărirea textului

Plasați SmartVision2 peste un text pentru a mări, reglați înălțimea până când imaginea este clară. Utilizați tastele "2" sau "3" de pe tastatură pentru a mări sau micșora nivelul de zoom.

Alte opțiuni sunt:

- Apăsarea "1" pentru a seta sau a dezactiva iluminarea
- Apăsarea "*" pentru a îngheța ecranul
- Apăsarea "0" pentru a fotografia și a salva poza în galeria de imagini
- Apăsarea "#" pentru a alege dintre cele 9 culori de contrast disponibile

Aceste opțiuni diferite sunt de asemenea disponibile prin intermediul tastei "Meniu".

Sfârșitul capitoului

Magazin Google Play

Aplicația Magazin Play este o aplicație standard de la Google care vă permite să descărcați aplicații și widget-uri noi.

Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează .

[Link Magazin Google Play.](#)

Sfârșitul capitolului

Mesaje

Această aplicație trimite și primește mesaje scurte numite SMS sau MMS (mesaje text care conțin un element multimedia).

Trimite un mesaj

Selectați "Mesaj nou" din ecranul principal al aplicației. Apoi selectați prin care din următoarele opțiuni doriți să alegeți destinatarul:

- Preferat: v permite să adugați un contact salvat printre Preferate
- Contacte: v permite să alegeți un contact din lista dvs. de Contacte
- Introducerea manuală a numărului: v permite să introduceți manual numărul destinatarului

Odată ce destinatarul este selectat, introduceți mesajul în caseta de editare a textului.

Confirmați expedierea mesajului apăsând tasta "Trimitere" de la sfârșitul listei.

Opțiunile suplimentare sunt disponibile utilizând tasta «Meniu» după cum urmează :

- Vizualizare contact: permite afișarea cardului de contact (card de vizită)
- Apelare: permite apelarea contactului
- Adăugarea unui destinatar nou: v permite să selectați un destinatar suplimentar
- Introducere texturi rapide: v permite să introduceți un text rapid
- Introducere contact: permite introducerea unui card de contact (carte de vizită) în mesajul dvs.
- Adăugarea subiect: permite setarea unui titlu pentru mesajul dvs.
- Atașament: v permite să adăugați un atașament la mesajul dvs. (fotografii, videoclipuri, fișiere audio sau carduri de contact)

Citiți un mesaj

Când primiți un mesaj, acest eveniment este raportat în bara de Notificări în aplicația

Mesaje.

Pentru a citi un mesaj, deschide aplicația de mesagerie și utilizează pad-ul navigare de pe tastatură pentru a răsfoi toate mesajele.

Mesajele sunt grupate în diferite foldere. Asta înseamnă că toate mesajele primite și / sau trimise către un anumit contact sunt grupate împreună.

Folderele sunt prezentate în ordine cronologică, cea mai recentă fiind la începutul listei.

Când răsfoiești diferitele foldere, numai ultimul mesaj al conversației este vocalizat. Apăsă și OK pentru a vizualiza tot istoricul mesajelor.

Răspunde la un mesaj

Selectează folderul care conține mesajul la care dorești să răspundeși și apăsă și OK.

Se deschide folderul care conține întregul istoric al mesajelor. Caseta de editare pentru a răspunde la SMS-uri va fi deschisă automat, astfel încât să poți introduce pur și simplu textul și confirma că dorești să trimiți mesajul apăsând tasta "Trimitere" de la sfârșitul listei. De asemenea, poți derula lista în sus pentru a răsfoi mesajele primite și / sau trimise anterior.

Descarcă atașament dintr-un MMS

Selectează folderul care conține MMS-ul și apăsă și OK pentru a vizualiza istoricul mesajelor.

Utilizează geotagurile pentru a ajunge la atașament. Odată selectat, apăsă și menține apăsată tasta OK pentru a deschide meniul contextual și selectează "Salvare fișier". Se deschide o nouă fereastră cu toate atașamentele MMS. Selectează butonul "OK" cu geotagurile pentru a descărca toate atașamentele. Imaginile și videoclipurile încarcate vor putea fi vizualizate prin intermediul aplicației "Google Foto".

terge un mesaj

Pentru a terge un mesaj, selectează elementul pe care dorești să îl tergeși și apăsă și lung tasta "OK". Selectează apoi "terge" din lista care va apărea pe ecran pentru a terge mesajul.

Parametri

Apăsă și tasta «Menu» din ecranul principal al aplicației Mesaje pentru a accesa următorii parametri:

- Căutare: v permite să căutați un mesaj în telefon

- terge toate folderele: terge toate mesajele SMS și MMS, inclusiv folderele (conversațiile)
- Parametri:
 - Mesaj text (SMS): vă permite să configurați opțiunile mesajelor text
 - Mesaj multimedia (MMS): vă permite să configurați opțiunile pentru mesajele multimedia
 - Notificări: activează tonul de apel și / sau vibrația care vă vorifica primirea unui mesaj nou
 - General: stabilește fontul mesajului, limita maximă pentru primirea SMS și MMS și transmisia celulară
- Ajutor: permite consultarea capitolului "Mesaje" din ghidul utilizatorului

Sfârșitul capitolului

Muzic Play

Aplicația Muzic Play este o aplicație standard de la Google care vă permite să descărcați și să ascultați muzică.

Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează.

[Link către Muzic Google Play.](#)

Sfârșitul capitolului

NFC

Tehnologia NFC (Near Field Communication) permite lui SmartVision2 să se conecteze la un alt dispozitiv secundar, cum ar fi un smartphone sau o etichetă electronică, și să comunice pur și simplu prin apropierea lor fizică.

NFC poate fi, de asemenea, utilizat pentru a distribui contacte, fotografii și videoclipuri. În plus, SmartVision2 vă permite să programați și să citiți etichetele NFC și să efectuați acțiunea asociată etichetei.

Cum funcționează aplicația NFC?

Aplicația NFC a SmartVision2 funcționează cu etichetele electronice compatibile NFC. În mod prestabilit, 3 etichete NFC sunt furnizate în cutia SmartVision2. Aceste etichete NFC pot conține informații personalizate, cum ar fi un text, o notă vocală, un număr de telefon sau unele setări.

Aplicația NFC vă permite să memorați informațiile pe aceste etichete folosind SmartVision2 urmând un scurt procedeu.

Mai întâi trebuie să "scrieți" informațiile pe eticheta NFC prin intermediul aplicației NFC din telefonul dvs. Odată ce eticheta a fost programată, puneți retroul telefonului pe etichetă pentru a avea datele rostite sau pentru a lansa acțiunea înregistrată în etichetă.

Printr-o etichetă NFC puteți avea accesul facilitat la mai multe acțiuni, cum ar fi recunoașterea unui obiect, căutarea unui folder, amintirea dozajului unui medicament, apelarea unui contact, activarea rapidă sau dezactivarea unei setări etc.

Înregistrați o acțiune în eticheta dvs. electronică NFC

Alegeți informațiile pe care doriți să le înregistrați în eticheta NFC. Acțiunea asociată va fi efectuată imediat ce SmartVision2 recunoaște eticheta. Opțiunile disponibile sunt:

- **Apelare:** asociază un număr de telefon cu un contact și apelează numărul
- **Setarea profilului:** vă permite să asociați eticheta cu o setare a telefonului (Wi-Fi, Bluetooth, modul Avion, soneria) și să o activați mai târziu
- **Aplicație:** vă permite să asociați eticheta cu o aplicație și apoi să activați aplicația
- **Marcaj Internet:** vă permite să asociați eticheta cu un link internet (de exemplu un site web) și să navigați prin pagină folosind browserul de Internet

- Text: v permite s introduce i un text în etichet i s -l vocaliza i
- Seta i WiFi: asociaz eticheta cu set rile re elei dvs. Wi-Fi (nume i parol) i apoi v conecteaz automat la re eaua Wi-Fi.
- Not vocal :v permite s asocia i eticheta cu o not vocal i s o asculta i mai târziu.

Odat ce a i ales i preg tit tot ce dori i s exporta i pe eticheta dvs NFC, utiliza i s ge ile de navigare pentru a ajunge la tasta "Write" ("Scrie") i confirma i cu "OK". Apropiat i partea din spate a SmartVision2 la etichet pentru a transfera informa iile. Telefonul va emite un semnal sonor care confirm înregistrarea informa iilor pe etichet .

Dup finalizarea procesului de înregistrare, ve i putea s lipi i eticheta acolo unde o s ave i nevoie de ea (pe un dosar, pe o cutie de medicamente, o m su etc.).

Bine de tiut: Etichetele NFC pot fi refolosite. Memorizarea informa iilor noi într-o etichet NFC va terge pur i simplu cea anterioar .

Bine de tiut: SmartVision2 este compatibil cu orice tip de etichet NFC. Etichetele difer prin m rime, iar m rimilor diferite corespund diferite capacit i de stocare. În cutia SmartVision2 g si i 3 etichete "NTAG 216" de 888 bytes.

Fiecare dintre acestea poate con ine, de exemplu, aproximativ 400 de caractere pentru un mesaj de text.

Citirea unei etichete NFC

Nu este necesar s deschide i aplica ia NFC pentru a citi o etichet NFC. Trebuie doar s plasa i partea din spate a smartphone-ului pe eticheta NFC. SmartVision 2 va începe comunicarea cu eticheta i va efectua ac iunea asociat etichetei a a cum este descris mai sus.

Sfâr itul capitoului

Note

Aplicația Note v permite să creați, să editați, să tergeți și să citiți note într-un format de text.

Creați o notă

Selectați "Notă nouă" în partea de sus a ecranului pentru a crea o notă nouă. Introduceți textul și salvați nota selectând "Confirmare" în partea de jos a ecranului.

Nota salvată este acum disponibilă pentru a fi citită în ecranul principal al aplicației.

Notele sunt ordonate în ordine cronologică, cele mai recente fiind plasate în partea de sus a listei.

Citiți o notă

Din ecranul aplicației principale "Note", selectați nota pe care doriți să o ascultați. Apăsând tasta "OK" pentru a intra în modul avansat de redare.

Modul avansat de redare vă permite să utilizați tastatura pentru a răsfoi nota după cum urmează :

- Tasta "0": Reluați / întrerupeți citirea notei
- Tasta "1": citește caracterul din stânga poziției curente
- Tasta "2": citește caracterul din dreapta poziției curente
- Tasta "4": citește cuvântul din stânga poziției curente
- Tasta "5": citește cuvântul din dreapta poziției curente
- Tasta "7": revine la începutul notei
- Tasta "8": merge la sfârșitul notei

Alte opțiuni sunt disponibile prin tasta "Meniu" în timp ce citiți o notă după cum urmează :

- Editare: intră în modul de editare pentru a modifica o notă
- Copiază tot: vă permite să copiați întregul conținut al notei

- terge: terge nota
- Export: copiaz nota în dosarul "Note" din memoria intern SmartVision2

Edita i o not

Selecta i nota pe care dori i s o edita i din ecranul principal al aplica iei utilizând tastele de navigare. Apoi ap sa i lung tasta "OK" pentru a deschide meniul contextual i selecta i comanda "Editare".

Acum pute i edita con inutul notei. Introduce i textul i salva i nota selectând "Confirmare" în partea de jos a ecranului.

terge i o not

Selecta i nota pe care dori i s o terge i din ecranul principal al aplica iei utilizând tastele din pad-ul de navigare. Apoi ap sa i lung tasta "OK" pentru a deschide meniul contextual i selecta i " tergere". În cele din urm , selecta i "Confirmare" din partea de jos a ecranului pentru a terge nota.

Din ecranul principal al aplica iei, ap sa i tasta "Meniu" apoi " terge i tot" pentru a elimina toate notele.

C uta i o not

Din ecranul principal al aplica iei, ap sa i tasta "Meniu" i apoi "C utare".

Introduce i o parte a notei pe care o c uta i în fereastra de editare i ap sa i OK pentru a începe c utarea.

Utiliza i s ge ile de navigare pentru a vizualiza rezultatele c ut rii.

Sfâr itul capitolului

OCR

Introduction

Aplicația OCR (Optical Character Recognition - Recunoaștere optică a caracterelor) vă permite să convertiți un text tipărit într-un document text digital și să auziți rostirea conținutului acestuia. Aplicația utilizează camera din spate a sistemului SmartVision2, sistemul de iluminare cu două LED-uri și un senzor de proximitate.

Pentru a scana un text tipărit, aplicația OCR procedează astfel:

- Pasul 1: Face o poză
- Pasul 2: Convertește imaginea într-un document text în limba dorită folosind motorul OCR
- Pasul 3: Rostitește conținutul documentului de text folosind traducerea din limba scrisă în limba vorbită

O calitate bună a imaginii este esențială pentru un proces de recunoaștere reușit. Pentru a obține o imagine de calitate superioară, SmartVision2 integrează un sistem special de iluminare, precum și un senzor de proximitate în combinație cu algoritmi specifici.

Opțiunile și parametrii OCR

Înainte de a începe recunoașterea textului, se recomandă setarea următorilor parametri:

- Selectați opțiunile de asistență (referitoare la distanță și înclinare)
- Verificați limba selectată

Următoarele opțiuni sunt disponibile din meniul principal al OCR prin apăsarea tastei "Meniu":

- Imagine din Galerie: vă permite să selectați o fotografie din galerie în loc să faceți o fotografie
- Asistență: permite activarea sau dezactivarea LED-urilor, stabilirea sunetelor de înclinare (pentru orizontalitate) și a notificării de distanță între camere și pagina vizată
- Detectarea limbajului OCR: setează limba de recunoaștere OCR

- Ajutor: v permite s vizita i capitolul "OCR" din Ghidul utilizatorului (acest capitol)

În timp ce fotografia i documentul, tastatura v ofer urm toarele comenzi rapide:

- tasta "1": porne te sau opre te iluminarea prin LED-uri
- tasta "2": porne te/opre te sunetele pentru înclinare (care v vor ajuta s înclina i telefonul în pozi ie orizontal)
- tasta "3": activeaz /dezactiveaz notificarea distan ei dintre camera foto i pagina de fotografiat
- tasta "4": activeaz /dezactiveaz rostirea unghiului dintre pagin i telefon

Face i o fotografie

Pentru a îmbun t i rezultatul OCR, documentul dvs. trebuie a ezat în fa a dvs., vertical, pe o suprafa dreapt , clar i bine luminat , cu o culoare unic i contrastant fa de documentul care trebuie detectat.

Plasa i documentul în fa a dvs. i îndrepta i camera SmartVision2 la aproximativ dou zeci de centimetri de înt . OCR anun la intervale fixe marginile vizibile i unghiul foii.

Repozi iona i telefonul astfel încât s fie vizibile cele patru col uri ale documentului. Odat ce foaia este încadrat corect, SmartVision2 v spune s nu v mi ca i, iar fotografia este f cut automat dup câteva secunde. Recunoa terea optic începe când se face fotografia.

De asemenea, pute i for a capturarea documentului f r ca cele patru margini s fie vizibile ap sând tasta "OK".

Citirea rezultatului OCR

Dup finalizarea procesului, rezultatul conversiunii OCR este automat afi at i rostit. Dac recunoa terea nu func ioneaz , v sf tuim s reveni i la pagina principal a aplica iei OCR i s porni i din nou procesul.

În timpul vocaliz rii textului recunoscut, pute i utiliza tastatura pentru a muta manual cursorul, dup cum urmeaz :

- tasta "1": permite citirea caracterului din stânga pozi ei curente
- tasta "2": permite citirea caracterului din dreapta pozi ei curente

- tasta "4": permite citirea cuvântului din stânga pozi ei curente
- tasta "5": permite citirea cuvântului din dreapta pozi ei curente
- tasta "7": v permite s reveni i la începutul rezultatului conversiunii OCR
- tasta "8": v permite s merge i la sfâr itul rezultatului conversiunii OCR

Bine de tiut: Selecta i "Salvare" utilizând tasta "Meniu" pentru a salva rezultatul OCR ca o not în aplica ia Note. Aceste note pot fi accesate ulterior prin aplica ia ["Note"](#)

Sfâr itul capitolului

Radio FM

Aplicația Radio FM vă permite să ascultați posturile de radio FM din jurul dvs.

Ascultați radio

Pentru a asculta radioul, conectați cablurile (pentru care acestea vor fi utilizate în loc de antenă), apoi utilizați panoul de navigare pentru a răsfoi diferitele elemente disponibile pe ecran:

- Radioul anterior: vă permite să ascultați postul de radio anterior
- Mic-ora și frecvența: vă permite să setați frecvența radioului la o valoare mai mică
- Adugați la preferate: vă permite să adugați postul de radio redat curent la lista Preferate
- Mărirea frecvenței: vă permite să reglați frecvența radioului la o valoare mai mare
- Radioul următor: vă permite să ascultați următorul post de radio disponibil
- Redare / oprire radio FM: vă permite să ascultați și să întreruați difuzarea posturilor de radio

De asemenea, puteți folosi următoarele comenzi rapide:

- Tasta "1": Mergeți la postul anterior
- Tasta "2": Deschideți sau închideți fereastra cu posturile de radio
- Tasta "3": Mergeți la următorul post
- Tasta "4": Mic-ora și frecvența radio
- Tasta "5": Deschideți o fereastră de inserare text prin care veți putea introduce manual frecvența radio dorită
- Tasta "6": Măriți frecvența radio
- Tasta "7": Accesați postul de radio anterior din lista de Preferate

- Tasta "8": Începe și / oprește înregistrarea
- Tasta "9": Merge și la următorul post de radio din lista de Preferate
- Tasta "0": Ascultă și / Oprește difuzarea postului de radio

Mai multe opțiuni sunt disponibile prin intermediul tastei "Meniu" după cum urmează :

- Radiouri: v permite să listați toate posturile de radio FM disponibile în jurul dvs. (apăsând "meniu" apoi "actualizare" pentru a actualiza lista)
- Începeți înregistrarea: v permite să înregistrați postul de radio pe care îl ascultați
- Înregistrări salvate: v permite să redați posturile de radio înregistrate

Bine de știut: Posturile de radio pe care le-ați setat ca Preferate vor apărea la sfârșitul listei pentru a putea accesa rapid la ele. Din aceste comenzi rapide, puteți redenumi sau terge Preferatele folosind tasta "Mai mult".

Sfârșitul capitolului

Setări

Această aplicație vă permite să activați sau să dezactivați anumite funcții sau să modificați setările existente. SmartVision2 vine cu setările lui predefinite care pot fi editate (cum ar fi limba, ce se afișează pe ecran, etc.)

Setări generale

Setările generale SmartVision2 sunt organizate pe categorii după cum este descris aici:

Categoria wireless și rețea:

- Wi-Fi: Permite activarea și setarea conexiunilor Wi-Fi pentru a accesa Internetul.
- Descărcare accelerată : Permite descărcarea mai rapidă a fișierelor mari prin utilizarea simultană a rețelelor Wi-Fi și 3G / 4G.
- Bluetooth: Permite activarea și setarea conexiunilor cu alte aparate Bluetooth pentru a putea face schimburi de fișiere de date sau multimedia.
- Data usage: Vă permite să modificați setările relative utilizării abonamentului dvs. de date și să personalizați limita de utilizare a datelor.
- Mai multe: Vă oferă accesul la mai mulți parametri, precum:
 - Modul avion: Vă permite să dezactivați toate sursele de transmisie de frecvențe radio, precum Wi-Fi, Bluetooth, rețea celulară etc.
 - NFC: Activează, dezactivează și permite setarea funcției NFC. Funcția NFC vă permite să efectuați plăți și să achiziționați bilete de transport sau să arătați biletele cumpărate după descărcarea aplicațiilor necesare.
 - Tethering și hotspot portabil: Vă permite să utilizați telefonul ca un modem și să vă partajați conexiunea la Internet cu alte dispozitive.
 - VPN: Vă permite să configurați rețele virtuale private (VPN) pentru a vă putea conecta la acestea.
 - Rețele mobile: Vă permite să configurați setările rețelei dvs. de telefonie mobilă (date de roaming, nume puncte de acces, tip rețea, operatori de rețea etc.).

Categoria dispozitiv:

- Acas : v permite s modifica i aspectul ecranului de Start.
- Ecran: v permite s configura i aspectul ecranelor (Nivel luminozitate, imaginea de fundal, modul de a teptare, dimensiunea fontului etc.).
- Sunet i notific ri: V permite s configura i set rile de sunet ale produsului dvs. (ton de apel, notificare mesaj, volum, etc.).
- Aplica ii: v permite s gestiona i aplica iile instalate pe produsul dvs.
- Stocare i USB: V permite s gestiona i spa iul de stocare al SmartVision2.
- Baterie: V permite s monitoriza i consumul bateriei.
- Memorie: v permite s gestiona i utilizarea memoriei a SmartVision2.

Categoria Personal :

- Localizare: v permite s activa i sau s dezactiva i serviciul de localizare Google. Acest serviciu permite aplica iilor i site-urilor ter parte s colecteze i s utilizeze informa ii referitoare la loca ia SmartVision2 pentru a oferi o varietate de servicii legate de localizare.
- Securitate: v permite s gestiona i parametrii de securitate (codul PIN, ecranul de blocare, parole, etc.).
- Conturi: v permite s v gestiona i conturile de e-mail i op iunile de sincronizare.
- Google: V permite s gestiona i set rile pentru aplica iile i serviciile Google.
- Limb i tastatur : v permite s configura i limba n care va fi afi at ecranul i s alege i limba n care o s introduce i textul de pe tastatura SmartVision2.
- Backup and reset: Allows deleting personal data and restoring the default settings.

Categoria Sistem:

- Data i ora: V permite s configura i data i ora pe telefon (fusul orar, formatul orei, etc.).
- Pornire / Oprire Programate: V permite s programa i oprirea i pornirea automat a produsului.

- **Accesibilitate:** V permite s configura i parametri de accesibilitate ai SmartVision2. Parametrii de accesibilitate sunt descri i în paragraful "Accesibilitate"
- **Imprimare:** v permite s configura i set rile pentru imprimant i aplica iile asociate imprim rii instalate pe SmartVision2.
- **Despre:** V permite s verifica i starea telefonului i s instala i actualiz rile.

Conectarea la Wi-Fi

Selecta i "Wi-Fi" din lista de set ri. Schimba i starea Wi-Fi în "Pornit" pentru ca telefonul s afi eze lista re elelor Wi-Fi vizibile în jurul dvs.

Selecta i din list re eaula la care dori i s v conecta i i ap sa i tasta "OK" pentru a v conecta la ea.

Pentru a v conecta la o re ea securizat Wi-Fi, trebuie s introduce i parola. Pute i verifica parola în timp ce o introduce i selectând op iunea "Afi eaz parola" sub fereastra de introducere dac dori i s vede i parola Wi-Fi sau dac vre i ca aceasta s fie rostit .

În cele din urm , ap sa i pe "Conectare" pentru a finaliza procedura. Starea "Conectat" va fi afi at sub numele re elei atunci dup ce procedura va fi finalizat în mod corect.

Bine de tiut: pute i s afla i parola i tipul cheii de securitate (WEP / WPA2) ori prin furnizorul dvs. de servicii de re ea ori de pe ruterul dvs. Pentru a putea s v conecta i, respecta i m rimea caracterelor (adic dac acestea sunt majuscule sau minuscule) atunci când introduce i parola.

Bine de tiut: Mai mul i parametri de conectare sunt disponibili prin intermediul tastei "Meniu".

Conecta i un dispozitiv Bluetooth

Selecta i "Bluetooth" din lista de set ri. Comuta i Bluetooth-ul în modul "Pornit" ca s pute i vedea lista dispozitivelor Bluetooth vizibile în jurul dvs.

Selecta i din list dispozitivul Bluetooth pe care dori i s -l asocia i cu SmartVision2 i ap sa i tasta "OK" pentru a începe asocierea.

Pentru a finaliza conexiunea urma i instruc iunile de pe ecran. Dac vi se solicit introducerea unui cod PIN, încerca i 0000 sau 1234 (acestea sunt cele mai comune coduri) sau consulta i documenta ia dispozitivului. Atunci când procesul de asociere va fi finalizat, dispozitivele vor fi conectate între ele.

Bine de tiut: Pentru a prelungi durata de via a bateriei între dou înc rc ri, dezactiva i

conexiunea Bluetooth atunci când nu o utilizați.

Bine de știut: Parametrii suplimentari de conectare sunt disponibili prin butonul "Meniu".

Actualizarea dispozitivului

Trebuie să aveți o conexiune la Internet pentru a descărca și instala actualizările SmartVision2.

Pentru a vă actualiza dispozitivul, accesați "Setări", selectați "Despre telefon" și apoi "Actualizări de sistem".

Selectați "Descărcare și instalare" din partea de jos a listei și apăsați tasta "OK" pentru a începe descărcarea.

Descărcarea actualizărilor poate dura un timp mai îndelungat, în funcție de conexiunea dvs. la Internet. Puteți verifica progresul descărcării prin intermediul notificării de actualizare din bara de notificare. După ce descărcarea este completă, selectați "Instalare" din ecranul de actualizare a sistemului. Finalizarea actualizării va dura probabil câteva minute, după care veți putea să utilizați iarăși telefonul (telefonul va rosti un mesaj la terminarea procesului de actualizare).

Schimbarea și sintetizarea vocală

Implicit, SmartVision2 vine cu o voce masculină și feminină de calitate standard. De asemenea, puteți descărca voci premium gratuite utilizând o conexiune la internet. Pentru a modifica sintetizarea vocală sau pentru a descărca voci noi, selectați "Accesibilitate" din lista de setări și apoi "Transformare text în vorbire".

În mod implicit sunt disponibile două motoare de sintetizare vocală :

- Kapsys voices : Vă permite să selectați o sintetizare vocală de calitate standard sau să descărcați o sintetizare gratuită de calitate premium prin intermediul unei conexiuni la internet.
- Multilanguage: Vă permite să asociați până la 3 limbi la comenzi rapide din tastatură pentru a putea schimba rapid limbajul sintetizării vocale.

Setările motorului Kapsys voices:

Selectați "Lansarea setărilor motorului" din Kapsys Voices pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Limba: vă permite să selectați limba prestabilită pentru sintetizarea vocală.

- Setări pentru Kapsys Voices: V permite să selectați tipul și calitatea sintetizării vocale (voce feminină sau masculină, calitate normală sau premium).
- Instalarea datelor de voce: V permite să descărcați Vocile Premium. Selectați vocea pe care doriți să o instalați din listă și apăsați tasta "OK" pentru a începe descărcarea. Urmăriți procedura pentru a finaliza instalarea. Vocile instalate vor fi disponibile în lista "Setări de voce Kapsys".

Setările pentru motoarele multilingve:

Selectați «Lansați setările motorului» din Multilanguage pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Limba: v permite să selectați limba prestabilită pentru sintetizarea vocală.
- Setări pentru modalitatea Multilingv: v permite să definiți în mod implicit trei voci. Puteți apoi să setați o comandă rapidă din tastatură pentru a comuta rapid între limbi (consultați "Comenzi rapide de la tastatură" din capitolul "Accesibilitate")

Sfârșitul capitolului

SOS

SmartVision2 este echipat cu o modalitate SOS care permite transmiterea apelurilor și / sau mesajelor de urgență geo-localizate la maxim 10 numere prestabilite.

Atenție: KAPSYS nu poate fi trasă la răspundere pentru daune directe sau indirecte cauzate de nefuncționarea funcției SOS, în cazul în care aceasta este cauzată de o problemă tehnică a produsului sau de lipsa rețelei de telefonie.

Activarea / Dezactivarea funcției SOS

Datorită aplicației SOS, puteți programa transmiterea automată a unui semnal de alarmă, mai exact un apel de urgență, un mesaj de urgență sau ambele, la o listă de persoane alese de dvs.

În caz de urgență și în cazul în care funcția SOS este activată, în momentul apăsării timp de 3 secunde butonul SOS plasat pe partea din spate a SmartVision2.

Alarmerile SOS pot fi oprite printr-una din următoarele acțiuni:

- Apăsarea și înțepătarea butonului SOS timp de 3 secunde, sau;
- Apăsarea butonului "Închidere/Respingere Apel", sau;
- Apăsarea tastei "Înapoi".

Bine de știut: Un ecran de avertizare va fi afișat pe parcursul întregului proces.

Atenție: funcția SOS este implicit dezactivată atunci când cumpărați telefonul. Ea trebuie să fie activată și configurată înainte de eventuala ei utilizare. Dacă nu va fi configurată corect, veți primi o notificare în bara de notificare.

Cum se setează parametrii funcției SOS

Înainte de a utiliza funcția SOS, trebuie să definiți următorii parametri:

- Butonul SOS: amplasat în partea din spate a SmartVision2, butonul SOS activează sau dezactivează funcția SOS
- Întârzierea activării: vă permite să setați cât timp trebuie înțepătarea butonului SOS înainte ca funcția de urgență să fie activată (1, 2, 3 sau 5 secunde)
- Alarmă: activează o puternică alarmă sonoră

- LED-uri intermitente: pornește LED-urile în mod intermitent și le folosește ca și semnal SOS
- Lista numerelor de telefon: vă permite să definiți lista numerelor de urgență. Atunci când funcția SOS este declanșată, aceste numere vor fi apelate în mod automat unul după celălalt sau vor fi destinatele unui SMS preformatat
- Apel telefonic: activează apelurile către numerele predefinite din listă. În cazul în care apelul este unul de urgență, numerele vor fi apelate în mod automat unul după celălalt până când unul dintre ele va primi apelul
- Întârzierea răspunsurilor: definește timpul după care telefonul următorul număr de pe listă (acest timp este implicit setat la 30 de secunde)
- Detectarea conștientă a vocalelor: vă permite să evitați blocarea apelurilor în mesagerii vocale. Destinatarul apelului dvs. va trebui să apese o tastă pe telefon pentru a primi apelul.
- Trimite SMS: activează trimiterea unor SMS-uri către numere predefinite
- Trimite coordonate: atașează coordonatele GPS, dacă acestea sunt disponibile, în momentul în care alarma SOS este declanșată în modul SMS
- Mesaj de text: vă permite să editați mesajul de urgență predefinit pentru care va fi inclus în SMS-urile de urgență
- Ajutor: vă permite să accesați capitolul SOS din Ghidul utilizatorului (acest capitol)

Sfârșitul capitolului

Telefon

Aplicația Telefon vă permite să efectuați apeluri și să vizualizați istoricul apelurilor.

Răspundeți la un apel

Când sună telefonul, apăsați tasta "Răspunde la apel" pentru a răspunde la apel. Tasta este la capătul din stânga al tastaturii. Se compune din 3 puncte verzi poziționate vertical și în relief.

Bine de știut: În modul inactiv, o scurtă apăsare pe "Răspunde la apel" permite lansarea rapidă a aplicației Telefon.

Bine de știut: Când telefonul sună, puteți apăsa scurt pe una dintre tastele de volum pentru a opri sunetul de apel, astfel încât să puteți auzi numele și numărul apelantului. Apăsați butonul "*" pentru a repeta informațiile.

Închideți un apel

Pentru a termina apelul, apăsați tasta "Închideți apelul". Tasta "Închideți apelul" este prezentă la capătul din dreapta al tastaturii. Se compune din 3 puncte roșii poziționate orizontal și în relief.

Bine de știut: De asemenea, puteți închide un apel prin apăsarea scurtă a tastei "Pornire / Oprire" (consultați opțiunile de Accesibilitate).

Respingeți un apel

Pentru a respinge un apel, apăsați tasta "Închideți apelul".

Bine de știut: Puteți să închideți apelul și să trimiteți un mesaj automat apăsând tasta "#". Apoi selectați din listă tipul mesajului pe care doriți să-l trimiteți. Puteți edita lista mesajelor automate prin opțiunea "Răspunsuri rapide" din setările generale ale aplicației.

Efectuați un apel

Următoarele opțiuni de apel sunt disponibile din ecranul principal al aplicației:

- **Formați numărul:** Vă permite să introduceți manual numărul de telefon cifră după cifră. Confirmați numărul introdus și efectuați apelul apăsând tasta "Răspundeți la apel".
- **Preferate:** Vă permite să accesați rapid contactele Preferate. Pentru a seta un contact ca Preferat, selectați-l din lista de contacte și apăsați lung tasta "OK". Apoi selectați Preferate și confirmați cu tasta "OK".

- **Frecvente:** Ofer acces rapid la contactele pe care le apelezi mai des.

Bine de știut: Puteți terge lista contactelor frecvente prin intermediul tastei "Meniu".

- **Contacte:** Permite accesul la agenda telefonică.

Bine de știut: Puteți filtra lista contactelor scriind numele contactului pe care îl căutați utilizând tastatura.

- **Istoricul apelurilor:** Vă permite să consultați întregul istoric al apelurilor trimise și primite. Aceste apeluri sunt listate de la cel mai recent la cel mai vechi. Selectați un contact din listă și apăsați tasta "OK" pentru a accesa opțiunile suplimentare (de exemplu, sunați numărul, creați contact, adăugați la un contact, trimiteți un mesaj, informații despre apel)

Bine de știut: Puteți terge istoricul apelurilor prin intermediul tastei "Meniu".

- **Căsuța vocală :** oferă acces rapid la serviciul dvs. de mesagerie vocală .
Avertisment: această opțiune, care vă permite să ascultați mesajele căsuței dvs. vocale fără a trebui să formați numărul, poate să nu fie disponibil la toți operatorii de rețea. Cu toate acestea, puteți configura mesageria standard prin intermediul setărilor pentru apeluri. Mesajul vocal poate fi, de asemenea, configurat și atribuit tastei "1", pentru a-l putea folosi în mod mai rapid.

- **Căutare:** Vă permite să căutați un contact în agenda dvs. telefonică .

Mai multe opțiuni sunt disponibile prin intermediul tastei "Meniu" după cum urmează :

- **Generale:** Oferă acces la setările generale ale aplicației Telefon (opțiuni de afișare, sunet și vibrație, răspunsuri rapide, modul TTY)
- **Apeluri:** Oferă acces la setările pentru apeluri (configurare mesagerie vocală , numere autorizate, ajutor pentru ascultare, redirecționare și restricționare apeluri)
- **Apelare rapidă :** vă permite să atribuiți numerele contactelor dvs. la butoanele tastaturii fizice, pentru a avea acces mai rapid la ele. Odată ce ați asociat o tastă cu un număr puteți, direct din ecranul de start, să apăsați tasta respectivă pentru a efectua apelul către acel număr.
- **Ajutor:** Permite vizualizarea capitoului "Telefon" din Ghidul utilizatorului (acest capitol).

Opțiuni în timpul apelului

În timpul unui apel, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Difuzor:** Comut boxa de ieșire a sunetului între difuzorul standard pentru apeluri și difuzorul mai puternic principal SmartVision2 (pentru a putea folosi telefonul în modul hands-free, adică mâini libere).

Bine de știut: o scurtă apă sare pe tasta de comandă vocală comut SmartVision2 în modul hands-free.

- **Silențios:** V permite să dezactivezi microfonul SmartVision2 astfel încât corespondentul dvs. să nu vă poată auzi.
- **Puneți apelul în așteptare:** Puneți apelul curent în așteptare. Apăsăți pe aceeași tastă încă o dată pentru a relua comunicarea.
- **Mai multe opțiuni:** V permite să începeți un alt apel, să treceți la modul conferință sau să înregistrați conversația.

Sfârșitul capitolului

Radio pe Internet

Această aplicație vă permite să ascultați posturile dvs. preferate de radio folosind conexiunea la Internet.

Ascultați un post de radio

Pentru a asculta un post de radio pe internet, scrieți numele radioului pe care doriți să îl ascultați și apăsați tasta "OK" pentru a afișa rezultatele căutării.

După ce sunt afișate rezultatele folosiți-vă de săgețile (sus, jos, stânga, dreapta) din pad-ul de navigare pentru a alege postul pe care îl doriți și confirmați-vă alegerea prin tasta "OK". Redarea va porni automat. Pentru a-o închide folosiți-vă de aceleași săgeți și selectați tasta "Stop", confirmând alegerea tot cu "OK".

Bine de știut: În timpul redării puteți selecta opțiunea "Adaugă la Preferate" din partea de jos a ecranului pentru a salva postul de radio în redare printre favoritele dvs, în caz că o să doriți să îl reascultați.

Alegeți din lista care vă apare radioul pe care doriți să-l ascultați folosindu-vă de săgețile pad-ului de navigare.

Celelalte opțiuni ale serviciului de Radio pe Internet sunt:

- Redate recent: oferă acces rapid la ultimele posturi ascultate recent
- Preferate: vă permite să accesați rapid posturile pe care le-ați salvat printre Preferate
- Toate: vă permite să alegeți dintre toate posturile disponibile în aplicația Radio pe Internet (puteți să alegeți după categorii, artă, podcast etc.)

Bine de știut: În timpul redării, puteți apăsa și pe comanda "Adaugă la Preferate" din partea de jos a ecranului pentru a salva acest post de radio printre Preferatele dvs.

Sfârșitul capitoului

FAQ – Răspunsuri la întrebări frecvente

Informații generale

Trebuie să plătesc pentru actualizările de software?

Nu, toate actualizările SmartVision2 sunt gratuite.

Cum pot să aflu când este disponibilă o actualizare?

SmartVision2 verifică în mod regulat actualizările. Dacă este disponibilă o actualizare, o notificare vă va fi trimisă automat prin bara de notificare.

În orice moment, puteți verifica disponibilitatea unei actualizări din "Setări", "Despre telefon", "Actualizări de sistem".

Nu reușesc să descarc actualizarea, ce ar trebui să fac?

Asigurați-vă că SmartVision2 are acces la o conexiune la Internet deoarece este nevoie de o conexiune pentru a putea descărca actualizarea. De asemenea, este recomandat să utilizați o conexiune Wi-Fi pentru a optimiza timpul de descărcare.

Dacă în timpul descărcării apare o eroare, reporniți actualizarea din "Setări", "Despre telefon", "Actualizări de sistem".

Dacă ați inclus o cartelă de memorie suplimentară în SmartVision2, vă rugăm să o scoateți înainte de a porni actualizarea.

Puteți verifica progresul descărcării prin notificarea de actualizare din panoul de notificare.

După ce descărcarea este finalizată, selectați "Instalare" din ecranul de actualizare a sistemului.

Telefonul meu trece în modul de așteptare prea repede, pot schimba timpul care trebuie să treacă înainte de a intra în modul de așteptare?

Da, aveți posibilitatea de a alege între 7 setări diferite. Când porniți SmartVision2 pentru prima oară, timpul de așteptare este setat la "1 minut". Pentru a-l schimba, accesați "Setări", "Ecran", "Standby" și alegeți timpul de întârziere dorit între 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min sau 30 min.

Cum obțin informații despre starea bateriei, rețeaua wireless, data și ora și mesajele primite?

Pentru a obține informații despre starea telefonului, apăsați simultan tasta diez și tasta 1.

De asemenea, puteți să vocalizați automat aceste informații atunci când deblocați SmartVision2. În mod prestabilit, ora și nivelul bateriei sunt rostite de fiecare dată când ieșiți din modul de așteptare.

Pentru a adăuga mai multe informații, apăsați tasta diez și tasta 0 simultan pentru a deschide "Setările de accesibilitate Kapsys". Apoi selectați elementul "Mesaj de trezire" din listă.

Selectați din lista următoare informațiile care doriți să fie vocalizate atunci când deblocați SmartVision2: Ora curentă, Data curentă, Nivel baterie, Stare rețea, Apeluri pierdute, Mesaje noi, Email nou, Actualizare software nou.

Nu reușesc să introduc text cu tastatura?

În unele cazuri, este posibil ca aplicațiile din Magazin Play să nu fie compatibile cu utilizarea unei tastaturi fizice. În acest caz, este preferat utilizarea tastaturii virtuale.

Pentru a afișa tastatura virtuală, selectați fereastra de introducere și apăsați tasta "OK". Tastatura virtuală apare în jumătatea inferioară a ecranului.

Apoi apăsați degetul pe ecran pentru a umbla prin literele tastaturii virtuale. Scoateți degetul de pe caracterul dorit pentru a confirma înregistrarea.

Pot dezactiva complet ecranul tactil?

Da, apăsați tasta hash apoi tasta zero simultan pentru a deschide "Setările de accesibilitate Kapsys". Apoi bifați opțiunea "Dezactivează ecranul tactil".

Cum schimb dimensiunea informațiilor afișate pe ecran?

Puteți modifica dimensiunea fontului din meniul "Setări", "Accesibilitate", "Dimensiune font".

De asemenea, puteți utiliza gesturile implicite de mărire SmartVision2. Acestea vă permit să măriți zoom-ul prin atingerea ecranului de trei ori rapid. După ce ați mărit zoom-ul, puteți rotiți pagina prin glisarea a două degete pe ecran sau puteți să reduceți nivelul de zoom apropiându-vă două degete pe ecran pornind cu ele îndepărtate sau să procedați invers pentru a mări și mai mult nivelul de zoom.

În cele din urmă, puteți utiliza funcția MagniText apăsați simultan tastele "#" și "6". Această funcție vă permite să afișați pe un singur rând pe ecran ultimele informații rostite. Comutați SmartVision2 în modul peisaj (adică cu ecranul "pe orizontal") pentru a afișa aceste informații pe ecran.

Cum pot să cresc autonomia SmartVision2?

Puteți să dezactivați Wi-Fi-ul, Bluetooth-ul și localizarea GPS dacă nu le utilizați (puteți

face asta și prin comanda rapid : tastele # și 3 apăsat simultan).

De asemenea, puteți scădea luminozitatea ecranului sau utilizați funcția "Ecran negru" pentru a opri afișarea pe ecranul tactil. Pentru a face asta, apăsați simultan tastele # și 0 pentru a deschide setările de accesibilitate, apoi selectați în din listă opțiunea "Ecran negru".

Pot efectua un upgrade pentru a obține aplicațiile Premium SmartVision2?

Da, în mod implicit, aplicațiile OCR, Kapsys și Book Reader (adică aplicațiile Premium SmartVision2), apar pe SmartVision2 pentru o perioadă de probă de 15 zile. Activarea versiunii de încercare se face la prima pornire a aplicației (rețineți că este necesară o conexiune la Internet pentru a lansa și a folosi aplicația în timpul perioadei de încercare). Odată ce perioada de încercare expiră, aplicația va mai fi funcțională, dar puteți contacta revânzătorul dvs. pentru a achiziționa versiunea permanentă a uneia sau mai multor aplicații pe care le doriți.

Sintetizarea și recunoașterea vocii

Cum pot schimba sintetizarea vocală ?

Puteți apăsa și lung pe tasta "Meniu" pentru a deschide Meniul Contextual Global și a selecta apoi "Setări Transformare text în vorbire". Apoi apăsați tasta "Lansați setările motorului" ale vocii Kapsys. Apoi selectați "Setări pentru Kapsys Voice", apoi "selectați voce". Apare lista de voci instalate pe SmartVision2. Selectați vocea pe care doriți să o utilizați și confirmați apășând tasta "OK".

Cum pot descărca o nouă sintetizare vocală ?

În mod implicit, SmartVision2 vine cu o voce masculină și una feminină de calitate standard. Pe lângă acestea, puteți descărca mai multe voci Premium gratuite prin intermediul unei conexiuni la internet.

Pentru a descărca vocile Premium, apăsați și apăsați tasta "Meniu" pentru a deschide Meniul Contextual Global și selectați "Setări Transformare text în vorbire". Apoi apăsați tasta "Lansați setările motorului" ale vocii Kapsys și apoi "Instalați date voce". Selectați vocea pe care doriți să o instalați din listă și confirmați descărcarea apășând "OK".

După terminarea descărcării, apăsați pe "Instalați" din partea de jos a listei. Când instalarea este finalizată, apăsați "OK" de pe sfârșitul listei.

Noua voce este acum disponibilă în "Setările pentru Kapsys Voice".

De asemenea, puteți descărca și alte motoare text-to-speech din Magazin Play (cum ar fi "A cappella", "Google Voice" etc.)

Cum funcționează motorul multilingv de sintetizare vocal ?

Acest motor vă permite să treceți rapid de la o sintetizare vocală la alta. După ce ați activat această modalitate, puteți seta până la trei limbi.

În mod implicit, sunt setate următoarele limbi:

- Limba 1: Francez
- Limba 2: Englez
- Limba 3: German

Puteți să schimbați limbile prin intermediul comenzii "setările motorului".

După configurare, trebuie să asociați o comandă rapidă de la tastatură la opțiunea Multilingvistică.

Pentru a face asta, intrați în Setările de accesibilitate Kapsys și selectați "Comenzi rapide de la tastatură". Selectați o comandă rapidă de la tastatură încă neasignată și apăsați pe OK. Selectați din lista "Schimbarea limbajului de vorbire". De acum veți putea folosi această comandă rapidă pentru a comuta sintetizarea vocală între cele trei limbi predefinite.

Pot să modific viteza vocii?

Da, sunt disponibile mai multe niveluri de viteză în funcție de preferințele dvs. Când porniți SmartVision2 pentru prima dată, nivelul este setat pe "Normal".

Utilizați tastele # și 4 simultan sau tastele # și 5 simultan pentru a scădea, respectiv a măări viteza de rostire.

De asemenea, puteți schimba viteza de vorbire prin apăsarea lungă a tastei "Meniu" pentru a deschide Meniul Contextual Global. Selectați opțiunile "Transformare text în vorbire", apoi selectați "Ritmul vorbirii" și selectați opțiunea dorită dintre următoarele: Încet, Normal, Rapid, Mai repede, Foarte repede, Rapid, Foarte rapid și Cel mai repede.

Cum să reglez volumul telefonului?

SmartVision2 distinge între trei tipuri de volum, iar pentru fiecare dintre acestea se poate regla separat nivelul volumului. Categoriile sunt "Tonuri de apel și notificări", "Multimedia" și "Alarmer"

- Tonuri de apel și notificări:

În mod implicit, tastele de volum "plus" și "minus" din partea dreaptă a produsului modifică direct volumul categoriei "Tonuri de apel și notificări". De asemenea, puteți regla această opțiune pornind din profilul general și apăsând pe rând "Setări", "Sunet și notificare", apoi "Setări dispozitiv" și la următorul "Volum sonerie".

- Multimedia:

Această categorie include sunetul pentru sintetizarea vocală, redarea fișierelor MP3 și clipurilor video. Pentru a schimba sunetul profilului multimedia, pur și simplu utilizați tastele de volum "plus" și "minus" atunci când sintetizatorul vocal vorbește sau când se redă un fișier MP3.

- Pentru a regla volumul alarmei:

Selectați "Setări", "Sunet și notificări", tasta "Setări dispozitiv" din profilul general, apoi "Volum alarmă".

Comanda vocală funcționează fără conexiune la Internet?

Nu, este necesară o conexiune la internet pentru a putea utiliza comanda vocală.

În ce aplicații pot utiliza recunoașterea vocală?

Când vă aflați într-o fereastră de introducere, puteți utiliza butonul de comandă vocală pentru a dicta un text sau conținutul criptat.

De exemplu, în următoarele aplicații:

- Telefon: pentru a dicta un număr de telefon,
- Mesagerie: pentru a dicta conținutul unui SMS,
- Email: pentru a dicta conținutul e-mailului dvs.,

De asemenea, puteți utiliza butonul de comandă vocală pentru a căuta pe Internet sau pentru a lansa anumite funcții.

O listă completă a acțiunilor care pot fi efectuate datorită recunoașterii vocale este disponibilă în [secțiunea Google Support](#) sau prin rostirea cuvintelor cheie "OK Google".

În plus, vă recomandăm să asociați o adresă Gmail cu serviciul "OK Google" pentru a beneficia de toate funcțiile asociate comenzii vocale.

Conectivitate

Cum pot muta fișiere (muzică, documente, ...) pe SmartVision2 folosind calculatorul meu?

Conectați SmartVision2 la calculatorul dvs. prin intermediul cablului USB. Se va afișa o fereastră pentru setarea conexiunii USB. Selectați "Transfer de fișiere". SmartVision2 va fi recunoscut ca un spațiu de stocare extern și vă puteți transfera fișierele în mod liber.

Dacă calculatorul dvs. funcționează cu Windows 10, va trebui să instalați un driver pentru ca SmartVision2 să fie recunoscut ca spațiu de stocare. Pentru a face acest lucru deschideți Managerul de fișiere Windows atunci când SmartVision2 este conectat la calculator. Din lista "Dispozitiv necunoscut", selectați "Actualizare driver". În fereastra următoare, selectați "Căutați un driver pe calculator" și apoi "Alegeți dintr-o listă de drivere de dispozitiv de pe calculatorul meu". Din listă selectați "Telefon Android" și apoi "Dispozitiv USB MTP". Finalizați procedura selectând "Următor" pentru a instala driverul.

Pentru Mac, trebuie să descărcați un software compatibil cu dispozitivul Android, cum ar fi "Transfer de fișiere Android" (Android File Transfer).

Odată ce SmartVision2 este recunoscut de calculator, trebuie să copiați fișierele în memoria internă într-unul din următoarele foldere:

- Căriți descărcări: pentru căriți audio, fișiere pdf, word, txt și html.
- Muzică: pentru muzica dvs. (fișiere MP3)
- DCIM: pentru fotografiile și videoclipurile dvs.
- Alarmer: pentru tonurile dvs. de alarmă
- Tonuri de apel: pentru tonurile de apel ale telefonului dvs.
- Notificări: pentru tonurile de notificare ale telefonului dvs.

Este posibil să extind memoria SmartVision2?

Da, puteți extinde memoria SmartVision2 prin introducerea unui card Micro SD de până la 64 GB. Poziția cardului Micro SD este chiar deasupra locului cartelei SIM.

Pot să conectez o pereche de căști Bluetooth la SmartVision2?

Da, este posibil să conectați o pereche de căști Bluetooth la SmartVision2 pentru a efectua și a primi apeluri. Pentru a face acest lucru, trebuie să activați conexiunea Bluetooth: din aplicația Setări, activați și porniți Bluetooth pentru a detecta toate

dispozitivele din vecinătate. Selectați modelul cîștilor pe care doriți să îl conectați și apăsați "OK" pentru a asocia cele două aparate și apoi introduceți codul PIN (în mod prestabilit codul PIN este de obicei "0000" sau "1234").

Atenție: dacă doriți să ascultați muzică, radioul sau să ascultați sintetizarea vocal SmartVision2, trebuie să aveți un set cu cîști Bluetooth de tip "A2DP" (profil avansat de distribuție audio).

Pot să conectez un ecran Braille la SmartVision2?

Da, un ecran Braille poate fi conectat la SmartVision2. Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să activați "BrailleBack" din setările de accesibilitate. Această funcție vă permite să conectați un ecran Braille la SmartVision2 prin intermediul tehnologiei Bluetooth. Când utilizați BrailleBack, conținutul care de obicei este pe ecranul telefonului, va apărea pe dispozitivul dvs. Braille. Apoi puteți naviga și interacționa cu dispozitivul dvs. utilizând tastele de pe ecranul Braille. De asemenea, puteți introduce text utilizând tastatura Braille.

Pentru mai multe informații despre cum să utilizați BrailleBack și să asociați un ecran Braille, vă rugăm să consultați următorul link: [Google BrailleBack](#).

Telefon și Mesaje

Cum să adaug un contact la "Preferate"?

Pentru a adăuga un contact la "Preferate", accesați cardul de contact din aplicația "Contacte". Apăsați tasta "Menu" și apoi "Adaugă la Preferate".

Cum pot importa contactele mele?

În mod implicit, contactele de pe cartela SIM sunt afișate automat în aplicația Contacte. Pe lângă acestea, puteți importa alte contacte din memoria internă a telefonului sau de pe un card SD. Pentru a face acest lucru, lansați aplicația "Contacte", apoi apăsați tasta "Meniu" și apoi selectați "Import / Export". Alegeți din listă "Import din fișier .vcf" și urmați procedura de importare.

Cum să activez difuzorul în timpul unei convorbiri telefonice?

În timpul unui apel, apăsați scurt butonul de comandă vocal din partea dreaptă a SmartVision2 pentru a activa sau dezactiva difuzorul.

Pot efectua apeluri video?

Da, SmartVision2 are o cameră frontală. Deci, puteți descărca aplicații precum Skype și puteți efectua apeluri video.

Cum să aleg tonul meu de apel?

În SmartVision2 puteți săgisi aproximativ o sută de tonuri de apel dintre care să alegeți.

Pentru a schimba tonul de apel, selectați "Setări", "Sunete și Notificări", "Setări dispozitiv" din profilul general, apoi "Ton de apel telefonic". Selectați tonul de apel pe care doriți să-l utilizați din listă și confirmați prin apăsarea tastei "OK" de la sfârșitul listei.

Pot alocă un ton de apel special unui contact din lista mea de contacte?

Dacă doriți să asociați un anumit ton de apel unui contact, deschideți cardul de contact și apăsați tasta "Meniu" și selectați "Editare". Apăsați din nou tasta "Meniu" și selectați "Setare ton de apel".

Cum să trec în modul silențios?

Selectați "Setări" și apoi "Sunete și notificări". Apoi selectați "Silențios" și confirmați cu "OK".

Pentru a reveni la modul de apelare, selectați "Setări generale" și confirmați cu tasta "OK".

Aceste opțiuni sunt disponibile și în setările rapide SmartVision2, prin apăsarea simultană a tastelor # și 3.

Cum să mai aud o dată datele apelantului?

Când vă sună telefonul, puteți apăsa scurt pe una dintre tastele de volum pentru a opri soneria telefonului, astfel încât să puteți auzi numele și numărul apelantului. Apăsați tasta "*" pentru a mai auzi o dată informațiile.

MP3 player și radio FM

Cum să ascult muzică ?

Lansați pur și simplu aplicația Google Muzic Play.

Trebuie să mă abonez la serviciul Muzic Google Play pentru a-mi asculta fișierele MP3?

Nu, puteți refuza posibilitatea de a vă abona selectând "Nu, mulțumesc" din partea de jos a listei.

În acest mod veți putea oricum să utilizați Google Muzic Play, deoarece oferă o versiune de încercare de 30 de zile.

Cum adaug fișierele mele MP3 la SmartVision2?

Odată ce SmartVision2 este conectat la calculatorul dvs., copiați fișierele MP3 în dosarul "Muzic" din memoria internă.

Apoi aplicația o să vă permit să ascultați melodiile pe care le-ați adăugat.

Ce se întâmplă dacă primesc un apel în timp ce ascult un fișier MP3?

Când primiți un apel, redarea MP3 este întreruptă și telefonul dvs. va suna în mod normal. După închiderea apelului, piesa se reia unde a fost oprit.

Cum să folosesc funcția radio FM?

Radioul FM funcționează numai când și dacă sunt conectate căștile, deoarece ele sunt folosite pe post de antenă. După ce le ați conectat, puteți utiliza butoanele pentru a alege frecvența postului pe care doriți să-l ascultați.

Book Reader

Ce formate poate citi aplicația Book reader?

Aplicația Book Reader vă permite să citiți documente în următoarele formate: Daisy 2.02, Daisy 3.0, Epub, Epub3, Doc, Docx PDF, Txt, html.

Cum să importez cărți audio?

Conectați SmartVision2 la calculator și transferați documentele în folderul "Cărți" sau "Download" (Descărcări) din memoria internă.

De asemenea, puteți utiliza un card de memorie extern; în acest caz, va trebui mai întâi să creați pe card un folder "Cărți".

Nu reușesc să citesc cărțile audio. De ce?

Dacă se întâmplă acest lucru, asigurați-vă că formatul cărții audio este suportat de aplicație și că documentul este bine copiat în folderul "Cărți".

De asemenea, puteți reporni telefonul pentru a forța SmartVision2 să facă o scanare a documentelor stocate.

Am descărcat o carte audio de pe internet, dar nu o pot citi cu SmartVision2. De ce?

Este posibil ca acea carte audio să fi fost comprimată (în format .zip) pentru a optimiza spațiul de stocare. În acest caz, trebuie mai întâi să o dezarhivați prin intermediul aplicației Book Reader.

Pentru a face această operațiune, selectați fișierul comprimat din folderul unde acesta este stocat și confirmați cu tasta "OK". Va apărea o fereastră în care va trebui să confirmați dezarhivarea fișierului selectat. Selectați "OK" folosind tastele de navigare și confirmați cu "OK". Fișierul va fi dezarhivat și pus în folderul "Cărți" din memoria internă (această operațiune poate să dureze câteva minute). Odată ce procesul a fost finalizat va apărea fereastra care vă propune să tergeți fișierul ZIP. Dacă doriți să îl tergeți: cartea a fost deja dezarhivată și salvată pe telefon și nu mai depinde de fișierul ZIP. Documentul dvs. este acum disponibil în "Cărțile mele".

NFC

Ce este tehnologia NFC?

Tehnologia NFC (Near Field Communication) este o tehnologie simplă și intuitivă care vă permite să utilizați telefonul mobil în modalități inovatoare.

O etichetă NFC poate fi legată de informații cum ar fi o pagină Web, un document de text, o configurare sau orice fel de informație. Apoi, puteți să folosiți telefonul pentru a citi informațiile stocate pe eticheta NFC.

Cum funcționează aplicația NFC?

Porniți aplicația NFC și selectați informațiile pe care doriți să le înregistrați pe eticheta NFC (lansarea unui apel, o aplicație, o pagină web, comanda de citire a textului, o notă vocală etc.)

Apoi apropiați spatele telefonului de etichetă pentru a transfera informațiile. După ce ați terminat înregistrarea, puneți eticheta pe suportul dorit (dosar, cutie de medicamente, colaj al mesei etc.)

Atunci când o să mai apropiați spatele telefonului de eticheta NFC, SmartVision2 va începe automat acțiunea asociată etichetei.

Pot să reutilizez etichetele NFC?

Da, puteți utiliza de infinite ori aceeași etichetă NFC. Trebuie doar să înregistrați o nouă informație pe eticheta NFC pentru a o elimina pe cea veche.

Ce tipuri de etichete NFC ar trebui să aleg?

SmartVision2 este compatibil cu orice tip de etichetă NFC. Există etichete de diferite dimensiuni. Dimensiunile etichetelor cresc împreună cu mărirea capacității de memorie. SmartVision2 vine cu 5 etichete NTAG 216 de 888 octeți.

Aceasta corespunde la aproximativ 400 de caractere pentru un mesaj text.

Kapten GPS

Cum funcționează GPS-ul Kapten?

Aplicația Kapten este un sistem de navigație special conceput pentru persoanele cu deficiențe de vedere și se folosește de poziționarea geografică prin intermediul sateliților (sistem GPS).

Este necesară conexiunea la internet pentru a descărca hărțile atunci când programul este folosit pentru prima oară.

Datele relative hărților Kaptan sunt apoi stocate în memoria SmartVision2, astfel încât să puteți utiliza aplicația fără a avea nevoie încontinuu de o conexiune la internet.

Trebuie să introduc o adresă de destinație ca să am acces la ghidarea vocală ?

Nu, puteți utiliza modul de navigare liberă, care vă permite să obțineți o descriere a mediului în timp real. Odată ce această funcție este activată, aplicația Kaptan va anunța strada pe care vă aflați și descrierea următoarei intersecții. Când vă apropiați de o intersecție, aplicația Kaptan vă oferă o descriere a acesteia, rostind numele străzilor care o compun. După ce părăsiți intersecția, aplicația anunță următoarea stradă spre care vă îndreptați.

În timpul unei călătorii, pot fi anunțate Punctele de interes în jurul locației mele?

Da, este posibil ca punctele de interes în jurul dvs. să fie anunțate prin intermediul funcției de Navigare Liberă. Aceasta descrie mediul înconjurător în timp real, intersecțiile, poziția dvs. actuală și punctele de interes precum magazinele, locurile publice, metroul, parcurile auto ... (categoria punctelor de interes anunțate în modul navigarea liberă sunt configurabile din meniul aplicației Kaptan).

Pot să folosesc Kaptan la bordul unui vehicul?

Da, GPS-ul Kaptan are un mod de navigare gândit pentru mașini care vă oferă un itinerar optimizat pentru călătoriile cu un autovehicul.

Când sunt în interiorul unei clădiri, pot să mă plimb în mod virtual pe mapa rutei mele viitoare pentru a ști în avans ce traseu va trebui să parcurg mai încolo?

Da, în modul de citire a mapei puteți naviga virtual și puteți pregăti ruta de acasă, de un punct A la un punct B, fără a avea nevoie de o conexiune GPS.

Ce este un K-Tag?

Un K-Tag este un Punct de interes care a fost marcat de dvs. (de exemplu, o adresă preferată).

Un K-Tag este format din următoarele elemente: o poziție geografică sau o adresă, o categorie și un nume.

Ce este îndrumarea cardinală ?

Modul de îndrumare cardinală vă permite să aveți în timp real informațiile privind distanța și direcția până la punctul de sosire, acestea fiind calculate fără a lua în considerare rețeaua efectivă de drumuri folosibile sau obstacolele care vă pot sta în cale. Calculele sunt făcute ca și cum s-ar putea zbura în linie dreaptă până la destinație. Acest mod de orientare este similar cu navigarea cu busola.

Ce este OCR?

Funcția OCR vă permite să efectuați recunoașterea optică a caracterelor dintr-un document de text și apoi să vocalizați conținutul.

Cum funcționează?

Modul de funcționare este simplu: SmartVision2 face o fotografie a unui document și apoi convertește fotografia în text. Apoi Sintetizarea vocală va rosti conținutul documentului scanat.

Cum poate fi îmbunătățit rezultatul OCR?

Aplicația OCR este echipată cu un sistem de recunoaștere a documentelor capabil să convertească în mod corect un document A4 cu fonturi mai mari sau egale cu 12. Calitatea rezultatului OCR depinde în principal de calitatea cu care se face fotografia documentului. Pentru a îmbunătăți calitatea acesteia, urmați recomandările de mai jos:

- Asigurați-vă că aveți un contrast bun între documentul scanat și suportul pe care se află documentul atunci când faceți poza: de exemplu, ar fi ideal să puneți un document alb pe o masă de culoare întunecată sau pe o față de masă colorată.
- SmartVision2 va detecta marginile documentului pentru a face fotografia. Odată ce toate cele patru colțuri ale documentului se află în câmpul vizual, fotografia va fi făcută automat.
- Asigurați-vă ca telefonul și documentul să fie poziționate cât mai orizontale posibil și rămâneți cu telefonul centrat pe mijlocul documentului atunci când îl scanați. Dacă oșterea se află prea departe de centrul foii, SmartVision2 nu va putea detecta automat conturul documentului.
- Asigurați-vă că vă aflați în condiții de luminozitate bună. Recunoașterea caracterelor nu va fi optimă dacă umbrele ascund textul documentului.
- Asigurați-vă că rămâneți nemișcați în timp ce faceți fotografia. Recunoașterea caracterelor nu va fi optimă dacă imaginea este neclară.

Limitările OCR

Deși tehnologia de scanare OCR a fost îmbunătățită substanțial de-a lungul anilor, niciun software OCR nu efectuează scanări 100% corecte. Există limitări cu privire la materialele sursei și la formatarea caracterelor:

- Numărul de erori depinde de calitatea și de tipul documentului, inclusiv de fontul cu care acesta este scris.
- Conversiunea textului luat dintr-o sursă cu dimensiunea fontului mai mică de 12 puncte va cauza mai multe erori.
- Textul cu un contrast scăzut între culoarea fontului și culoarea hârtiei poate deveni imposibil de scanat.
- Nici un tip de scris de mână nu poate fi recunoscut
- Caracterele cu un contur neclar vor cauza erori.
- Textul luat de pe hârtii lucioase cauzează mai multe greșeli.
- Reflecțiile nedorite pe pagina de scanare vor cauza erori.

Cum se salvează rezultatul conversiunii OCR?

Odată ce rezultatul OCR a fost rostit, puteți utiliza tasta "Meniu" și apoi "Salvați ca notă". Rezultatul va fi salvat și disponibil ca notă în "Note".

Calendar

Cum pot să creez un eveniment?

Din ecranul principal al aplicației Calendar, apăsați și țineți apăsată dreapta pentru a ajunge la tasta "Creează un eveniment nou" și confirmați cu tasta OK.

Apoi selectați "Eveniment" din lista de opțiuni care va apărea și confirmați alegerea cu tasta OK.

Utilizați săgețile de navigare pentru a răsfoii și completa informațiile relative evenimentului (titlu, dată, oră, memento etc.). După ce ați completat tot formularul, utilizați din nou săgețile de navigare pentru a ajunge la tasta "Salvați" din partea de sus a listei și confirmați cu tasta OK. Prin urmare evenimentul a fost creat și adăugat în calendar, iar telefonul va rosti ora și data care au fost setate.

Dacă aveți o conexiune la internet, puteți utiliza și butonul de comandă vocală Ok Google pentru a crea un eveniment.

Dacă doriți să profitați de această posibilitate, apăsați butonul de comandă vocală de pe SmartVision2 și dictați, de exemplu, una dintre următoarele comenzi:

- "Programează o vizită la doctor duminică, la prânz"
- "Adaugă un memento pentru alergare la 7 dimineața"
- "Aminte-te-mi să iau pâine într-o oră"
- "Arată-mi mementourile"

Sintaxa comenzilor vocale Google este liberă. Nu ezitați să încercați mai multe variante.

Odată ce comanda vocală a fost dictată și identificată de Ok Google, puteți utiliza săgețile

de navigare pentru a pune telefonul să o rostesc, sau pur și simplu ca să o verific și sau să modific și informațiile pe care dispozitivul le-a înțeles.

Cum pot să modific un eveniment?

Din ecranul principal al aplicației Calendar, utilizați săgețile de navigare pentru a selecta evenimentul pe care doriți să îl modificați și apăsați tasta OK.

Va apărea o pagină cu rezumatul datelor introduse despre eveniment; utilizați săgețile de navigare pentru a selecta tasta "Editare" și confirmați intenția de a modifica prin tasta OK. Utilizați săgețile din pad-ul de navigare pentru a mișca cursorul pe ecran și a edita câmpurile dorite. Odată ce evenimentul a fost modificat, utilizați din nou săgețile de navigare pentru a ajunge la tasta "Salvează" care se află în partea de sus a listei și confirmați cu tasta OK.

Cum pot să sterg un eveniment?

Din ecranul principal al aplicației Calendar, utilizați săgețile de navigare pentru a selecta evenimentul pe care doriți să îl tergeți și apăsați tasta OK.

Va apărea o pagină cu rezumatul datelor introduse despre eveniment; utilizați săgețile de navigare pentru a selecta tasta "Mai multe opțiuni" și alegeți-o apăsând tasta OK.

Selectați "tergeți" tot folosindu-vă de săgețile de navigare și confirmați cu tasta OK pentru a elimina evenimentul din Calendar.

E-mail

Pot să-mi verific e-mailurile de pe SmartVision2?

Da, aplicația Email este compatibilă cu toate adresele de e-mail. Va trebui pur și simplu să scrieți adresa dvs de e-mail și parola asociată ei ca să puteți verifica e-mailurile dvs. Este totuși nevoie ca telefonul să fie conectat la internet (prin Wi-Fi, 3G sau 4G)

Cum pot să citesc un email?

Odată ce v-ați conectat la contul dvs. de e-mail, utilizați săgețile de navigare pentru a răsfoi e-mailurile. SmartVision2 va rosti titlul e-mailului pe care îl selectați și va spune dacă e-mailul conține un atașament.

Apăsați tasta OK pentru a deschide e-mailul și a vizualiza conținutul acestuia. Utilizați săgețile de navigare pentru a citi diferitele părți ale e-mailului.

În "modalitate de citire a e-mailurilor" sunt disponibile două comenzi rapide de la tastatură:

- tasta "#": deschide e-mailul cu aplicația "Note" pentru a terge imaginile și linkurile. Doar textul va fi păstrat. Vor fi disponibile și comenzile rapide pentru aplicația "Note".
- tasta "*": vă permite să ajungeți direct la atașamente sau la sfârșitul e-mailului.

Cum pot să deschid un atașament?

Selectați din căsuța de inbox e-mailul căruia doriți să-i deschideți atașamentul și confirmați alegerea cu tasta OK. Apăsați tasta "*" pentru a ajunge la atașament.

Apăsați tasta OK pentru a deschide atașamentul.

Atenție: pentru a avea acces la unele atașamente va fi necesară instalarea unei aplicații terțe. Mai jos aveți o listă cu principalele tipuri de atașamente pe care le puteți primi și aplicațiile care vă permit să le deschideți:

- Document Word (doc, docx sau txt): aplicația SmartVision2 "Audio book" sau aplicația "Microsoft Word" descărcabilă din Magazinul Play.

- Document PDF (pdf): aplicația SmartVision2 "Audio book" sau aplicația "Adobe Acrobat Reader" descărcabilă din Magazinul Play.

- Imagini sau poze (jpeg sau png): aplica ia "Google Foto" din SmartVision2
 - Un fișier audio (mp3, mp4 și wav): aplica ia "Muzic Play" din SmartVision2
 - O carte Daisy (Daisy sau Epub): aplica ia SmartVision2 "Audio book"
- Dacă formatul atașamentului nu este recunoscut de SmartVision2, puteți să descărcați din Magazinul Play aplica ia necesară pentru a-l citi.

Cum pot să răspund la un email?

Alegeți e-mailul din căsuța de inbox și confirmați alegerea cu tasta OK. Utilizați săgețile din pad-ul de navigare pentru a ajunge la tasta "Mai multe opțiuni" și confirmați cu tasta OK.

Selectați "Răspunde" sau "Răspunde tuturor" și apăsați OK încercând să apăsați pe tasta OK. Va apărea o casuță de editare unde veți putea introduce textul cu care doriți să răspundeți. După ce ați terminat, folosiți săgețile de navigare ca să alegeți tasta "Trimite" din partea de sus a listei și confirmați cu "OK".

Cum pot să ștearg un email?

Selectați e-mailul din căsuța de e-mail și apăsați tasta ștergere.

Cum pot să ștearg o adresă de email?

Din căsuța de inbox, apăsați tasta Meniu. Utilizați săgețile de navigare pentru a selecta "Setări" și confirmați cu tasta OK.

Tot cu săgețile de navigare selectați "Gestionează conturile" și confirmați cu tasta OK.

Din lista de conturi care apare, selectați adresa de e-mail pe care doriți să o eliminați din memoria SmartVision2 și confirmați cu tasta OK.

Apoi apăsați tasta Meniu și utilizați săgețile de navigare pentru a selecta "Ștergere cont". Validați încercând să apăsați pe tasta OK și confirmați că doriți să-l ștergeți selectând și confirmând opțiunea "Ștergere cont".

Ceas

Cum setez o alarmă ?

Din aplica ia "Ceas", selectați "Alarmă" și confirmați cu tasta OK.

Apăsați săgeata dreaptă pentru a selecta "Adaugă o alarmă" și confirmați cu butonul OK. Folosiți săgețile de navigare pentru a alege ora alarmei.

Apăsați săgeata dreaptă pentru a selecta tasta de confirmare (OK) și apăsați-o pentru a valida crearea alarmei.

Prin urmare alarma dvs. a fost creată și este acum disponibilă în lista de alarme.

Dacă aveți o conexiune la internet, puteți utiliza și butonul de comandă vocală "Ok Google" pentru a crea o alarmă.

Dacă doriți să profitați de această oportunitate, apăsați butonul de comandă vocală de pe SmartVision2 și spuneți, de exemplu, "Creează o alarmă la ora 9". Setarea alarmei va fi apoi confirmată de rostirea unui mesaj vocal.

Ce pot să fac atunci când sună alarma?

Când sună alarma, puteți să procedați în două moduri:

- Repetare: alarma va suna din nou peste 10 minute.
- Ieșire: alarma este oprită.

Utilizați săgețile din pad-ul de navigare pentru a selecta opțiunea dvs. și confirmați cu tasta OK.

Cum pot să activez sau să dezactivez o alarmă ?

Din aplica ia "Ceas", selectați "Alarmă" și confirmați cu tasta OK.

Utilizați șgețile de navigare pentru a selecta "Activare" sau "Dezactivare" și confirmați cu tasta OK.

Cum pot să țin alarma?

Din aplicația "Ceas", selectați "Alarmă" și confirmați cu tasta OK.

Utilizați șgețile de navigare pentru a selecta "Folosire alarmă" și apăsați tasta OK.

Utilizați din nou șgețile de navigare pentru a selecta "Terger alarmă" și confirmați cu tasta OK.

Magazin Play

Ce este aplicația Magazin Play?

Aplicația Magazin Play este o aplicație Google instalată implicit pe SmartVision2, care permite să descărcați pe telefonul dvs aplicații noi, cum ar fi Facebook, Twitter, WhatsApp etc.

Trebuie să știți că să descărcați aplicații noi din Magazinul Play?

Depinde de aplicația pe care doriți să o instalați. Marea majoritate a aplicațiilor sunt gratuite, dar unele dintre ele au un anumit cost pentru a le putea instala și utiliza. Stabilirea acestor prețuri este în afara controlului și responsabilităților KAPSYS.

Cum pot să descărcați aplicațiile din Magazin Play?

Pentru a utiliza Magazinul Play trebuie în primul rând să aveți o conexiune la internet și un cont Google cu o adresă de e-mail asociată care se sfârșește cu @gmail.com.

Dacă nu aveți un cont Gmail, puteți să creați unul în mod gratuit de pe internet, prin intermediul acestui link: [Creează un cont Gmail](#).

Odată ce contul dvs a fost creat, lansați aplicația "Magazin Play" din lista de aplicații. La prima lansare a aplicației, va apărea o fereastră de identificare care vă invită să introduceți adresa dvs. de e-mail și parola.

Pentru a vă conecta la Magazin Play urmați procedura pas cu pas. După ce v-ați conectat, utilizați șgețile din pad-ul de navigare pentru a ajunge la tasta "Căutare" și confirmați cu tasta OK.

Introduceți prin tastatura fizică numele aplicației pe care o căutați și apăsați tasta OK pentru a începe căutarea. Utilizați șgețile de navigare pentru a derula lista de aplicații și apăsați OK pentru a deschide aplicația selectată. Din fișa de rezumat a aplicației, utilizați șgețile de navigare pentru a ajunge la tasta "Instalare" și confirmați cu tasta OK. În funcție de conexiunea la internet de care dispuneți și de mărimea aplicației, procesul de instalare poate dura câteva minute. Odată ce a fost instalat, aplicația va fi disponibilă din lista de aplicații.

Sfârșitul capitoului

Soluții pentru Rezolvarea Problemelor

Înainte de a contacta Serviciul pentru Clienți, citiți recomandările de mai jos:

- Pentru a permite funcționarea optimă a dispozitivului, vă recomandăm să îl opriți din când în când.
- Încărcarea completă a bateriei ajută telefonul să meargă mai bine. Din acest motiv vă recomandăm să o completați des.

și efectuați următoarele verificări:

Telefonul meu nu mai pornește / ecranul telefonului e negru:

- Apăsăți tasta "On/Off" până când ecranul se aprinde.
- Verificați nivelul de încărcare al bateriei.
- Verificați contactele bateriei, scoateți și puneți la loc bateria, apoi porniți din nou telefonul.

Ecranul meu este greu de citit:

- Curățați ecranul dvs.
- Reglați luminozitatea ecranului în funcție de condițiile de iluminare a mediului (există și posibilitatea de a o seta rapid din bara de notificare).

Telefonul meu mobil se închide singur:

- Apăsăți tasta "On/Off" pentru a-l reporni.
- Verificați nivelul de încărcare al bateriei.

Telefonul meu mobil are un nivel scăzut de autonomie:

- Asigurați-vă că ați respectat timpul necesar pentru încărcarea completă (minimum 4 ore).
- Pentru a crește durata de viață a bateriei, puteți dezactiva funcțiile Wi-Fi, Bluetooth și GPS dacă nu aveți nevoie de ele (există și posibilitatea de face toate acestea

mai rapid din bara de notificare).

Telefonul meu mobil nu se încarc corect:

- Asigurați-vă că bateria dvs. nu este complet descărcată .
- Asigurați-vă că încărcarea se efectuează în condiții normale (între 0°C și +40°C)
- Verificați dacă bateria este introdusă . Trebuie să fie introdusă înainte de a conecta încărcătorul.
- Asigurați-vă că utilizați bateria și încărcătorul furnizate de KAPSYS.
- Când vă aflați în străinătate, verificați dacă sursa de curent electric este compatibilă .

Telefonul meu mobil nu se conectează la o rețea:

- Încercați să vă conectați dintr-o altă locație.
- Verificați dacă furnizorul dvs. de servicii de telefonie acoperă zona unde vă aflați
- Asigurați-vă că modul avion este dezactivat.
- Verificați, contactând furnizorul de servicii telefonice, dacă cartela dvs. SIM este validă .
- Încercați să vă conectați mai târziu (este posibil ca rețeaua să fie supraîncărcată) .
- Scoateți și puneți la loc cartela SIM.

Interfața vocală nu merge:

- Dacă vă aflați în modul de traducere din limba scrisă în limba vocală , verificați conexiunea de date (Wi-Fi, 3G).
- Asigurați-vă că ați introdus în mod corect cuvântul cheie sau comanda vocală

Eroare a cartelei SIM / Nu poate fi accesat nici o funcție a telefonului:

- Verificați dacă ați introdus corect cartela SIM.
- Verificați dacă cipul de pe cartela SIM nu este deteriorat sau zgâriat.

Nu reușiți să efectuați apelurile:

- Asigurați-vă că ați format un număr valid.
- Pentru apelurile internaționale, verificați codurile relative Țării în zonei unde vreți să sunați.
- Asigurați-vă că telefonul mobil este conectat la o rețea și că rețeaua nu este supraîncărcată sau indisponibilă.
- Dacă sunteți în străinătate, consultați furnizorul dvs. de servicii de telefonie pentru a afla dacă opțiunile pentru apelurile internaționale sunt incluse în pachetul dvs.
- Asigurați-vă că modul avion este dezactivat.

Nu reușesc să primesc apeluri:

- Asigurați-vă că telefonul mobil este pornit și conectat la o rețea (verificați dacă rețeaua este supraîncărcată sau indisponibilă).
- Asigurați-vă că modul avion este dezactivat.

Calitatea apelurilor este slabă :

- Puteți regla volumul în timp ce efectuați un apel, utilizând tastele Volum + și Volum – aflate în partea stângă a telefonului.
- Verificați indicatorul de intensitate a semnalului de rețea în bara de stare.

Când aleg un număr din lista mea de contacte, numărul nu este format:

- Asigurați-vă că numărul a fost salvat corect.
- Asigurați-vă că numărul a fost salvat cu prefixul Țării (când apelați din străinătate).

Persoanele care mă apelează nu pot să-mi trimită mesaje pe căsuța mea de

mesagerie vocal :

- Consultați furnizorul de servicii de telefonie ca să aflați dacă această funcție este disponibilă .

Nu pot accesa mesageria vocal :

- Verificați dacă ați introdus corect numărul asociat mesageriei vocale a furnizorului dvs. de servicii de telefonie.

- Încercați mai târziu dacă rețeaua este ocupată .

Cartela SIM este blocat

- Ați introdus de 3 ori codul PIN în mod incorect. Contactați furnizorul dvs. de servicii de telefonie pentru a obține codul PUK.

Sfârșitul capitoului

Specifica ii tehnice

SISTEMUL DE OPERARE

- Android 6.0

DESIGN

- Dimensiuni : 152 x 66 x10mm
- Greutate : 150g
- Touchscreen : 4" LCD IPS

HARDWARE

- Tipul procesorului : Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHz
- Memorie intern : RAM 2GB, Flash 16GB
- Memorie extern : pân la64GB
- Re ele celulare suportate:
4G LTE
3G+/ 3G
2G
- Conectivitate Wireless (f r cabluri):
Bluetooth 4.0 BLE
WLAN 802.11 a/b/g/n 5GHz
- Receptor satelit : GPS, Glonass cu suport A-GPS
- Al i senzori : accelerometru, senzori de proximitate i luminozitate, compas digital
- Formatul Cartelei SIM: 4FF
- Mufe : Audio jack 3.5 mm, USB tip C
- Consumul de energie :
Bateria : 2700mAh Li-ion
Autonomie în timpul de a teptare : 350 ore
Autonomie în convorbire : 12 ore
- DAS : 0.178 W/Kg

CAMERA

- Rezolu ie: 2 Mpixel fa / 8 Mpixel spate
- Video : HD 720p @ 30 fps
- Focalizare : manual i automat

- Zoom Digital: 4x
- Flash : 2 LED-uri

Sfâr itul capitolului

Dispoziții legale și Garanție

Sugestii pentru utilizarea precaută și recomandări

- Manipulați cu atenție SmartVision2 și accesoriile acestuia, nu le aruncați și nu le loviți
- Nu demontați produsul deoarece acest lucru va duce la anularea garanției
- Curățați produsul numai cu o cârpă moale și puțin umedă. Nu utilizați substanțe chimice, detergenți sau produse abrazive
- Acest produs nu este impermeabil. Protejați-l de umezeală și de stropire
- Nu utilizați niciodată dispozitivul în apropierea unei surse de căldură și nu puneți aparatul în locuri fierbinți, umede sau corozive
- Nu utilizați produsul în apropierea câmpurilor magnetice
- Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este rupt sau crăpat, deoarece acestea pot provoca răni
- Nu folosiți produsul în zone cu potențial exploziv
- Nu încălziți produsul la temperaturi de sub 0 °C (32 °F) sau de peste 45 °C (113 °F)
- Nu utilizați produsul în unitățile sistemului de îngrijire a sănătății și întrebați personalul autorizat înainte de a utiliza telefonul în preajma unui echipament medical
- Nu expuneți produsul la temperaturi extreme. (1) Intervalul de temperatură în care telefonul poate să funcționeze este între -10 °C (+14 °F) și +55 °C (131 °F); (2) telefonul poate fi lăsat pentru perioade scurte de timp la temperaturi cuprinse între -20 °C (-4°F) și +60 °C (140 °F) (3) telefonul poate fi lăsat pentru perioade mai lungi la temperaturi cuprinse între -10 °C (-4 °F) și +25 °C (77 °F)
- Produsul dvs. Are o baterie de litiu-polimer încorporată. Pentru a mări durata de viață a bateriei, încălziți-o întotdeauna complet
- Utilizarea prelungită a produsului poate provoca încălzirea lui

- Pentru o putea obține performanțele optime ale dispozitivului, vă recomandăm să îl opriți din când în când și scoateți bateria.

Siguranță și sănătatea

- Păstrați produsul departe de copii mici
- Păstrați-vă mâinile libere atunci când conduceți: conduceți mai înăuntru într-un mod sigur și responsabil și respectați regulile de trafic
- Protejați-vă auzul: evitați expunerea prelungită la sunete puternice atunci când utilizați căștile sau difuzoarele
- Dacă purtați un stimulator cardiac (pacemaker) sau dacă trăiți în apropierea unei persoane care îl poartă, vă recomandăm să solicitați sfatul medicului dumneavoastră sau al producătorului stimulatorului cardiac cu privire la compatibilitatea acestuia cu un dispozitiv fără fire
- Echipamentul de transmisie radio poate interfera cu utilizarea eficientă și sigură a unor echipamente medicale atunci când acestea nu sunt protejate în mod corespunzător

Garanție

În caz de defecțiune, contactați vânzătorul.

Produsul nu este acoperit de garanție în următoarele cazuri (indiferent de cum se reflectă defecțiunea pe funcționarea telefonului):

- Uzură normală a produsului și reducerea capacității de încărcare a bateriei
- Daune cauzate de o utilizare neatențată și inadecvată, de folosirea produsului în locuri cu nivel ridicat de umiditate, de apropierea telefonului de surse de căldură sau de contactul telefonului cu apă sau alte lichide
- Dispozitive sparte sau rupte, sau dispozitive cu semne vizibile de lovituri
- Nerespectarea măsurilor de precauție în timpul utilizării sau a măsurilor pentru evitarea accidentelor. Utilizarea incorectă sau neglijentă; utilizarea neconformă cu instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul, sau cu destinația comercială a produsului
- Scurtcircuitul bateriei sau utilizarea bateriei într-un alt dispozitiv decât SmatVision2

- Utilizarea accesoriilor sau a conectorilor care nu au fost furnizați de producător
- Pagubele cauzate de o încercare de reparație efectuată de o persoană care nu a fost autorizată de producător

Se recomandă să efectuați una sau mai multe copii de rezervă (backup) ale datelor salvate în produsul dvs. Distribuitorul produsului nu poate fi tras la răspundere pentru pierderea acestor date în cazul unei defecțiuni, unei reparații sau înlocuirii produsului.

Orice defecțiune cauzată de serviciile de rețea / sau de sistemul celular de telefonie mobilă nu este acoperit de garanție. În eventualitatea în care se vor verifica aceste defecțiuni va trebui să contactați direct furnizorul dvs de servicii de telefonie sau furnizorul de servicii internet pentru asistență.

Garanție limitată și Răspundere

GARANȚIE LIMITATĂ

Kapsys, producătorul dispozitivului, cu sediul social pe avenue du Docteur Maurice Donat nr. 694, Mougins Sophia Antipolis (06250), Franța, garantează că produsul respectă descrierea acestuia (și disponibil pe site-ul www.kapsys.com), în conformitate cu prevederile Articolelor L.211-1 și următoarele din Codul Consumului din Franța.

Kapsys garantează cumpărătorului inițial că, de la data cumpărării și atâta timp cât va utiliza în condiții normale și în conformitate cu destinația lui, produsul nu prezintă defecte de manipulare și materiale.

SmartVision2 este acoperit de garanție pe o perioadă de doi (2) ani, iar accesoriile lui, inclusiv bateria, sunt acoperite de garanție pe o perioadă de șase (6) luni de la data achiziționării.

În timpul acestei perioade de garanție comercială, produsul poate fi reparat sau înlocuit gratuit (cu excepția costului de transport) de Kapsys sau de prestatorii de servicii autorizați.

Dacă produsul nu poate fi utilizat sau dacă nu va putea fi utilizat timp de mai mult de șapte (7) zile, perioada de garanție a produsului reparat în garanție este prelungit automat cu durata reparației.

Garanția Kapsys nu acoperă :

- Uzura normală a produsului și reducerea capacității de încărcare a bateriei
- Deteriorările rezultate dintr-o utilizare necorespunzătoare, expunerea la umiditate, udarea sau folosirea telefonului în apropierea unei surse de căldură

- Dispozitivele sparte sau rupte sau dispozitive cu urme vizibile de oc
- Daunele cauzate de folosirea neglijentă sau de nerespectarea măsurilor de precauție în timpul utilizării, măsurile pentru evitarea accidentelor, a utilizării incorecte sau a utilizării neconforme cu instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul
- Scurtcircuitul bateriei sau utilizarea bateriei într-un alt dispozitiv decât SmartVision2
- Utilizarea accesoriilor sau a conectorilor care nu sunt furnizați de KAPSYS
- Daunele cauzate de o încercare de reparație efectuată de o persoană neautorizată de Kapsys

Garanția limitată a căcum este explicat în acest document și care respectă legislația aplicabilă exclude orice altă garanție implicită și / sau obligație care îi revine vânzătorului, în special, dar nu se limitează la nicio obligație din punctul de vedere al calității, al fiabilității sau al disponibilității corecte sau exacte a răspunsurilor, a rezultatelor și a informațiilor furnizate de produs sau accesibilitatea datelor. Vă recomandăm să faceți una sau mai multe copii de siguranță ale datelor stocate în produsul dvs. KAPSYS nu poate fi tras la răspundere pentru pierderea datelor rezultate din defecțiunea, repararea sau înlocuirea produsului.

Limitare a răspunderii

În limita legislației aplicabile, KAPSYS nu poate fi considerat răspunzător în niciun caz față de dvs., și de niciun alt utilizator sau terț parte pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, accidentale sau punitive de orice natură (prejudiciu, pierderi de venituri, pierderea fondului comercial, pierderi de oportunități de afaceri, pierderi de date și / sau pierderi de profit, ...), derivate din clauze contractuale ori infracțiuni, indiferent de previzibilitatea acestora sau dacă KAPSYS a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. În niciun caz, răspunderea totală a KAPSYS nu va depăși suma primită de la dvs., indiferent de legislația aplicabilă. Cele menționate anterior nu afectează niciun drept legal în cazul în care acesta nu este revendicat.

Serverele de rețea și serviciile de sistem celular sunt furnizate de terți prin intermediul sistemelor de comunicații, a rețelelor și a suporturilor media asupra cărora KAPSYS nu are control și prin urmare nu asigură disponibilitatea și eficiența operațiilor lor. Vă recomandăm să contactați direct furnizorii acestor servicii pentru orice suport legat de serviciile lor.

Despre rata specifică de absorbție a energiei (SAR)

SmartVision2 este un transmisor / receptor wireless. Acesta a fost proiectat și fabricat astfel încât să respecte parametri care reglementează expunerea la frecvențe radio (RF) recomandate de Uniunea Europeană.

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele UE (1999/519 / CE) privind limitarea expunerii publicului la câmpurile electromagnetice pentru protecția sănătății. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de consiliul european pentru telefoanele mobile este "rata specifică de absorbție" (SAR). Această limită SAR este de 2,0 W / kg în medie pe 10 g de țesut corporal. Acest dispozitiv îndeplinește cerințele Comisiei internaționale pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) și standardul european EN 62209-1 / EN 62209-2 pentru dispozitivele radio mobile.

Pentru când telefonul va fi folosit în apropierea corpului uman, acesta a fost testat cu accesorii care nu conțin metal și care poziționează receptorul la nu mai puțin de 1,5 cm de corp. Utilizarea altor accesorii poate să nu garanteze respectarea expunerii la frecvențe radio. Dacă nu utilizați un accesoriu pentru apropierea telefonului la corp și când nu țineți telefonul la ureche, poziționați receptorul la o distanță de minim 1,5 cm de corp atunci când aparatul este pornit.

În timpul utilizării, nivelul actual al SAR este de obicei mult mai mic decât valoarea maximă. În general, cu cât vă aflați mai aproape de antenă, cu atât este mai mică puterea cu care telefonul dvs. va transmite transmisia a telefonului dvs. mobil. Pentru a reduce expunerea la energie RF, utilizați un accesoriu hands-free sau altă opțiune similară pentru a ține dispozitivul departe de cap și corp.

Valorile maxime SAR ale acestui dispozitiv sunt:

- Cap: 0.178 W/Kg (media pe 10g de țesut corporal)
- Corp: 1.148 W/Kg (media pe 10g de țesut corporal)

Serviciu Client

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați Serviciul Client al vânzătorului dvs. sau să ne trimiteți un e-mail la: Serviciu Client, KAPSYS - 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Franța.

Puteți găsi mai multe pe website-ul nostru: www.kapsys.com.

Marchi înregistrate

Marcile și produsele menționate în acest document și în ghidul de utilizare rapidă sunt mărci comerciale, înregistrate sau neînregistrate, de inute de proprietarii respectivi, după cum urmează:

Cuvintele, mărcile și logo-urile Kapsys sunt mărci comerciale înregistrate ale Kapsys SAS.

Cuvintele, mărcile și logo-urile precum Android, tastatura Google, Google Reader, Magazin Play, Google Muzic Play, Parametrii Google sunt mărci comerciale înregistrate ale Google Inc. în Statele Unite și / sau în alte țări.

Numele, mărcile și logo-urile ABBYY sunt mărci comerciale înregistrate ale ABBYY Software Ltd.

Numele, mărcile și logo-urile Bluetooth sunt mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG Inc.

Nuance este marcă comercială înregistrată a Nuance Corporation Inc.

Toate mărcile comerciale și numele produselor sunt denumiri comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

Despre acest document

Informațiile publicate aici pot fi modificate fără notificare suplimentară. KAPSYS își rezervă drepturile de a modifica conținutul acestui manual fără a își asuma obligația de a informa persoane sau organizații. KAPSYS nu își asumă răspunderea pentru erorile sau omisiunile tehnice și editoriale prezente în acest document; nici pentru daunele cauzate de accidente sau pentru cele cauzate în urma utilizării acestui manual. KAPSYS se străduiește în continuu să îmbunătățească calitatea și funcțiile acestui produs; prin urmare KAPSYS vă încurajează să vizitați website-ul firmei (www.kapsys.com) pentru a obține ultimele actualizări privind utilizarea și funcționalitățile produsului.

Sfârșitul capitolului

Despre acest manual

Informațiile publicate aici pot fi modificate fără notificare suplimentară. KAPSYS își rezervă drepturile de a modifica conținutul acestui manual fără a își asuma obligația de a informa persoane sau organizații. KAPSYS nu își asumă răspunderea pentru erorile sau omisiunile tehnice și editoriale prezente în acest document; nici pentru daunele cauzate de accidente sau pentru cele cauzate în urma utilizării acestui manual. KAPSYS se străduiește în continuu să îmbunătățească calitatea și funcțiile acestui produs; prin urmare KAPSYS vă încurajează să vizitați website-ul firmei (www.kapsys.com) pentru a obține ultimele actualizări privind utilizarea și funcționalitățile produsului.

Produsul îndeplinește cerințele marcii CE pentru mediurile rezidențiale, comerciale și industriale. Folosirea căștilor pentru perioade îndelungate cu sonorul la nivel maxim poate afecta aparatul auditiv al utilizatorilor.

Sfârșitul capitoului