

## SmartVision2

### Note de mise à jour – software version n° SV2.5989

#### Procédure de mise à jour logicielle

Une connexion internet est requise pour installer la mise à jour SmartVision2.

Pour mettre à jour votre produit, aller dans « Paramètres », sélectionner « A propos du téléphone », puis enfin sélectionner « Mise à jour du système » en haut de la liste et appuyer sur le bouton OK pour démarrer le téléchargement.

Le temps de téléchargement peut être long compte tenu de la taille de la mise à jour (environ 600 MO), et dépend de la qualité de votre connexion internet.

Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionner « Installer » depuis l'écran de « Mise à jour du système ». Le processus de mise à jour prendra alors un moment avant que le produit redémarre et qu'il soit de nouveau opérationnel (démarrage de la vocalisation).

#### Amélioration système

- **Général :**
  - Correction des Bugs.
  - Amélioration des performances.
  - Amélioration des traductions et de la vocalisation.
  - Nouvelles langues disponibles : Arabe, Russe.
  - Mise à jour des correctifs de sécurité Android / Google.
- **Système :**
  - Augmentation du niveau sonore maximum du haut-parleur principal.
  - Annonce du niveau sonore après modification.
  - Correction du problème intermittent de blocage de la navigation dans les listes longues.
  - Réorganisation en fonction des langues des caractères associés aux touches du clavier pour un accès plus rapide aux caractères spéciaux et accentués.
  - Amélioration du temps de démarrage du produit lié à l'installation de certaines applications volumineuses.
  - SmartVision2 est maintenant compatible avec l'application « [Assistant](#) » de Google.

#### Amélioration des applications

- **Accessibilité :**
  - Amélioration de BrailleBack : les curseurs routine peuvent maintenant être utilisés dans les zones de saisie pour déplacer le curseur d'édition, ce qui facilite l'édition de texte sur plage braille.
  - Amélioration de la configuration des raccourcis clavier. La liste des actions est maintenant triée par catégorie.
  - Zone de modification :
    - Annonce de la suppression d'un caractère en majuscule.
    - Majuscule automatique sur la première lettre (sauf pour les mots de passe).

- **Alarme :**
  - Amélioration de l'accessibilité lorsque l'alarme sonne et que le téléphone est éteint pour arrêter ou répéter l'alarme.
- **Caméra :**
  - Nouvelle fonctionnalité : détection et annonce du nombre de visages.
- **Contacts :**
  - Amélioration de la recherche des contacts avec le clavier physique.
- **Détecteur de luminosité :**
  - Nouvelle fonctionnalité : la touche « 1 » du clavier permet de changer le mode d'annonce (Pourcentage ou signal sonore).
- **Dictaphone :**
  - Amélioration de la vocalisation du nom des enregistrements audio : annonce de la date de création.
- **Gestionnaire de fichier :**
  - Nouvelle fonctionnalité : « Renommer » un fichier.  
Appui long sur la touche « OK » lorsque vous sélectionner un fichier pour accéder aux options Copier / Couper / Coller / Renommer.
- **Kapten :**
  - Nouvelle fonctionnalité : option d'achat de la mise à jour de la cartographie.  
Pour obtenir les conditions commerciales, merci de vous rapprocher de votre revendeur.
  - Amélioration du retour vocal des actions liées aux raccourcis clavier.
  - Amélioration de la précision des numéros de rue lors d'une saisie d'adresse de destination par la reconnaissance vocale.
- **Livre Audio :**
  - Correction du problème de coupure de la lecture de certains livres audio.
  - Correction du problème de décompression de fichiers contenant des caractères spéciaux.
- **Message :**
  - Correction du problème lié à la gestion d'un grand nombre de discussions.
  - Amélioration du processus de sauvegarde des pièces jointe d'un MMS. L'appui long sur « OK » ouvre maintenant systématiquement le menu contextuel permettant de sauvegarder les éléments reçus.
  - Nouvelle fonctionnalité : possibilité d'insérer des « émoticônes » depuis la touche « Menu » lors de la rédaction d'un SMS.
  - Nouvelle fonctionnalité : suppression directe d'une conversation via la touche « Effacer » du clavier.
- **Note :**
  - Nouvelle fonctionnalité : lecture par phrase.
  - Modification des raccourcis clavier en mode lecture.
    - Touche « 0 » : Lecture / pause de la note.
    - Touche « 1 » : Lecture du caractère à gauche du curseur.
    - Touche « 2 » : Lecture du caractère à droite du curseur.
    - Touche « 4 » : Lecture du mot à gauche du curseur.
    - Touche « 5 » : Lecture du mot à droite du curseur.
    - Touche « 7 » : Lecture de la phrase à gauche du curseur.

- Touche « 8 » : Lecture de la phrase à droite du curseur.
- Touche « \* » : Retour en début de note.
- Touche « # » : Retour en fin note.
- **OCR :**
  - Nouvelle fonctionnalité : mise en pause et reprise de la lecture du résultat de l'OCR en appuyant sur la touche « 0 » du clavier.
- **Téléphone :**
  - Correction du problème de non disponibilité des touches « \* » et « # » lors de l'appel à un serveur vocal.
  - Nouvelle fonctionnalité : suppression directe d'une conversation via la touche « Effacer » du clavier.
  - Correction du problème de suppression des appels en numéros masqués depuis l'historique des appels.

## Nouvelles applications

- **Calendrier :**
  - Ajout d'une application agenda simplifiée.  
Pour plus d'informations, merci de consulter le manuel utilisateur.
- **Mise à jour d'application :**
  - Possibilité de gérer les mises à jour d'application KAPSYS sans avoir à télécharger la mise à jour logicielle complète.