

MiniVision

Käyttöohje

Näköpiste Polar Print Oy

Nuijamiestentie 5 A

00400 Helsinki

09 6150 0124

info@polarprint.fi

www.polarprint.fi

Sisällys

Esittely	5
Pakkauksen sisältö	5
Tuotteen kuvaus	6
Aloitutus	8
SIM-kortin asettaminen	8
Akun lataaminen	8
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen	8
Lepotila	8
SIM-kortin lukituksen avaaminen	8
Käyttöliittymästä	9
Valikoissa liikkuminen	9
Äänenvoimakkuuden muuttaminen	10
Näppäimistöllä kirjoittaminen	10
Sanelu	10
Puhekomennot	11
Käytettävissä olevat puhekomennot	11
Tekstin poistaminen	12
Tekstin muokkaaminen	12
Tekstikenttien valikko	12
Tekstikentän komennot	12
Käyttöapukomennot	12
Aloitutusnäyttö ja sovellusluettelo	13

Aloituspöytäkirja	13
Sovellusluettelo	13
Puhelin	14
Puheluun vastaaminen	14
Puhelun lopettaminen	14
Puhelun hylkääminen	14
Puhelun soittaminen	14
Puhelunaikaiset asetukset	15
Puheluhistoria	15
Asetukset	16
Yhteystiedot	16
Yhteystietojen tuonti	16
Yhteystiedon luominen	17
Yhteystiedon muokkaaminen	17
Yhteystiedon poistaminen	17
Kaikkien yhteystietojen poistaminen	18
Etsi yhteystieto	18
Yhteystiedolle soittaminen	18
Viestin lähettäminen yhteystiedolle	18
Jaa yhteystieto tekstiviestillä	18
Vie yhteystiedot	18
Viestit	18
Viestien hallinta - Keskustelutila	19
Uusi viesti	19
Viestin lähetys useille vastaanottajille	19
Viestin lähettäminen edelleen	19
Lue uudet viestit	19
Viestiin vastaaminen	20
Viestin poistaminen keskustelusta	20
Keskustelun poistaminen	20
Kaikkien keskusteluiden poistaminen	20
Yhteystiedon luominen tuntemattomasta numerosta	20
Yhteystiedolle soittaminen	20
Asetukset	20
Viestien hallinta - Kronologinen tila	21
Viestin lähettäminen	21

Viestin lähetys useille vastaanottajille	21
Viestin lähettäminen edelleen	21
Lue uudet viestit	22
Viestiin vastaaminen	22
Viestin poistaminen	22
Kaikkien viestien poistaminen	22
Yhteystiedon luominen tuntemattomasta numerosta	22
Yhteystiedolle soittaminen	22
Hälytykset	22
Hälytyksen lisääminen	23
Hälytyksen pysäyttäminen	23
Hälytyksen muokkaaminen	23
Hälytyksen tilan vaihtaminen	23
Hälytyksen poistaminen	24
Kaikkien hälytysten poistaminen	24
Kalenteri	24
Tapahtuman lisääminen	24
Hälytyksen pysäyttäminen	24
Tapahtuman muokkaaminen	25
Tapahtuman poistaminen	25
Kaikkien tapahtumien poistaminen	25
Tapahtuman etsintä	25
FM Radio	25
Radion kuuntelu	25
Aseman lisääminen suosikkeihin	26
Värintunnistin	26
Ilmoita värit	26
Etsi väri	26
Hälytyksen tyyppi	26
Laskin	27
Laske	27
Muistiinpanot	27
Muistiinpanon luominen	27
Muistiinpanon poistaminen	27
Kaikkien muistiinpanojen poistaminen	27
Muistiinpanon muokkaaminen	28

Muistiinpanon tekstin kopioiminen	28
Muistiinpanon vieminen.....	28
Taskulamppu	28
Sää	28
SOS.....	28
Vaihda SOSin tilaa.....	28
Määrittäminen.....	29
Setelintunnistin.....	29
Tietokannan päivittäminen	29
Setelin tunnistaminen	29
Asetukset	30
Näyttö	30
Puhe.....	30
Bluetooth.....	31
Langaton verkko	32
Verkko.....	32
Suojaus	32
Kieli	33
Näppäimistö	33
Pikavalinta	33
Päivämäärä & aika	33
Tietoja puhelimesta	34
Tekniset tiedot.....	34
Komponentit.....	34
Ongelmatilanteissa.....	35
Puhelin ei käynnisty / näyttö on musta.....	35
Näyttö ei ole luettava	35
Puhelin sammuu itsestään	35
Puhelimessa on vähäinen akun varaus.....	36
Puhelin ei lataa kunnolla	36
Puhelin ei ole Internet-yhteydessä.....	36
SIM-korttinvirhe	36
En voi soittaa	36
En voi vastaanottaa puheluita.....	37
Puhelujen äänenlaatu on huono	37
Numeroa ei valita, vaikka valitsen yhteystiedon.....	37

Minulle ei voi jättää puhepostia.....	37
En pääse vastaajaani.....	37
Lukitsin SIM-korttini	37
Ohjeesta.....	37
Takuutiedot	37
Käyttösuosituksia ja -varoituksia	37
Turvallisuus.....	38
Takuu	38
Specific Absorption Rate Information	39
Asiakaspalvelu	39
Tavaramerkeistä	40
Liite A: Ohjausnäppäinten toiminnot	40
Liite B: Numeronäppäinten toiminnot	40
Liite C: Esteettömyyspikanäppäimet.....	41
liite D: Tekstikentän pikanäppäimet.....	41

Esittely

MiniVision on erityisesti sokeille ja heikkonäköisille suunniteltu puhelin. Fyysinen näppäimistö ja puhuva käyttöliittymä tekevät siitä helppokäyttöisen. Käyttöliittymä ja toiminnot on suunniteltu helpottamaan jokapäiväistä elämää.

Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on ohjata sinua puhelimen käytössä askel askeleelta.

Pakkauksen sisältö

- laturi, 220V, 5V USB
- micro-USB -johto
- kuulokkeet
- kaulahihna
- pikaohje

Lisälaitteet, määrittelyt ja tuoteversiot saattavat vaihdella maittain.

Puhelin tai lisälaitteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Suosittellemme, että käytät vain KAPSYSin tarjoamia lisälaitteita. Muiden lisälaitteiden käyttö saattaa johtaa ongelmiin ja takuun ulkopuolella oleviin häiriöihin.

Tuotteen kuvaus

Etupaneeli

Etupaneelissa on kaksi selvästi erottuvaa osaa.

Etuosan yläosassa on 2,4 tuuman näyttö. Näytön kirkkautta, tekstin kokoa ym. näyttöasetuksia pääset muuttamaan asetusten kohdasta Näyttö.

Näytön yläpuolella on kuuloke, jota käytetään puheluihin.

Näytön alapuolella on fyysinen näppäimistö. Se on jaettu kahteen osaan.

Ylempi osa on ohjausosio, jonka avulla voit liikkua valikoissa, avata sovelluksia jne.

Tämän osan näppäimet ovat seuraavat:

Keskellä on pyörästetty, suorakaiteen muotoinen navigointinäppäin. Sen jokainen sivu on painettava ja mahdollistaa toiminnon suorittamisen. Tässä ohjeessa näistä toiminnoista käytetään nimityksiä oikealle, vasemmalle, ylös ja alas. OK tarkoittaa navigointinäppäimen painamista keskeltä suoraan alas. Sillä voidaan vahvistaa nykyinen kohta.

Kuvaus navigointinäppäimen toiminnoista:

- ylös: valitsee edellisen kohteen
- alas: valitsee seuraavan kohteen
- vasemmalle: vähentää äänenvoimakkuutta
- oikealle: lisää äänenvoimakkuutta
- OK: valitse nykyinen kohde

Hyvä tietää

OK-näppäimen pitkä painallus aktivoi tuotteen äänentunnistuksen. Tällöin voit sanella tekstikenttään (vaatii Internet-yhteyden). Lisätietoja saat Sanelu-kohdasta.

Navigointinäppäimen vasemmalla puolella on kaksi painiketta, jotka ovat ylhäältä alas valikko- ja soittopainike. Nämä on erotettu toisistaan vaakaviivalla.

- neliöllä merkitty valikkonäppäin: näyttää nykyiseen näyttöön tai sovellukseen liittyvän valikon. Tämä tarkoittaa tavallisesti lisäasetuksia kuten muokkaa, lähetä, peruuta jne.

- kolmen vihreän pisteen pystyrivillä merkitty soittonäppäin: hyväksyy tulevan puhelun tai avaa Puhelin-sovelluksen miltä tahansa näytöltä.

Navigointinäppäimen oikealla puolella on kaksi painiketta, jotka ovat ylhäältä alas Takaisin- ja katkaisunäppäin. Nämä on erotettu toisistaan vaakaviivalla.

- kolmiolla merkitty Takaisin-näppäin: palaa edelliseen näyttöön tai poistaa merkin tekstikentässä
- kolmen punaisen pisteen vaakarivillä merkitty katkaisunäppäin: lopettaa nykyisen puhelun, hylkää tulevan puhelun, palaa aloitusnäytölle tai lukitsee tai avaa näytön. Pitkä painallus sammuttaa tai käynnistää MiniVisionin.

Näppäimistön toinen osa on alfanumeerinen näppäimistö, jolla voit kirjoittaa tekstiä MiniVisioniin. Siinä on kaksitoista näppäintä (neljä kolmen näppäimen riviä):

- rivi 1: 1, 2, 3
- rivi 2: 4, 5, 6
- rivi 3: 7, 8, 9
- rivi 4: tähti, 0, ruutu

Näppäimessä 5 on käyttöä helpottava piste.

Yläreuna

Yläreunassa on paikka kaulahihnalle. Voit asettaa sen irrottamalla takakuoren ja asettamalla hihnan pään paikoilleen. Aseta tämän jälkeen takakuori paikalleen.

Oikea reuna

Oikeassa reunassa on 3,5 mm:n liitin kuulokkeiden yhdistämistä varten.

Alareuna

Alareunassa on ensimmäisenä vasemmalla mikrofoni ja sen vieressä MicroUSB-paikka MiniVisionin lataamista varten. Tämän vieressä on paikka, josta takakuori voidaan irrottaa. Laitteen takakuori on irrotettava ja sen alla ovat akku, SIM-korttipaikka sekä MicroSD-korttipaikka.

Takaosa

Takaosan yläosassa vasemmalla on kamera, jota käytetään värintunnistussovelluksessa. Kameran oikealla puolella on kaiutin.

Aloitus

SIM-kortin asettaminen

MiniVision on yhteensopiva vain NanoSIM-korttien kanssa (4FF). Nosta puhelimen takakansi asettamalla kynsi kannen alaosassa olevaan koloon ja nostamalla. Sekä SIM- että MicroSD-korttipaikat sijaitsevat akun alapuolella siten, että SIM-lukija on vasemmalla ja microSD-lukija oikealla. Paina korttipaikan suojaa hieman ja liu'uta sitä samalla ylöspäin. Aseta SIM-kortti niin, että siruosa on alaspäin ja pyöristetty kulma oikealla alhaalla. Aseta suoja paikalleen.

Samalla tavalla voit asettaa puhelimeen MicroSD-muistikortin. Tällöin paikka on SIM-korttipaikan oikealla puolella.

Akun lataaminen

Ensimmäisellä käyttökerralla on suositeltavaa, että lataat laitteen akkua vähintään neljä tuntia.

Mitä enemmän käytät laitetta, sitä useammin akku täytyy ladata. Voit optimoida akun käytön muuttamalla tiettyjä asetuksia, kuten näytön kirkkautta.

Yhdistä USB-kaapeli sekä MiniVisioniin että virtasovittimeen. Yhdistä sitten sovitin seinäkoskettimeen.

Kun USB-kaapeli on kiinni laitteessa, takakuoren poistaminen ei ole mahdollista.

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Voit käynnistää MiniVisionin pitämällä katkaisunäppäintä painettuna. Päästä painike laitteen värähtäessä.

Voit sammuttaa laitteen pitämällä katkaisunäppäintä painettuna. Päästä painike, kun vahvistusta kysytään. Vahvista sammutus painamalla OK. Laite värähtää keyvesti ennen sammumistaan.

Lepotila

Kun aloitusnäyttö on aktiivisena, katkaisunäppäimen lyhyt painallus asettaa puhelimen lepotilaan. Lepotila on sama kuin näytön sammuttaminen. MiniVision sanoo "Näyttö sammutettu".

Lepotilassa näppäimistö on pois käytöstä ja näyttö pois päältä. Puheluiden ja viestien vastaanotto on kuitenkin edelleen mahdollista.

Voit palata normaalitilaan painamalla katkaisunäppäintä lyhyesti.

MiniVision menee oletuksena automaattisesti lepotilaan, kun sitä ei ole käytetty minuuttiin. Tässä tapauksessa katkaisunäppäimen lyhyt painallus palauttaa MiniVisionin sinne, missä olit ennen lepotilaa.

SIM-kortin lukituksen avaaminen

SIM-korttisi on lukittu PIN-koodilla mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi.

Kun sammutat ja käynnistät MiniVisionin, SIM-kortin PIN-koodia kysellään. Voit avata kortin lukituksen kirjoittamalla PIN-koodin numeronäppäimistöllä ja painamalla sitten OK.

Mikäli koodi on oikein, MiniVision avaa aloitusnäytön.

Hyvä tietää: mikäli PIN-koodi kirjoitetaan väärin kolme kertaa, laite kysyy 8-merkkistä pUK-koodia. Tämän saat operaattorilta.

Hyvä tietää: Voit soittaa hätänumeroon PIN-koodinäytön valikosta.

Käyttöliittymästä

MiniVisionin käyttöliittymä on kehitetty helppokäyttöiseksi:

- kaikki kohteet on järjestetty luetteloksi suoraviivaisen ja helpon navigoinnin varmistamiseksi
- käyttöliittymässä on vain tekstiä
- yksi tieto näytetään yhdellä rivillä
- pitkät tekstit vieritetään vaakasuuntaan automaattisesti
- oletuksena teksti on mustaa valkoisella
- valittu kohde näytetään käänteisin värein
- kaikki valitut kohteet puhutaan
- näytön vaihtuessa ensimmäinen kohde valitaan automaattisesti
- takaisin-näppäintä käytettäessä laite palautuu viimeksi valitun kohteen kohdalle
- kun navigoit luettelon ensimmäiseen tai viimeiseen kohteeseen, laite piippaa
- joistakin toiminnoista tulee vahvistusviesti. Tämän voit kuitata painamalla mitä tahansa näppäintä.

Valikoissa liikkuminen

Seuraavilla näppäimillä voit liikkua valikoissa:

ylös: edellinen kohde

alas: seuraava kohde

OK: valitse nykyinen kohde

Kohteen valitseminen näyttää yleensä uuden näytön.

takaisin: palaa edelliseen näyttöön

valikko: näyttää nykyiseen kohteeseen tai näyttöön liittyvän valikon

katkaisunäppäin: aloitusnäyttö; jos aloitusnäytössä, lepotila

Ylös-näppäimen pitkä painallus siirtyy luettelon ensimmäiseen kohteeseen ja alas-näppäimen pitkä painallus viimeiseen kohteeseen.

Äänvoimakkuuden muuttaminen

Vasen- ja oikea-näppäimet avaavat äänvoimakkuuden hallinnan. Voit muuttaa erilaisia äänvoimakkuuksia:

- yleinen (15 tasoa): puheen ja FM Radion äänvoimakkuus
- hälytykset (7 tasoa): hälytysten äänvoimakkuus
- soittoäänet (7 tasoa): soittoäänten äänvoimakkuus

Voit vaihtaa muutettavaa äänvoimakkuutta ylös- ja alas-näppäimillä. Oletuksena valittuna on Yleinen. Valinnan jälkeen voit käyttää vasen- ja oikea-näppäimiä voimakkuuden muuttamiseen.

Äänvoimakkuuden muokkain sulkeutuu automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Voit sulkea sen itse OK- tai takaisin-näppäimellä.

Puheluiden äänvoimakkuutta säädetään puhelun aikana.

Jos asetat yleisen äänvoimakkuuden tasoksi 0, on se sama kuin hiljainen tila.

Näppäimistöllä kirjoittaminen

Kun MiniVision sanoo "muokkauskenttä", voit kirjoittaa.

Tähän tarkoitukseen käytetään MiniVisionin alfanumeerista näppäimistöä.

Jokaisella näppäimellä on useita merkkejä. Näiden välillä liikutaan painamalla näppäntä useita kertoja.

- 1: erikois- ja välimerkit
- 2-9: alfanumeeriset merkit. Esimerkiksi näppäin 2 vastaa merkkejä a, b, c, 2, A, B, C
- 0: välilyönti tai +
- tähti: vaihtaa tilaa välillä normaali, numeerinen ja isot kirjaimet
- ruutu: avaa kerran painettaessa symbolivalikon, kaksi kertaa painettaessa hymiövalikon

Kun olet kirjoittanut tekstin, ylös- ja alas-näppäimet toistavat sen kokonaan. Vahvasta teksti painamalla OK.

Numeroiden syöttäminen onnistuu myös painamalla kyseistä numeroa pitkään. Esimerkiksi numeron 2 voi syöttää joko painamalla kakkosta neljä kertaa (a, b, c, 2) tai pitkään.

Sanelu

MiniVisionissa on puheentunnistustoiminto, joka mahdollistaa tekstin kirjoittamisen sanelusta. Tämä toiminto tarvitsee Internet-yhteyden joko WiFin kautta tai 3G/4G-verkossa mobiilidatalla.

Jos verkkoa ei ole saatavilla tai sen nopeus on heikko, palvelu ei ole käytettävissä.

Aloita puheentunnistus pitämällä OK-näppäintä painettuna, kunnes kuulet piippauksen. Puhu tämän jälkeen selkeästi tunnistettava teksti. Tunnistus loppuu kun lopetat puhumisen (tai pidät pitkän tauon). Hetken kuluttua tunnistettu teksti lisätään tekstikenttään ja puhutaan. Jos huomaat virheitä, voit muokata tekstiä myös aakkosnumeerisella näppäimistöllä.

Seuraavassa muutamia vinkkejä puheentunnistuksen käyttöön:

- Odota piippauksen loppumista ennen sanelun aloittamista.
- Hiljainen ympäristö parantaa tunnistustulosta.
- Voit käyttää puheentunnistusta niin paljon kuin haluat yhdessä tekstikentässä; se liittää tulostekstit yhteen.
- Voit lisätä tekstiin välimerkkejä sanomalla ne, esim. "Haluatko syödä sunnuntaina kotona kysymysmerkki".

Puhekomennot

MiniVisionin puhekomentojen avulla voi esim. avata sovelluksen, lähettää tekstiviestin tai soittaa puhelun.

Puhekomennot avataan pitämällä OK-näppäintä painettuna sovellusluettelossa, kunnes puhelin sanoo "puhu äänimerkin jälkeen". Tämän jälkeen kuuluu lyhyt äänimerkki, jonka jälkeen voit hallita puhelinta puhekomennolla.

Käytettävissä olevat puhekomennot

- "Soita Matti". Tällöin puhelin pyytää vahvistusta sanomalla "Haluatko soittaa henkilölle Matti Meikäläinen, matkapuhelin?". Puhelu aloitetaan painamalla OK-näppäintä lyhyesti. Jos on useita yhteystietoja samalla etunimellä, kannattaa sanoa sekä etu- että sukunimi.

- "Lähetä viesti Matti". Taas puhelin pyytää vahvistusta. OK-näppäimen painalluksen jälkeen kohdistus on tekstiviestin kirjoituskentässä. Tällöin voidaan kirjoittaa varsinainen tekstiviesti joko numeronäppäimillä tai sanelemalla. Jos tekstiviesti halutaan sanella, painetaan taas OK-näppäintä pitkään ja sanellaan tekstiviesti äänimerkin jälkeen. Huomioi, että sanelu ei osaa ottaa huomioon suomenkielisiä välimerkkejä. Tekstiviesti lähetetään painamalla OK-näppäintä lyhyesti.

- "Uusi muistiinpano, Tämä on muistiinpano". Tällöin laite avaa Muistiinpanot-sovelluksen kohdasta, jossa muistiinpanon tekstikentässä lukee "Tämä on muistiinpano". Voit vahvistaa uuden muistiinpanon OK-näppäimellä. Tällöin MiniVision avaa Muistiinpanot-sovelluksen päänäytön, jossa voit selata muistiinpanoja ylä- ja alanuolella. Saat lisätietoa Muistiinpanot-sovellusta käsittelevästä luvusta.

- "Uusi hälytys". Laite luo uuden hälytyksen ja avaa ikkunan, josta pääsee muokkaamaan hälytyksen tietoja.

- "Uusi tapahtuma". Laite luo uuden kalenteritapahtuman ja avaa ikkunan, josta pääsee muokkaamaan tapahtuman tietoja.

- "Uusi yhteystieto". Laite luo uuden yhteystiedon ja avaa ikkunan, josta pääsee muokkaamaan yhteystiedon tietoja.

Puhekomennolla voidaan myös avata jokin sovellus sanomalla esim. "Puhelin", "Hälytys" tai "Sää".

Tekstin poistaminen

Tekstikentässä oltaessa takaisin-näppäimen lyhyt painallus poistaa viimeksi kirjoitetun merkin ja pitkä painallus poistaa kaiken tekstin.

Tekstin muokkaaminen

Tekstikentässä oltaessa voit käyttää vasen- ja oikea-näppäimiä liikkuaaksesi kentässä, poistaaksesi kirjaimen, sanan tai lauseen.

Äänenvoimakkuutta ei siis voi säätää tekstikentässä.

Tekstikenttien valikko

Jos painat valikkonäppäintä tekstikentässä, ovat käytettävissäsi seuraavat valinnat:

- tallenna: tallentaa tekstikentässä tehdyt muutokset
- peruuta: jättää muutokset tallentamatta
- poista kaikki: tyhjentää tekstikentän
- kopioi kaikki: kopioi kentän tekstin leikepöydälle
- leikkaa kaikki: tyhjentää tekstikentän, mutta kopioi tekstin leikepöydälle
- liitä kaikki: liittää leikepöydällä olevan tekstin nykyiseen kohtaan

Tekstikentän komennot

Tekstikentässä oltaessa voit käyttää komentoja kursorin liikuttamiseen, tekstin valitsemiseen, kopiointiin, liittämiseen ja leikkaamiseen.

Tämä tapahtuu tähti-näppäimen ja numeronäppäimen samanaikaisella painamisella. Toiminnot ovat seuraavat:

- tähti+vasen: valitse edellinen merkki (voidaan käyttää useita kertoja esim. sanan valitsemiseen)
- tähti+oikea: valitse seuraava merkki (voidaan käyttää useita kertoja esim. sanan valitsemiseen)
- tähti+3: leikkaa
- tähti+6: kopioi
- tähti+9: liitä

Käyttöapukomennot

Näillä komennoilla voit muuttaa saavutettavuusasetuksia, kuten puhenopeutta.

MiniVision tukee komentoja, jotka toimivat kaikilla näytöillä.

Nämä komennot tehdään yhdessä ruutu-näppäimen kanssa. Käytettävissä ovat:

- ruutu+0: asetukset
- ruutu+1: tilatiedot, kuten akun taso, Wi-Fi ja Bluetooth, verkon tila ja aika
- ruutu+2: lue sivun alusta
- ruutu+4: vähennä puhenopeutta
- ruutu+5: lisää puhenopeutta
- ruutu+7: toistaa viimeksi puhutun
- ruutu+8: tavaa viimeksi puhutun

Aloitusnäyttö ja sovellusluettelo

Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö on MiniVisionin päänäyttö, joka näyttää ajan, vastaamattomien puheluiden määrän sekä lukemattomien tekstiviestien määrän.

Kun MiniVision on käynnissä, katkaisunäppäimen lyhyt painallus palauttaa sen aloitusnäytölle. Voit palata tälle näytölle milloin ja mistä vain. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos olet eksynyt puhelimen valikoihin.

Kun aloitusnäyttö on aktiivisena, voit kirjoittaa puhelinnumeron tai käyttää pikavalintaa (numeron pitkä painallus).

Voit avata sovellusluettelon painamalla joko ylös, alas tai OK.

Sovellusluettelo

kun suljet aloitusnäytön, avautuu sovellusluettelo. MiniVisionissa on 14 sovellusta:

- puhelin
- yhteystiedot
- viestit
- hälytykset
- kalenteri
- FM Radio
- värintunnistin
- setelintunnistin
- laskin
- muistiinpanot

- taskulamppu
- sää
- SOS
- asetukset

Seuraavissa luvuissa sovellukset käydään lävitse.

Voit avata sovelluksen siirtymällä sen kohdalle ja painamalla OK. Sovellus suljetaan takaisin-näppäimellä. Saatat joutua painamaan sitä useita kertoja riippuen sovellukseen avaamiesi näyttöjen määrästä.

Voit sulkea sovelluksen myös tallentamatta tietoja. Tämä tapahtuu painamalla katkaisunäppäintä.

Puhelin

Sovelluksella voit soittaa puheluita, katsoa puheluhistoriasi sekä kuunnella vastaajaviestit. Voit avata puhelimen koska tahansa painamalla soittonäppäintä.

Puheluun vastaaminen

Vastaa tulevaan puheluun painamalla soittonäppäintä.

Oletuksena voit vastata puheluun myös millä tahansa numeronäppäimellä. Tätä voit muuttaa asetusten kohdassa näppäimistö.

Voit mykistää soittoäänen ja kuulla soittajatunnuksen painamalla vasen tai oikea. Voit toistaa soittajatunnuksen painamalla ylös.

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa puhelun painamalla katkaisunäppäintä.

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä tulevan puhelun katkaisunäppäimellä.

Puhelun soittaminen

Valitse sovelluksen päänäytöltä yksi seuraavista:

- soita yhteystiedolle: voit valita soitettavan yhteystiedon

Voit käyttää alfanumeerista näppäimistöä yhteystiedon löytämiseen. Luettelo suodatetaan kirjoittamasi tekstin mukaan. Suodatus tehdään sekä etu- että sukunimelle. Voit poistaa kirjaimen suodattimesta painamalla takaisin. Kun oikea yhteystieto löytyy, aloita puhelu painamalla OK.

- valinta: tähän voit kirjoittaa soitettavan puhelinnumeron. Puhelu aloitetaan joko OK- tai soittonäppäimellä.

Voit aloittaa numeron kirjoittamisen myös suoraan aloitusnäytöltä tai puhelinsovelluksen päänäytöltä.

- puheluhistoria: täältä voit soittaa takaisin yhteystiedolle tai numeroon. Valitse numero ylös- tai alas -näppäimellä ja paina OK avataksesi asetusvalikon. Valitse luettelosta "soita" ja paina OK.
- vastaaja: tästä voit soittaa vastaajaasi.

Puhelunaikaiset asetukset

Jos painat puhelun aikana valikkonäppäintä, avautuvat näytölle seuraavat valinnat:

- kaiutin: vaihtaa äänen lähettä kaiuttimen ja puhelinkuulokkeen välillä. Kaiuttimen ja kuulokkeen välillä voi vaihtaa myös painamalla puhelun aikana soittonäppäintä.
- mykistä: mykistää mikrofonin
- lisää puhelu: tästä voit soittaa uudelle vastaanottajalle

Voit vaihtaa kahden puhelun välillä valitsemalla valikosta "vaihda puhelut".

Jos käynnissä on kaksi puhelua, katkaisunäppäin lopettaa nykyisen puhelun.

Voit yhdistää puhelut ryhmäpuheluksi valitsemalla puheluvalikosta "ryhmäpuhelu".

Tässä tilassa katkaisunäppäin lopettaa molemmat puhelut.

Puheluhistoria

Täältä näet soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut. Vastaamattomien puhelujen määrä ilmoitetaan aloitusnäytöllä ja Puhelin-kohdassa sovellusluettelossa.

Ilmoitukset vastaamattomista puheluista loppuvat, kun olet tarkistanut puheluhistorian.

Kun olet valinnut soitettavan numeron tai yhteystiedon historiasta, tulee seuraava valikko:

- puhelu
- lähetä tekstiviesti
- tietoja: näyttää tietoja puhelusta. Näitä ovat:
 - o nimi: kertoo soittajan nimen (vain jos numero on tallennettu puhelimeen)
 - o päivä: näyttää päivän
 - o kesto: puhelun kesto
 - o tyyppi: vastattu, vastaamaton tai soitettu
 - o puhelinnumero
- poista: poistaa puhelun historiasta
- uusi yhteystieto: luo tuntemattomasta numerosta uuden yhteystiedon


Voit poistaa kaikki historiatiedot valitsemalla puheluhistoriavalikosta "Poista kaikki". Vahvista valinta vastaamalla kysymykseen kyllä.

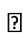
Asetukset

Mene puhelinosovelluksen päänäytöllä valikkoon. Asetukset avautuvat. Seuraavat ovat käytettävissä:

- värise: värinä puhelun tullessa, oletuksena pois käytöstä
- soittoaäni: voit valita puhelimen soittoaänen
- vastaajan numero: voit asettaa vastaajan numeron. Voit soittaa vastaajaan pikavalinnalla 1.
- soitonsiirto: tästä voit asettaa soitonsiirron. Oletuksena tämä ei ole käytössä.

Vaihtoehdot ovat: siirrä aina, kun varattu, kun vastaamatta. Kaikkiin ovat käytettävissä seuraavat asetukset:

 tila: näyttää nykyisen tilan

 siirrä numeroon: voit asettaa siirrettävän numeron

- soittajatunnus: näytä tai piilota puhelinnumerosi soittaessa. Vaihtoehtoina ovat: operaattorin määrittämä, piilota ja näytä. Oletuksena valittuna on operaattorin määrittämä.
- ilmoita saapuvasta puhelusta puhelun aikana: pitää äänimerkin kun olet toisessa puhelussa ja joku soittaa. Oletuksena tämä on pois päältä.

Yhteystiedot

Sovellus toimii yhteystietojen muistikirjana. Päänäytöllä ovat kaikki MiniVisioniin tallennetut yhteystiedot aakkosjärjestyksessä. Yhteysietojen tietojärjestys on: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, tyyppi.

Yhteystietojen tuonti

Oletuksena mitään yhteystietoja ei näytetä yhteensopivuusongelmien välttämiseksi. Voit tuoda yhteystietoja SIM-kortilta tai VCF-tiedostosta.

Voit tehdä tämän avaamalla yhteystietojen päänäytön valikon ja valitsemalla "Tuo". Seuraavien asetusten näyttö avautuu:

- tuo SIM-kortilta: Tällä voit kopioida SIM-kortin yhteystiedot MiniVisioniin. Sinua pyydetään vahvistamaan tuonti. Valitse "Kyllä", jos haluat tuoda SIM-kortin yhteystiedot.
- tuo VCF-tiedostosta: voit kopioida kaikki VCF-tiedoston sisältämät yhteystiedot MiniVisioniin. VCF (VCard) -tiedosto on standardi tapa tallentaa kontaktitietoja. Useimmissa yhteystietojen hallintaohjelmissa on mahdollista viedä yhteystiedot VCF-muotoon. Sinun täytyy ensin kopioida VCF-tiedosto MiniVisionin sisäiseen muistiin tai Micro-SD-kortille. Jos haluat kopioida VCF-tiedoston MiniVisionin sisäiseen muistiin, yhdistä MiniVision USB-kaapelilla tietokoneeseen. MiniVision tunnistautuu massamuistilaitteeksi. Avaa MiniVision-kansioista Internal Storage Memory ja kopioi VCF-tiedosto tähän kansioon. Kun tiedosto on kopioitu, paina MiniVisionilta OK aloittaaksesi tuonnin. Tiedostonvalintänäyttö avautuu. Valitse oikea tiedosto ja paina OK. Sinua pyydetään vielä vahvistamaan tuonti. Valitse "Kyllä".

Tuonnin aikana infonäyttö kertoo prosenttimäärän. Tuonnin jälkeen MiniVision ilmoittaa tuotujen yhteystietojen määrän.

MiniVision tukee vain yhtä puhelinnumeroa yhdelle yhteystiedolle. Monta puhelinnumeroa sisältävät tuodut yhteystiedot monistetaan ja erotellaan puhelinnumeron tyyppin mukaan (koti, työ, matkapuhelin, muu).

Yhteystiedon luominen

Valitse päänäytön valikosta "Uusi yhteystieto".

Yhteystiedon luontinäyttö avautuu. Pääset tekstikenttiin painamalla OK niiden kohdalla. Kun haluat tallentaa kirjoittamasi tekstin, paina OK uudelleen. Täytettävänä ovat seuraavat kentät:

- etunimi
- sukunimi
- numero

Koska MiniVision tukee vain yhtä puhelinnumeroa yhdelle yhteystiedolle, on sinun luotava uusi yhteystieto mikäli tarvitaan monta puhelinnumeroa.

- tyyppi: neljä tyyppiä on valittavana: matkapuhelin, työ, koti ja muu
- huomautus
- soittoääni: voit valita yhteystiedolle oman soittoäänien

Voit lisätä MiniVisioniin omia soittoääniä. Yhdistä MiniVision USB-kaapelilla tietokoneeseen ja kopioi MP3-muodossa olevat soittoäänit Internal Storage Memory -> Ringtones -kansioon.

Kun kentät on täytetty, avaa näytön valikko valikkonäppäimellä ja valitse "Tallenna".

Myös takaisin-näppäin tallentaa yhteystiedon.

Yhteystiedot tallennetaan aina MiniVisionin sisäiseen muistiin.

Yhteystiedon muokkaaminen

Valitse päänäytöltä muokattava yhteystieto.

Yhteystieto aukeaa muokkaustilaan, josta voit valita muokattavan tiedon seuraavista: etunimi, sukunimi, puhelin, tyyppi, huomautus ja soittoääni.

Kun olet valmis, valitse näytön valikosta "Tallenna".

Takaisin-näppäin tallentaa muutokset vain, jos muokkauksia on tehty.

Voit peruuttaa yhteystiedon muokkauksen valitsemalla näytön valikosta "Peruuta".

Yhteystiedon poistaminen

Valitse päänäytöltä yhteystieto. Muokausnäyttö avautuu. Valitse näytön valikosta "Poista". Jos haluat poistaa yhteystiedon, valitse vahvistusnäytöltä "Kyllä", muuten "Ei".

Kaikkien yhteystietojen poistaminen

Valitse päänäytön valikosta "Poista kaikki". Sinua pyydetään vahvistamaan yhteystietojen poisto. Valitse "Kyllä" tai "Ei".

Etsi yhteystietoa

Voit aloittaa nimen kirjoittamisen päänäytöltä. Luettelo suodatetaan siten, että kirjoitettua merkkijonoa etsitään etu- ja sukunimen alusta. Voit liikkua luettelossa milloin tahansa. Poista merkki painamalla Takaisin. Voit avata yhteystiedon tiedot painamalla OK.

Yhteystiedolle soittaminen

Suosittelimme, että soitat Puhelin-sovelluksella. Voit kuitenkin soittaa myös yhteystiedoista.

Valitse yhteystieto, jolle haluat soittaa ja avaa tiedot painamalla OK. Valitse näytön valikosta "Soita". Voit lopettaa puhelun normaalisti katkaisunäppäimellä.

Viestin lähettäminen yhteystiedolle

Suosittelimme lähettämään viestit Viestit-sovelluksella. Voit kuitenkin lähettää viestin myös yhteystiedoista.

Valitse yhteystieto, jolle haluat lähettää viestin ja paina OK. Yhteystieto avautuu muokkaustilaan. Valitse näytön valikosta "Lähetä tekstiviesti". Sinut uudelleenohjataan Viestit-sovellukseen, jossa lähetysnäytöllä on vastaanottaja valmiina. Kirjoita viesti ja paina OK.

Jaa yhteystieto tekstiviestillä

Valitse päänäytöltä jaettava yhteystieto. Muokkaustila avautuu. Valitse näytön valikosta "Jaa yhteystieto tekstiviestillä". Valitse henkilö, jolle haluat jakaa yhteystiedon ja paina OK. Viestit-sovellus avautuu. Voit lähettää viestin painamalla OK.

Vie yhteystiedot

Valitse päänäytön valikosta "Vie VCF-tiedostoon". Yhteystiedot tallennetaan VCF-tiedostona MiniVisionin muistin juureen. Tämä tiedosto, nimeltään 00X.VCF (jossa X on tiedostojen yhteismäärä), voidaan kopioida edelleen tietokoneelle.

Viestit

Viestit-sovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä.

MiniVision ei tue MMS-viestejä. Viestit-sovelluksen päänäytöllä ovat vastaanotetut ja lähetetyt viestit. Käytettävissä on kaksi näyttötapaa:

- keskustelutila: ryhmittelee viestit kansioihin keskusteluiksi, eli kaikki saman kontaktin viestit (lähetetyt ja vastaanotetut) ovat yhdessä kansiossa.
- kronologinen: järjestä viestit kansioihin: saapuneet, lähetetyt, lähettämättömät ja luonnokset.

Oletuksena valittuna on keskustelutila. Voit vaihtaa tilaa valitsemalla päänäytön valikosta "Asetukset" ja sieltä "Viestin näyttö". Tässä ohjeessa käydään asiat ensin keskustelutilan näkökulmasta ja sitten kronologisen tilan näkökulmasta.

Viestien hallinta - Keskustelutila

Kun lähetät viestin ensimmäisen kerran, MiniVision luo keskustelun kyseiselle yhteystiedolle. Näin myös ensimmäisen viestin saapuessa yhteystiedolta. Oletuksena keskustelun nimenä on yhteystiedon nimi. Jos numeroa ei ole tallennettu puhelimeesi, on nimenä puhelinnumero. Keskustelut järjestetään aikajärjestykseen.

Uusi viesti

Valitse päänäytön valikosta "Uusi viesti". Yhteystiedon valintänäyttö avautuu. Valittavissa on kaksi vaihtoehtoa:

- yhteystieto: voit valita tallennetun yhteystiedon

Voit etsiä yhteystietoa samalla tavalla kuin Yhteystiedot-sovelluksessa.

- puhelinnumero: voit kirjoittaa vastaanottajan numeron. Paina lopuksi OK.

Viestinäyttö avautuu. Kirjoita tai sanele viestisi ja paina lopuksi OK.

MiniVision palaa keskustelunäyttöön.

Viestin lähetys useille vastaanottajille

Voit lisätä viestiin vastaanottajia kirjoituskentässä. Avaa näytön valikko ja valitse "Lisää vastaanottaja". Voit joko valita yhteystiedon tai kirjoittaa puhelinnumeron. Toista tämä niin monta kertaa kuin on tarpeen. Lopuksi paina kirjoitusnäytöllä OK.

Viestin lähettäminen edelleen

Valitse keskustelu, jossa viesti sijaitsee. Valitse sitten viesti. Valitse "Lähetä edelleen". Voit nyt valita yhteystiedon tai kirjoittaa puhelinnumeron. Lopuksi paina OK. Lähetettävä viesti avautuu muokkaustilaan, jossa voit muokata sitä. Kn olet tyytyväinen, paina OK.

Lue uudet viestit

Uusien viestien lukumäärä kerrotaan Viestit-sovelluksen kohdalla sekä aloitusnäytöllä.

Jos keskustelussa on uusia viestejä, MiniVision kertoo niiden määrän keskustelun kohdalle siirryttäessä.

Viesteillä on seuraavat tiedot: Tila (lähetetty, luettu tai lukematon), päivä, aika ja sisältö

Ilmoitus uudesta viestistä katoaa, kun olet valinnut viestin.

Viestiin vastaaminen

Valitse keskustelu, johon haluat vastata.

MiniVision valitsee viimeisimmän viestin. Paina OK ja valitse "Vastaa".

Kirjoita tai sanele viestisi ja paina OK. MiniVision palaa keskustelunäyttöön.

Viestin poistaminen keskustelusta

Valitse keskustelu, josta haluat poistaa viestin. Mene sitten poistettavan viestin kohdalle ja valitse näytön valikosta "Poista". Sinua pyydetään vielä vahvistamaan viestin poistaminen.

Keskustelun poistaminen

Valitse poistettava keskustelu ja paina OK. Valitse sitten näyttövalikosta "Poista keskustelu". Sinua pyydetään vielä vahvistaman poisto.

Kaikkien keskusteluiden poistaminen

Valitse päänäytön valikosta "Poista kaikki". Sinua pyydetään vahvistamaan poisto.

Yhteystiedon luominen tuntemattomasta numerosta

Jos saat viestin numerosta, joka ei ole laitteen muistissa, voit luoda sille yhteystiedon Viestit-sovelluksella.

Valitse keskustelu, jossa tuntematon numero esiintyy.

Avaa lisävalinnat painamalla OK ja valitse "Lisää yhteystietoihin". Uuden yhteystiedon luontinäyttö avautuu puhelinnumero-kohdan ollessa jo täytettynä. Lisää muut tiedot ja tallenna yhteystieto, kuten kappaleessa Yhteystiedot neuvotaan.

Yhteystiedolle soittaminen

Valitse keskustelu, jossa soitettava numero on. Valitse sitten viesti ja paina OK. Valitse valikosta "Soita".

Asetukset

Valitse päänäytön valikosta "Asetukset". Seuraavat ovat käytettävissä:

- viestin rakenne: voit vaihtaa keskustelutilan ja kronologisen tilan välillä.
- pyydä toimitusvahvistus: voit valita, antaako puhelin ilmoituksen viestien toimituksesta
- ilmoitus: vaihtaa ilmoitustapaa. Käytettävissä ovat:

o tila: vaihtaa ilmoituksen tyyppin. Vaihtoehtoina ovat ei mitään, äänimerkki, värinä, sekä äänimerkki ja värinä. Oletuksena valittuna on äänimerkki.

o äänimerkki: voit vaihtaa saapuvien tekstiviestien merkkiään. Oletuksena on Adara.

Voit lisätä omia ilmoitusääniäsi samalla tavalla kuin soittoääniä (katso yllä). Tällöin kansio on "Notifications".

- SMS-palvelukeskus: voit vaihtaa tekstiviestien palvelukeskuksen numeron. Tämä numero asetetaan automaattisesti operaattorin toimesta SIM-kortin mukaan. Voit muuttaa tätä numeroa OK-näppäimellä.
- alusta APN: alustaa yhteyspisteen, jota käytetään Internet-yhteyden muodostamiseen ja MMS-viestien lähettämiseen.

Viestien hallinta - Kronologinen tila

Viestit on järjestetty neljään kansioon:

- saapuneet
- lähetetyt
- lähtevät
- luonnokset

Oletuksena vain saapuneet viestit näytetään.

Voit vaihtaa kategoriata valitsemalla sen päänäytön valikosta.

Viestit järjestetään aikajärjestykseen. Viesteillä on seuraavat tiedot: tila (lähetetty, luettu, lukematon, lähtevä tai luonnos), nimi (tai puhelinnumero jos tuntematon), aika, päivä ja viestin sisältö.

Viestin lähettäminen

Uuden viestin lähettäminen tapahtuu muutoin samoin kuin edellä on jo kuvattu, paitsi että valikkoon pääsee mistä tahansa kategoriasta.

Viestin lähetys useille vastaanottajille

Voit lisätä viestiin vastaanottajia kirjoituskentässä. Avaa näytön valikko ja valitse "Lisää vastaanottaja". Voit joko valita yhteystiedon tai kirjoittaa puhelinnumeron. Toista tämä niin monta kertaa kuin on tarpeen. Lopuksi paina kirjoitusnäytöllä OK.

Viestin lähettäminen edelleen

Valitse viesti. Valitse "Lähetä edelleen". Voit nyt valita yhteystiedon tai kirjoittaa puhelinnumeron. Lopuksi paina OK. Lähetettävä viesti avautuu muokkaustilaan, jossa voit muokata sitä. Kun olet tyytyväinen, paina OK.

Lue uudet viestit

Uusien viestien lukumäärä kerrotaan Viestit-sovelluksen kohdalla sekä aloitusnäytöllä.

Viesteillä on seuraavat tiedot: Tila (lähetetty, luettu tai lukematon), päivä, aika ja sisältö

Ilmoitus uudesta viestistä katoaa, kun olet valinnut viestin.

Viestiin vastaaminen

Valitse viesti, johon haluat vastata. Paina OK ja valitse "Vastaa".

Kirjoita tai sanele viestisi ja paina OK.

Viestin poistaminen

Valitse poistettava viesti ja valitse näytön valikosta "Poista". Sinua pyydetään vielä vahvistamaan viestin poistaminen.

Kaikkien viestien poistaminen

Valitse päänäytön valikosta "Poista kaikki". Sinua pyydetään vahvistamaan poisto.

Yhteystiedon luominen tuntemattomasta numerosta

Jos saat viestin numerosta, joka ei ole laitteen muistissa, voit luoda sille yhteystiedon Viestit-sovelluksella. Valitse oikea viesti.

Avaa lisävalinnat painamalla OK ja valitse "Lisää yhteystietoihin". Uuden yhteystiedon luontinäyttö avautuu puhelinnumero-kohdan ollessa jo täytettynä. Lisää muut tiedot ja tallenna yhteystieto, kuten kappaleessa Yhteystiedot neuvotaan.

Yhteystiedolle soittaminen

Valitse haluamasi viesti ja paina OK. Valitse valikosta "Soita".

Hälytykset

Hälytykset näkyvät päänäytöllä aikajärjestyksessä. Tiedot ovat seuraavat: aika, tila (käytössä/pois käytöstä), toisto jos käytössä. Kaksi herätystä on valmiiksi asetettu:

8:30 – pois käytöstä – maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai

9:30 – pois käytöstä – lauantai, sunnuntai

Voit poistaa nämä hälytykset tai lisätä uusia.

Hälytyksen lisääminen

Valitse päänäytön valikosta "Lisää hälytys".

Lisäysnäyttö avautuu. Täytä seuraavat kohdat:

- tila: oletuksena käytössä
- aika: aseta hälytyksen aika. Oletuksena on nykyinen aika viiden minuutin pyörityksellä. Ensin valitaan tunnit, sitten minuutit.
- soittoääni: voit valita hälytyksen äänen. Oletuksena Cesium on valittu.

Voit lisätä omia hälytysääniäsi MiniVisioniin. Tämä tapahtuu samalla tavalla kuin soittoäänten lisäys, mutta kansiona on Alarms.

- toista: voit asettaa hälytyksen toistumaan tiettyinä päivinä. Oletuksena hälytys toistuu vain kerran.

Voit asettaa toistuvuuden haluamillesi päiville. Valitse kohta "Toista", jolloin viikonpäivien luettelo tulee näkyviin. Kun olet valinnut haluamasi viikonpäivät, paina takaisin-näppäintä, jolloin pääset hälytyksen luontinäytölle.

Kun kaikki tiedot on annettu, valitse näytön valikosta "Tallenna". MiniVision kertoo, kuinka paljon aikaa on seuraavaan hälytykseen.

Myös takaisin-näppäimen painaminen tallentaa hälytyksen. Tämä edellyttää kuitenkin, että edes johonkin kentistä on annettu tietoja.

Hälytyksen pysäyttäminen

Kun hälytys aktivoituu, seuraavat valinnat ovat käytettävissä:

- aika
- pysäytä
- torkku: pysäyttää hälytyksen ja soittaa sen uudelleen kymmenen minuutin kuluttua

Valitse joko "Pysäytä" tai "Torkku". Myös takaisin-näppäimen painaminen pysäyttää hälytyksen.

Hälytys ei toimi, jos MiniVision on pois päältä.

Hälytyksen muokkaaminen

Valitse muokattava hälytys luettelosta. Hälytys aukeaa muokkaustilaan. Muokkaus tapahtuu samalla tavalla kuin kohdassa "Hälytyksen lisääminen".

Voit peruuttaa hälytyksen muokkauksen avaamalla näytön valikon ja valitsemalla "Peruuta".

Hälytyksen tilan vaihtaminen

Valitse hälytys, jonka tilaa haluat muuttaa. Kun painat sen kohdalla OK, muokausnäyttö avautuu. Valitse kohta "Tila" ja paina OK muuttaaksesi sitä. Tallenna muutokset takaisin-näppäimellä.

Hälytyksen poistaminen

Valitse poistettava hälytys ja paina OK. Muokkausnäyttö avautuu. Valitse näytön valikosta "Poista". Sinua pyydetään vahvistamaan toimenpide.

Kaikkien hälytysten poistaminen

Valitse päänäytön valikosta "Poista kaikki". Sinua pyydetään vahvistamaan toimenpide.

Kalenteri

Kalenterilla voit hallita tapahtumia.

Päänäytöllä ovat kaikki tapahtumat aikajärjestyksessä. Tapahtumissa on seuraavat tiedot: nimi, päivä ja aika. Oletuksena kalenteri on tyhjä.

Tapahtuman lisääminen

Valitse päänäytön valikosta "Uusi tapahtuma".

Tapahtuman luontinäyttö avautuu. Täytä seuraavat kohdat:

- nimi
- päivä: oletuksena kuluva päivä. Pääset kenttiin painamalla OK. Ensin on vuosi, sitten kuukausi ja viimeisenä päivä.
- aika: oletuksena nykyinen aika viiden minuutin pyöristyksellä. Pääset kenttiin painamalla OK. Ensin on tunnit, sitten minuutit.
- toistuvuus: oletuksena on valittuna "kerran". Vaihtoehdot ovat: kerran, joka tunti, joka päivä, joka viikko, joka kuukausi, joka vuosi.
- muistutus: vaihtoehdot ovat: ajallaan, 5 minuuttia ennen, 10 minuuttia ennen, 30 minuuttia ennen, tunti ennen, päivä ennen ja kaksi päivää ennen. Oletus on ajallaan.
- hälytysääni

Voit lisätä omia hälytysääniä kalenteriin. Tämä tapahtuu täsmälleen samalla tavalla kuin soittoäänten lisääminen.

Kun tiedot on annettu, valitse näytön valikosta "Tallenna". Voit myös tallentaa takaisin-näppäimellä, mikäli joitakin tietoja on annettu.

Hälytyksen pysäyttäminen

Kun tapahtuman hälytys soi, seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

- nimi: tapahtuman nimi

- pysäytä
- torkku: soi uudestaan kymmenen minuutin kuluttua

Valitse joko "Pysäytä" tai "Torkku". Takaisin-näppäin valitsee kohdan "Pysäytä".

Hälytys ei toimi, jos MiniVision on pois päältä.

Tapahtuman muokkaaminen

Valitse päänäytöltä muokattava tapahtuma. Tapahtuma aukeaa muokkaustilassa. Kun olet tehnyt muutokset, valitse näytön valikosta "Tallenna". Voit tallentaa myös takaisin-näppäimellä, jos joitakin kenttiä on muokattu. Peruuta muokkaaminen valitsemalla näytön valikosta "Peruuta".

Tapahtuman poistaminen

Valitse poistettava tapahtuma ja paina OK. Tapahtuma avautuu muokkaustilaan. Valitse näytön valikosta "Poista tapahtuma". Sinua pyydetään vielä vahvistamaan toimenpide.

Kaikkien tapahtumien poistaminen

Voit poistaa kaikki tapahtumat valitsemalla päänäytön valikosta "Poista kaikki tapahtumat". Sinua pyydetään vahvistamaan toimenpide.

Tapahtuman etsintä

Voit kirjoittaa tapahtuman nimen osan päänäytölle, jolloin MiniVision suodattaa luettelon löydetyistä tapahtumista. Poista merkki painamalla Takaisin. Kun olet löytänyt mieleisesi tapahtuman, avaa sen tiedot painamalla OK.

FM Radio

Voit kuunnella FM-kanavia.

Radion kuuntelu

Kytke MiniVisioniin kuulokkeet, sillä ne toimivat antennina.

- OK-painike pysäyttää ja jatkaa toistoa
- Ylös-painike nostaa taajuutta 0,1 Mhz:lla, pitkän painettuna seuraava asema
- Alas-painike laskee taajuutta 0,1 Mhz:lla, pitkään painettuna edellinen asema

Aseman lisääminen suosikkeihin

Numeronäppäimen (1-9) pitkä painallus lisää näppäimeen suosikin. Lyhyt painallus taas siirtyy näppäimen suosikkiin.

Valikkonäppäimellä pääset tallennettujen asemien luetteloon. Kun painat OK jonkin kohdalla, sen kuuntelu alkaa.

Värintunnistin

Sovelluksen päänäytöllä on kolme vaihtoehtoa.

Ilmoita värit

MiniVision kertoo kameran edessä olevan kohteen värin sekunnin välein, tai kun väri muuttuu.

Puhelinta suositellaan pidettävän kohdetta vasten. Laitteen mukana tulevaa kuorta suositellaan käytettäväksi värin tunnistamiseksi.

MiniVision tunnistaa seuraavat värit: punainen, burgundi, ruskea, oranssi, keltainen, keltavihreä, vihreä, emeraldi, turkoosinsininen, sininen, ultramariini, purppura, fuksia, pinkki, valkoinen, musta ja harmaa.

Tulos riippuu taustan kirkkaudesta. Väri saatetaan tunnistaa väärin, jos ympäristö on liian valoisa tai liian pimeä. Joskus väriin lisätään sävy: vaalea, tumma, hyvin tumma jne.

Joidenkin värien analysointi on vaikeaa. Tällaisia ovat esimerkiksi:

- **valkoinen:** Jos puhelin osoittaa todella kirkasta esinettä, annetaan sen väriksi valkoinen. Joskus valkoinen asia tunnistetaan vaaleanharmaaksi, harmahtavaksi tai vaaleankeltaiseksi riippuen taustan kirkkaudesta.
- **musta:** jos kamera koskettaa kohdetta tai valoisuus on heikko, kertoo MiniVision kohteen olevan mustan. Taustan valoisuudesta riippuen mustat kohteet voidaan ilmoittaa tummansinisiksi tai tummanharmaiksi.
- **ruskea:** Väri on kolmen päävärin yhdistelmä (punainen, sininen ja keltainen), joten se havaitaan usein tummanpunaiseksi tai oranssiksi.

Etsi väri

Tällä voit valita, mitä väriä etsitään. Valitse etsittävä väri ja paina OK. MiniVision antaa äänimerkin, kun etsittävä väri löytyy. Voit muuttaa värin löytymisen ilmoitusta valitsemalla seuraavan asetuksetn.

Hälytyksen tyyppi

Vaihda värin löytyessä tulevan ilmoituksen tyyppiä. Valittavina ovat seuraavat:

- **ääni**
- **värinä**

- ääni ja värinä

Laskin

Laskimella voit tehdä yksinkertaisia laskutoimituksia.

Laske

Käytä numeronäppäimistöä numeroiden ja matemaattisten merkkien syöttämiseen.

- 0-9, numerot
- tähti: matemaattinen merkki seuraavista: plus, miinus, jako, kerto, pilkku, piste.
- ruutu tai OK: suorita lasku
- takaisin: poista viimeinen merkki
- valikko: sisältää kohdan "Poista", jolla voit tyhjentää laskimen.

Kun laskutoimitus on suoritettu, voit käyttää ylös- ja alas-näppäimiä kuullaksesi tuloksen uudelleen.

Muistiinpanot

Muistiinpanot-sovelluksella voit kirjoittaa ja lukea tekstimuotoisia muistiinpanoja.

Muistiinpanon luominen

Valitse päänäytöltä "Muistiinpanot" ja sovelluksen valikosta "Uusi muistiinpano". Muistiinpanon muokkauskenttä avautuu. Voit joko kirjoittaa muistiinpanon aakkosnumeerisella näppäimistöllä tai sanelutoimintoa käyttäen. Kun olet valmis, avaa valikko ja valitse "Tallenna".

Muistiinpanon poistaminen

Paina OK-näppäintä haluamasi muistiinpanon kohdalla ja valitse "Poista". MiniVision kysyy, oletko varma. Valitse "Kyllä".

Kaikkien muistiinpanojen poistaminen

Valitse Muistiinpanot-sovelluksen valikosta "Poista kaikki". MiniVision kysyy, oletko varma. Vastaa "Kyllä".

Muistiinpanon muokkaaminen

Selaa haluamasi muistiinpanon kohdalle ja paina OK-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta ”Muokkaa”. Tee halutut muutokset, avaa valikko ja valitse ”Tallenna”.

Muistiinpanon tekstin kopioiminen

Selaa haluamasi muistiinpanon kohdalle ja paina OK-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta ”Kopioi”. Muistiinpanon teksti kopioidaan leikepöydälle.

Muistiinpanon vieminen

Selaa haluamasi muistiinpanon kohdalle ja paina OK-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta ”Vie”. Muistiinpanon teksti vietään MiniVisionin muistiin.

Taskulamppu

Avaa päänäytön sovellusluettelosta ”Taskulamppu”. Taskulamppu otetaan käyttöön. Voit poistaa sen käytöstä ja ottaa uudelleen käyttöön OK-näppäimellä.

Sää

Sää-sovelluksella näet kuluvan päivän lisäksi viiden vuorokauden sääennusteen. Jos valitset jonkin päivästä, avautuu sääennuste, josta näet erikseen aamun, iltapäivän, illan ja yön ennusteen.

HUOM: Sää tarvitsee Internet-yhteyden toimiakseen.

SOS

SOS-toiminnolla voit soittaa tai lähettää hätäviestin enintään kymmeneen ennalta määriteltyyn puhelinnumeroon.

KAPSYSiä ei voida pitää minkäänlaisessa vastuussa suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka aiheutuu SOS-toiminnon toimimattomuudesta verkon ongelmien tai tuotteessa ilmenneiden vikojen vuoksi.

Vaihda SOSin tilaa

SOS-sovelluksella voit ottaa käyttöön hätäviestin tai -puhelun enintään kymmenelle vastaanottajalle.

Voit aloittaa painamalla soittonäppäintä viisi sekuntia. Samalla tavalla voit myös lopettaa toiminnon.

Toiminnon alkaessa tulee varoitusnäyttö.

Määrittäminen

Ennen kuin voit käyttää SOS-toimintoa, sinun tulee määrittää seuraavat asetukset:

- SOS-painike: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä SOS-toiminnon aktivoinnin soittinäppäimellä. Oletuksena tämä on pois käytöstä.
- viive: Asettaa viiveen, jonka jälkeen SOS käynnistyy soittinäppäimen painalluksen jälkeen. Oletuksena on 5 sekuntia.
- hälytys: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kovaäänisen hälytyksen toimintoa käytettäessä. Oletuksena tämä on pois käytöstä.
- aseta puhelinnumerot: Tällä voit asettaa enintään kymmenen SOS-numeroa. Kun toiminto aktivoidaan, puhelin soittaa (tai lähettää tekstiviestin) numeroihin numerojärjestyksessä. Kun valitset luettelosta numeron (1-10), seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:
 - o yhteystiedoista
 - o aseta puhelinnumero: voit näppäillä numeron
- puhelu: asettaa toiminnon tyypiksi puhelun, jossa vastaanottajille soitetaan numerojärjestyksessä, kunnes joku vastaa tai lopetat toiminnon. Tämän aktivointi tuo näkyviin seuraavan asetuksen.
- vastausviive: voit valita viiveen, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan numeroon. Oletuksena on 30 sekuntia.
- lähetä viesti: asettaa toiminnon tyypiksi viestin. Kaikki numeroluettelossa olevat saavat saman tekstiviestin. Kun tämä aktivoidaan, seuraava asetusta tulee näkyviin.
 - o viestin teksti: tähän voit kirjoittaa hätäviestin tekstin. Oletuksena on "EMERGENCY MESSAGE".

Setelintunnistin

Setelintunnistimen avulla voit tunnistaa seteleitä MiniVisionin kameraa käyttäen.

Tietokannan päivittäminen

KAPSYS päivittää setelitietokantaa säännöllisesti. Kun sovellus käynnistetään, päivityksestä kertova ikkuna saattaa tulla näkyviin. Jos haluat päivittää, valitse OK nuolinäppäimillä ja vahvista päivitys valintänäppäimellä. Tietokannan päivittäminen parantaa tunnistuksen tulosta.

Setelin tunnistaminen

Parhaan tunnistustuloksen mahdollistamiseksi on suositeltavaa, että sileä, taittumaton seteli asetetaan sileälle pinnalle ja MiniVisionin kamera on noin 20-30 senttimetrin päässä siitä. Lisäksi ympäristön tulisi olla riittävän valoisa.

Kun puhelimen kamera havaitsee setelin, sen arvo kerrotaan automaattisesti. Arvo näkyy myös MiniVisionin näytöllä. Useita seteleitä on mahdollista tunnistaa peräkkäin.

Asetukset

Täältä voit muuttaa puhelimen asetuksia.

Asetukset on ryhmitelty.

Näyttö

Tässä ryhmässä on näyttöön liittyviä asetuksia.

- **kirkkaus:** säätää näytön kirkkautta. Vaihtoehdot ovat: todella vähäinen, vähäinen, keskitaso, korkea, korkein.

Mitä korkeampi kirkkaus, sitä suurempi akun kulutus.

- **siirtyminen virransäästöön:** voit asettaa ajan, jonka jälkeen MiniVision siirtyy lepotilaan. Vaihtoehdot ovat: 5 sekuntia, 10 sekuntia, 30 sekuntia, 1 minuutti, 2 minuuttia, 10 minuuttia ja 30 minuuttia. Oletuksena on 1 minuutti.

Mitä pidempi viive, sen suurempi akun kulutus.

- **fontti:** voit valita käytettävän fontin. Käytettävissä olevat fontit ovat: lyhennetty, Times, Luciole
- **fonttikoko:** muuttaa tekstin koon. Vaihtoehtoja on neljä: pieni (5 riviä), keskikokoinen (4 riviä), suuri (3 riviä), todella suuri (2 riviä). Oletuksena on keskikokoinen.
- **lihavointi:** voit ottaa lihavoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä
- **teksti- ja taustavärit:** valitse kuudesta vaihtoehdosta
- **tekstin vieritysnopeus:** muuttaa liian pitkien, näytölle sopimattomien tekstien vieritysnopeutta. Vaihtoehdot ovat: hyvin hidas, hidas, normaali, nopea, hyvin nopea. Oletuksena on normaali.
- **tekstin vierityksen viive:** muuttaa aikaa, jonka jälkeen tekstin vieritys aloitetaan
- **musta näyttö:** tämä erityisesti sokeille suunniteltu toiminto himmentää näytön, mikä parantaa akkukestoa.

Tämä on käytettävissä vain, jos puheesynteesi on aktiivisena.

Puhe

Täältä voit muuttaa puheasetuksia.

- **ruudunlukija:** ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä puheominaisuudet.

- Premium-äännet: voit ladata parempilaatuisia ääniä. Tähän tarvitset Internet-yhteyden.
- o Lataa Premium-ääni: tästä voit ladata parempilaatuisen äänen. Valittavaksi tulee kieliluettelo ja ääniluettelo. Valitse ensin kieli, sitten ääni. Latauksen jälkeen ääni asennetaan painamalla OK. Huomaa, että puhe pysähtyy asennuksen ajaksi. Puhelinta voi käyttää, kun puhe palautuu.

Oletuksena MiniVision lataa Premium-äänen nykyiselle kielelle. Äänen tyypit voivat vaihdella kielittäin.

- o poista Premium-ääni: tästä voit poistaa nykyisen premium-äänen. Sinua pyydetään vahvistamaan toimenpide. Huomaa, että puhe pysähtyy poiston ajaksi. Voit jatkaa puhelimen käyttöä, kun puhe palautuu.
- puhenopeus: voit valita puheen nopeuden viidestä vaihtoehdosta: hyvin hidas, hidas, normaali, nopea, hyvin nopea. Oletuksena on normaali.

Voit muuttaa nopeutta myös komennoilla ruutu+4 (vähemmän) ja ruutu+5 (enemmän).

- puhe herättäessä: tästä voit valita, mitä tietoja MiniVision kertoo valmiustilasta herätessään. Vaihtoehdot ovat: aika, päivä, akun viikonpäivä, tiedot, verkon tila, vastaamattomat puhelut ja lukemattomat viestit. Oletuksena valittuina ovat aika ja akun tiedot. Valitse haluamasi ja paina sitten Takaisin tallentaaksesi.
- tekstikentän toisto: voit määrittää, mitä tekstikenttiin kirjoitettaessa puhutaan. Vaihtoehdot ovat: ei mitään, merkit, sanat, merkit ja sanat. Oletuksena on merkit.
- lue rivi-indeksi: kertoo monennessako kohteessa ollaan, esim. "2 / 5". Oletuksena tämä on pois käytöstä.

Bluetooth

Tästä voit hallinnoida Bluetooth-laitteita ja Bluetoothin tilaa. Oletuksena Bluetooth on pois päältä, joten vain ensimmäinen kohta on näkyvässä. Kun otat Bluetoothin käyttöön, muut asetukset tulevat näkyviin.

- yhdistetyt laitteet: tästä voit tarkastella yhdistettyjä laitteita. Jos valitset jonkin niistä, tulevat näkyviin seuraavat asetukset:
 - o yhdistetty / yhteys katkaistu: näet laitteen tilan
 - o pura pariliitos: MiniVision "unohtaa" laitteen
- etsi laitteita: tästä voit etsiä ympärillä olevia Bluetooth-laitteita. Valitse haluamasi ja paina OK. Jos sinulta kysytään koodia, kokeile 0000 tai 1234 (yleisimmät). Mikäli tämä ei toimi, katso laitteen ohjeesta oikea koodi.

Jos etsimääsi laitetta ei löydy, aloita uusi haku painamalla Takaisin ja valitsemalla etsi laitteita. Jos vieläkin ei ole tuloksia, varmista, että laite on kantoalueella ja että sen Bluetooth on päällä.

- nimeä uudelleen: tähän voit antaa MiniVisionille Bluetooth-nimen.

Ota Bluetooth pois päältä, kun sitä ei käytetä parantaaksesi akunkestoa.

Langaton verkko

Tästä voit hallinnoida Wi-Fi-verkkoja. Oletuksena Wi-Fi on pois käytöstä. Wi-Fiä käytetään ohjelmistopäivitysten ja Premium-äänten lataamiseen sekä puheentunnistukseen. Kun valitset kohdan Wi-Fi, vaihtoehdot ovat seuraavat.

- tila: näyttää nykyisen yhteyden tilan
- tunnetut verkot: täältä voit selata verkkoja, joihin olet jo yhdistänyt. Kun valitset yhden niistä, vaihtoehdot ovat seuraavat.
 - o yhdistä / katkaise yhteys
 - o unohda: poistaa verkon tiedot muistista
- etsi verkoja: tästä voit etsiä Wi-Fi-verkkoja ympärilläsi. Kun löydä thaluamasi, valitse se painamalla OK. Jos salasanaa kysytään, kirjoita se ja paina OK.

Jos yhteys epäonnistuu, tarkista ensin salasana. Jos siinä on virheitä, unohda Wi-Fi-verkko ja yritä yhdistämistä uudelleen.

Voit pidentää akun kestoa ottamalla Wi-Fin poista käytöstä, kun sitä ei käytetä.

Verkko

Tässä ryhmässä ovat verkkoasetukset.

- lentotila: ottaa Wi-Fin, Bluetoothin ja mobiilidatan pois käytöstä. Oletuksena pois käytöstä.
- mobiilidata: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä mobiilidatan. Oletuksena tämä on käytössä. Jos se poistetaan käytöstä, kaikki verkkoliikenne tapahtuu WiFin kautta.
- Data roaming: datan käyttö ulkomailla

Suojaus

Vaihtoehdot ovat seuraavat.

- ota SIM-kortin lukitus käyttöön: tämä on käytettävissä vain, kun MiniVisioniin on asetettu SIM-kortti. Täältä voit poistaa käytöstä PIN-koodin tai muokata sitä seuraavasti:
 - o lukitse SIM-kortti: jos poissa käytöstä, laite ei enää kysy PIN-koodia käynnistettäessä.
 - o vaihda PIN: voit vaihtaa SIM-kortin PIN-koodin. Anna vanha PIN-koodi ja uusi kahteen kertaan.
- puhelimen lukitus: lisää lukitusnäytön valmiustilasta poistuttaessa. Vaihtoehdot ovat:
 - o ei mitään (oletus)
 - o avaa lukitus koodilla: voit asettaa nelinumeroisen lukituskoodin. Anna se kahteen kertaan vahvistaaksesi. Tämän jälkeen sinun täytyy antaa koodi joka kerta avatessasi näytön.
 - o avaa lukitus näppäimistöllä: kun tämä on aktiivinen, sinun tulee pitää tähti-näppäintä painettuna avataksesi puhelimen, kun näyttö on sammutettu.

- näyttö salasana: määrittää, näyttääkö MiniVision suojattujen salasananakenttien tekstin. Tämä vaikuttaa myös suojatun kentän tekstin puhumiseen.

Kieli

Tästä voit valita MiniVisionin kielen.

Näppäimistö

Tästä voit muuttaa näppäimistöasetuksia.

- värinäpalaute: voit asettaa puhelimen värisemään jokaisen näppäinpainalluksen myötä. Oletuksena tämä on pois käytöstä.
- äänipalaute: jokaisen näppäimen painalluksesta kuuluu äänimerkki. Oletuksena tämä on käytössä.
- värähdä merkin syöttämisen jälkeen, oletuksena pois käytöstä
- äänimerkki merkin kirjoituksen jälkeen, oletuksena käytössä
- kirjoitettujen merkkien hyväksymisviive: aika, jonka jälkeen kirjoitettu merkki oikeasti kirjoitetaan. Oletuksena on 1 sekunti.
- vastaa näppäimillä 0-9, oletuksena käytössä
- pikavalinta: täällä voit asettaa näppäimille 1-9 joko sovelluksen tai numeron.

Pikavalinta

Täällä voit asettaa numeronäppäinten pitkille painalluksille joko soitettavan yhteystiedon tai käynnistettävän sovelluksen. Kun valitset numeron (1 on varattu vastaajalle), puhelin kysyy, mitä haluat tehdä. Valitse joko "soita yhteystiedolle" tai "käynnistä sovellus". Valitse sitten yhteystietoluettelosta yhteystieto tai sovellusluettelosta käynnistettävä sovellus. Voit poistaa jo määritetyn pikavalinnan menemällä numeron kohdalle ja valitsemalla OK-näppäimen takaa avautuvasta valikosta "Poista".

Päivämäärä & aika

Täältä voit asettaa ajan ja päivämäärän, jos ne eivät päivitty automaattisesti.

- automaattinen päivä ja aika: käytä verkon aikaa. Oletuksena tämä on käytössä. Jos poistat sen käytöstä, seuraavien asetusten muokkaus mahdollistuu.
- aseta päivä: voit asettaa päivämäärän. Kentät ovat järjestyksessä: vuosi, kuukausi, päivä.
- aseta aika: kentät ovat tunti ja minuutti
- käytä 24-tunnin kelloa: voit asettaa kellon joko 24- tai 12-tuntiseksi. Oletuksena tämä määräytyy kielen mukaan.
- aikavyöhyke automaattinen: oletuksena tämä on valittu ja käytetään verkon aikaa. Poista valinta painamalla OK-näppäintä, jos haluat muuttaa aikavyöhykettä manuaalisesti. Tällöin alanuoli aktivoi

”Valitse aikavyöhyke” -kohdan. Pääset valitsemaan haluamasi aikavyöhykkeen painamalla OK-näppäintä ja selaamalla vyöhykkeitä ylä- ja alanuolilla. Lopuksi paina OK-näppäintä.

Tietoja puhelimesta

Täältä voit nähdä tietoja puhelimesta ja päivittää ohjelmistoversion.

- järjestelmäpäivitykset: täältä voit tarkistaa laitteen päivitykset. KAPSYS tarjoaa ilmaiset ohjelmistopäivitykset. Kun päivitys on saatavilla, latausnäyttö aukeaa. Valitse "Lataa". Latauksen tila kerrotaan ja näytetään näytöllä. Kun lataus on valmis, valitse "Asenna". MiniVision käynnistyy uudelleen muutaman minuutin kuluttua. Älä yritä käyttää sitä, ennen kuin puhe palautuu. HUOM! Ohjelmistopäivitys ei toimi langattoman verkkoyhteyden yli.
- tila: näyttää tilatietoja
 - o akun tila
 - o sarjanumero
 - o IMEI
 - o Bluetooth-osoite
 - o Wi-Fi MAC -osoite
 - o SIM
 - 🔗 verkko
 - 🔗 signaalin voimakkuus
 - 🔗 datatyyppi
 - 🔗 Roaming
 - 🔗 puhelinnumero
- malli
- koontiversio

Tekniset tiedot

- mitat: 124 x 51 x 13 mm
- paino: 100 g
- näyttö: 2.4" / QVGA (240 x 320)

Komponentit

- prosessori: Dual Core Cortex-A7, 1.0GHz

- piirisarja: Qualcomm Snapdragon 250
- sisäinen muisti: RAM 512MB, Flash 4GB
- ulkoinen muisti: SD-kortti, 32GB
- mobiilidata: 4G / 3G / 2G
- langattomat yhteydet: Wi-Fi ja Bluetooth 4.1
- SIM: Nano-SIM
- liitännät: 3.5 mm, Micro USB
- virankulutus:
 - o akku: 1400mAh Li-ion
 - o valmiusaika: 300h
 - o puheaika: 7h
- SAR: 1.21 W/Kg normaali käyttö / 1.30 W/Kg intensiivinen käyttö
- kamera: 2 Mp
- soittoäännet ja värinä

Ongelmatilanteissa

Lue seuraavat.

- Puhelinta suosietllaan sammutettavaksi ajoittain.
- Akku kannattaa ladata ja tehdä muutamia tarkistuksia.

Puhelin ei käynnisty / näyttö on musta

- Paina katkaisunäppäintä, kunnes näyttö käynnistyy.
- Tarkista akun lataus.
- Aseta akku uudelleen.

Näyttö ei ole luettava

- Puhdista näyttö.
- Säädä näytön kirkkautta.

Puhelin sammuu itsestään

- Paina katkaisunäppäintä herättääksesi puhelimen.

- Tarkista akun lataus.

Puhelimessa on vähäinen akun varaus

- Lataa akkua vähintään neljä tuntia.
- Ota WiFi ja Bluetooth pois käytöstä ja säädä näytön kirkkautta.

Puhelin ei lataa kunnolla

- Varmista, ettei akun varaus ole täysin purkautunut.
- Tarkista, että latauslämpötila on 0-40 astetta.
- Varmista, että akku on asetettu oikein.
- Varmista, että käytät oikea akkua ja laturia.
- Jos olet ulkomailla, tarkista seinäkosketinten yhteensopivuus.

Puhelin ei ole Internet-yhteydessä

- Yritä jossain muualla.
- Tarkista verkon kuuluvuus.
- Varmista, että lentotila ei ole kytketty.
- Varmista SIM-kortin toimivuus.
- Yritä myöhemmin; verkko saattaa olla ruuhkautunut.
- Aseta SIM-kortti uudelleen

SIM-korttivirhe

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
- Varmista, ettei SIM-kortin siru ole vahingoittunut.

En voi soittaa

- Tarkista numero.
- Jos soitat ulkomaile, tarkista maa- ja aluekoodi.
- Varmista, että puhelin on verkkoyhteydessä.
- Jos olet ulkomailla, varmista, että voit soittaa sieltä.
- Varmista, että lentotila on pois käytöstä.

En voi vastaanottaa puheluita

- Varmista, että puhelin on päällä ja yhteydessä verkkoon.
- Varmista, ettei lentotila ole käytössä.

Puhelujen äänenlaatu on huono

- Voit muuttaa puhelun äänenvoimakkuutta vasen- ja oikea-painikkeilla.
- Hallinnoi vastaanottotasoa komennolla ruutu+1.

Numeroa ei valita, vaikka valitsen yhteystiedon

- Varmista, että olet kirjoittanut numeron oikein.
- Jos soitat ulkomaille, varmista oikea maa- ja aluekoodi.

Minulle ei voi jättää puhepostia

- Varmista tämän palvelun saatavuus.

En pääse vastaajaani

- Varmista, että olet kirjoittanut oikean numeron.
- Yritä myöhemmin uudelleen.

Lukitsin SIM-korttini

- Olet antanut väärän PIN-koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

Ohjeesta

Tätä ohjetta voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. KAPSYS ei ole millään lailla vastuussa tässä ohjeessa mahdollisesti esiintyvistä teknisistä virheistä, eikä tämän ohjeen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. KAPSYS pyrkii parantamaan tuotteitaan jatkuvasti.

kuuntele varoen.

Takuutiedot

Käyttösuosituksia ja -varoituksia

- Käsittele puhelinta ja sen lisälaitteita varovasti, älä esimerkiksi pudottele niitä.

- Älä avaa laitetta, sillä tämä johtaa takuun häviämiseen.
- Puhdista laite käyttäen vain kosteahkoja liinoja. Älä käytä kemikaaleja tai pesuaineita.
- Tuote ei ole vedenkestävä. Suojaa sitä kosteudelta ja roiskeilta.
- Älä käytä laitetta lämmönlähteen lähellä. Vältä laitteen käyttöä kosteissa tai kuumissa tiloissa.
- Älä käytä laitetta magneettikenttien lähellä.
- Älä käytä laitetta, jos näyttö on hajonnut, sillä se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä käytä laitetta alueilla, joilla räjähdyksiä saattaa esiintyä.
- Älä lataa laitetta alle 0°C:n tai yli 45°C:n lämpötiloissa.
- Älä käytä laitetta sairaaloissa.
- Käyttölämpötila: -10°C - +55°C
- Lyhyen ajan säilytyslämpötila: -20°C - +60°C
- Pitkän ajan säilytyslämpötila: -10°C - +25°C
- Lataa akku aina täyteen.
- Pitkittynyt käyttö saattaa aiheuttaa lämpenemistä.
- Laitteen toimintakykyisyyden varmistamiseksi suosittelemme, että poistat siitä akun hetkeksi aika-ajoin.

Turvallisuus

Pidä tuote pikkulasten ulottumattomissa.

Kuuntele varoen.

Jos käytät sydämentahdistinta, varmista, että se sopii yhteen langattomien laitteiden kanssa.

Tuote saattaa aiheuttaa häiriöitä lääkinnällisille laitteille.

Takuu

Rikon sattuessa ota yhteyttä maahantuojaan.

Takuuta ei sovelleta seuraavissa tilanteissa:

Normaalista käytöstä johtuva akun kapasiteetin heikkeneminen

Sopimaton käyttö

Rikkoutunut laite

Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen

Akun purku tai oikosulku

Sellaisten lisälaitteiden käyttö, jotka eivät tule puhelimen mukana

Valtuuttamattomasta huollosta seurannut vahinko

Suosittellemme varmuuskopioiden ottamista säännöllisesti. Maahantuoja ei voida pitää vastuullisena tietojen katoamisesta.

Puhelinverkon toimivuutta kaikissa tilanteissa ei voida taata.

Specific Absorption Rate Information

Your MiniVision is a transceiver. It has been designed to comply with the limits set by the European Union's recommendations for exposure to radio frequencies.

The exposure guidelines for mobile devices are based on a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR).

The highest value for using this device is:

- Ear: 0.65 W / Kg (on a 10 gram cell tissue)
- Body: 1.30 W / Kg (on a 10 gram cell tissue)

The SAR limit defined in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts / kilogram (W / kg) averaged over 10 grams of tissue.

In tests to determine SAR, the device is used in standard operating positions and operates at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of a device in use may be less than the maximum value because the device is designed to use only the power needed to reach the network. This value changes depending on a number of factors such as the distance to a base station of the network.

In the case of use of the product held by hand and not worn by the ear, or carried close to the body, it is recommended to maintain a separation distance between the body and the back of the product greater than 1.5 cm.

The use of accessories may change the SAR values. The SAR values may vary according to the testing and reporting standards in force in different countries and according to the network band

Asiakaspalvelu

Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä maahantuojaan.

Voit myös ottaa yhteyttä KAPSYSiin:

Customer Service - 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie – Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, France

www.kapsys.com

Tavaramerkeistä

Kaikki tässä ohjeessa mainitut tavaramerkit ovat rekisteröijiensä omaisuutta.

Liite A: Ohjausnäppäinten toiminnot

näppäin: toiminto

vastausnäppäin, lyhyt: vastaa tulevaan puheluun tai avaa puhelinsovelluksen

vastausnäppäin, pitkä: SOS

katkaisunäppäin, lyhyt: aloitusnäyttö, valmiustila, katkaise nykyinen puhelu, hylkää tuleva puhelu

katkaisunäppäin, pitkä: käynnistää / sammuttaa MiniVisionin

ylös, lyhyt: edellinen kohde

alas, lyhyt: seuraava kohde

ylös, pitkä: ensimmäinen kohde

alas, pitkä: viimeinen kohde

vasen, lyhyt: vähennä äänenvoimakkuutta, kohdistin vasemmalle tekstikentässä

oikea, lyhyt: lisää äänenvoimakkuutta, kohdistin oikealle tekstikentässä

OK, lyhyt: valitse nykyinen kohde

OK, pitkä: tekstikentässä sanelu, sovellusluettelossa puhekomennot

takaisin, lyhyt: edellinen näyttö, poista merkki tekstikentässä

takaisin, pitkä: tyhjennä tekstikenttä

valikko, lyhyt: avaa nykyisen näytön valikko

Liite B: Numeronäppäinten toiminnot

näppäin: toiminto

1: 1 . ? ! @ - _ , ' \ " () / : ; + & % * = < > € £ \$ ¥ ¤ \ [] { } \ ~ ^ ` ÷ i §

2: a b c 2 A B C

3: d e f 3 D E F

4: g h I 4 G H I

5: j k l 5 J K L

6: m n o 6 M N O ô œ ö ñ ò

7: p q r s 7 P Q R S

8: t u v 8 T U V

9: w x y z 9 W X Y Z

0: väli, 0, uusi rivi

tähti: tilanvaihto

risu (1 kerta): . , ; : ! ? @ & | > < = - + * / \ # () { } [] % " ' ~ ^ 2 \$ € £ § _

risu (2 kertaa): emoji

Liite C: Esteettömyyspikanäppäimet

näppäin: toiminto

risu+1: tila

risu+2: lue kaikki

risu+4: vähennä puhenopeutta

risu+5: lisää puhenopeutta

risu+7: toista viimeisin lausuma

risu+8: tavaa viimeisin lausuma

risu+0: asetukset

liite D: Tekstikentän pikanäppäimet

tähti+3: leikkaa

tähti+6: kopioi

tähti+9: liitä

tähti+vasen: valitse kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki; voidaan käyttää monta kertaa

tähti+oikea: valitse kohdistimen oikealla puolella oleva merkki; voidaan käyttää monta kertaa